

Stryker Prime X™

Big wheel® / 第5車輪モデル 救急処置台ストレッチャーベッド

多機能 機動力
そして、イメージクオリティ



Stryker Prime X™

先進の機動性と安全性、使いやすさと ClearView テクノロジー

Prime Xは救急初療室での外傷処置や X 線撮影に優れた幅広 77cm の二重寝台を装備したストレッチャーです。ストレッチャー、処置台、ベッドの機能を併せ持つ Prime に対して、外傷処置と手技中の速やかな撮影、それに続く院内搬送に特化したモデルです。

一秒を争うタイミングの治療をサポートする Prime X と、幅広い症例や部署に合う Prime は、寝台以外の作りは同等で混在してご使用頂いても、スタッフが混乱せずに幅広い症例に備えることができます。



台の水平部の幅が 17 インチなので、患者の正中に合せた横位置合わせが盲目的にできます。



360 度の全方向から、どの位置にもカセットを設置できます。目盛により縦位置の調整も簡単です。



背板と下肢寝台をあげ、処置中の汚れも隅々まで清掃できます。(ベッド洗浄器にも対応)

ClearView™ テクノロジー

ABS 樹脂外殻に構造発泡剤を充填した構造で、撮影台に近いイメージクオリティです。患者寝台～トレイ距離は 7.5cm で操作性と撮影への影響のバランスを取っています。

Lift Assist™ 背板

増力機構により、患者様から目を離さずにレバー操作で背上げができます。カセットを壊す心配もありません。

内蔵式スケール (オプション)

患者様を乗せたまま正確な体重が計測できます。自動洗浄や手動クリーニングに耐えられる密閉式です。


Gridaway™ サイドレール

昇降時に挟みこみにくく、ベッド移動時の隙間ゼロで、患者安全を優先した設計です。



先進の移動性能

収納式の第 5 車輪により、思い通りの旋回やスピード調整ができます。Big Wheel® は始動時の力を 50%、カーブでの力を 60% 軽減します。

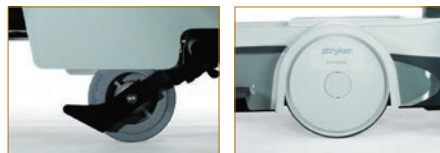


ブレーキ・ステア ペダル

金属ギアの旋回固定と、車輪側面圧迫の回転固定の強力なブレーキ機構です。ペダルは四方にあり、患者様から目を離さずにご操作できます。

トラウマ症例に適した「安全で使いやすい」Prime X™ ストレッチャー

患者様とスタッフの安全を第一に考えたPrimeシリーズに、外傷症例に適した幅広寝台と撮影台と同等の透過寝台を備えた Prime X。優れた基本性能のPrimeと組合せて、先進的な急性期病院の治療効率と安全向上に貢献いたします。

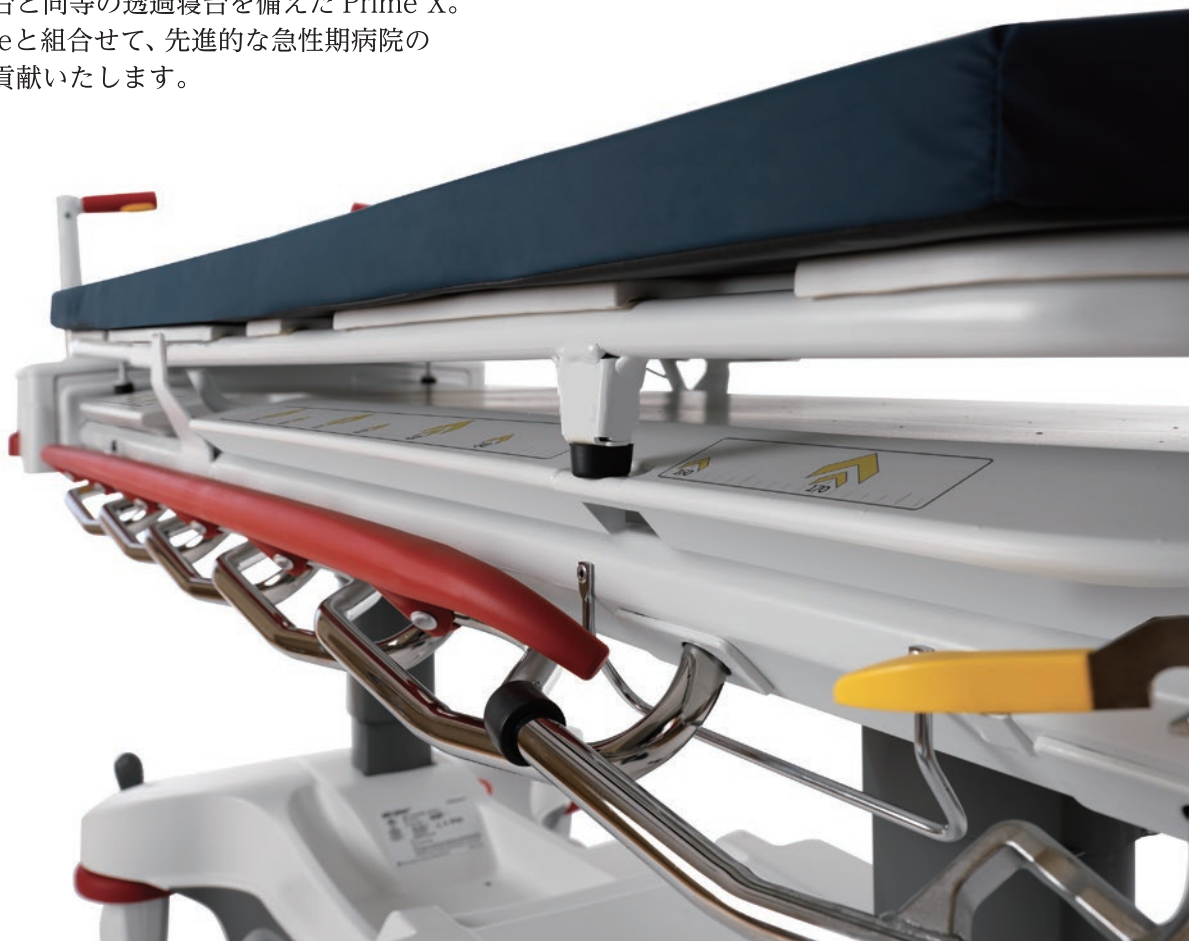

標準機能



酸素ボンベホルダー



縦型酸素ボンベホルダー


オプション



拡張型トレイ*



フットボードチャートホルダー

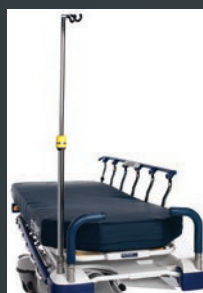

一体型 2 段式
IV ポール
頭尾側
(写真 頭側)



多用途トレイ
スライディング
ボード



四役フットボード*



除細動器用トレイ*

* 耐荷重 13.6kg

救急処置台マルチERベッドPrime Xシリーズ (X線撮影対応)

1105-000-000X プライム X ストレッチャー 1105X 76cm 幅寝台 X 線撮影機能付き

1115-000-000X プライム X ビッグウィールストレッチャー 1115X 76cm 幅寝台 X 線撮影機能付き

標準装備

- ABS樹脂製トレイ付ベースカバー
- 寝台下酸素ボンベホルダー
- 縦型酸素ボンベホルダー (1115-130-000)
- スライディングボード 76cm 用 三折式 (1105-045-310)
- 4 輪同時ブレーキ
- ハイ・ロー ペダル (両サイド、脚部 3ヶ所)
- ブレーキ・ステアペダル (四方)
- Glideaway™ サイドレール
- IV ポール取付穴 (4ヶ所)
- 空気圧バックレスト (背上げ部)
- ポップアップ 移動用ハンドル
- 一体型 2 段式 IV ポール (頭尾側)
- 着脱型 IV ポール 737/747/ プライム用 (1 本、0390-025-010)
- 自動洗浄器対応

仕様

仕様	1105-000-000X	1115-000-000X
全長	216 cm	216 cm
全幅	サイドレール上昇時	96.5 cm
	サイドレール下降時	77.5 cm
本体重量 (付属品含まず)	140.3 kg	156.0 kg
耐荷重	318 kg	318 kg
昇降レンジ (寝台天面高 マットレス厚含まず)	最高位	92.7 cm
	最低位	59.1 cm
寝台上げ角度 背部	0° - 90°	0° - 90°
トレンデレンブルグ角度 (正逆)	± 17°	± 17°
寝台寸法	76 × 191 cm	76 × 191 cm
サイドレール寸法	36 × 147 cm	36 × 147 cm
キャスト径	20 cm	20 cm

オプション

カタログ番号	製品名
1070-060-360 *	体重計システム プライム 30 インチ用
0390-025-010	着脱型 IV ポール 737/747/ プライム用
1703-034-301	ウルトラコンフォート SE マットレス 193 × 76 × 7.6cm
1704-034-301	ウルトラコンフォート SE マットレス 193 × 76 × 10cm
1105-045-200 **	除細動器用トレイ
1105-045-400 **	四役フットボード 機器トレイ / 記録台 / 延長ボード
1105-045-500 **	フットボード チャートホルダー
1105-045-310	スライディングボード 76cm 用 三折式
1105-045-700	拡張型トレイ プライム用
1105-045-800 ***	拡張型トレイホルダー 1105-045-700 用
1115-130-000	縦型酸素ボンベホルダー ストレッチャー用
0785-155-000	IV キャディ ストレッチャー用 要取付作業

*計量法の検定なし。当製品で測定した計測値は取引・証明に使用できません。

**装着すると体重計表示が見えなくなります。

***装着すると一体型 IV ポールが立てられなくなります。

Japan

この印刷物はストライカー社の製品を掲載しています。全てのストライカー社製品は、ご使用前にその添付文書・製品ラベル・取扱説明書をご参照ください。この印刷物に掲載されております仕様・形状は改良等の理由により、予告なしに変更されることがあります。ストライカー社製品についてご不明な点がございましたら、弊社までお問合せください。

Literature Number: BD1-30

YN/MI 3m 11/17

Copyright © 2017 Stryker

Printed in Japan

製造販売業者

日本ストライカー株式会社

112-0004 東京都文京区後楽2-6-1 飯田橋ファーストタワー
P 03 6894 0000

www.stryker.co.jp

医療従事者向けサイト: Stryker medical professional site
www.stryker.co.jp/mp2/