

stryker

# Universal CMF series

顎顔面外科プレートシステム 総合カタログ



# Table of Contents

## 目次

---

<b>システムの特徴</b> .....	03
スマートロックポリアクシャルロッキング機構 .....	03
カラーコーディングの説明 .....	03
スクリューの表記 .....	03
<b>各システムの概要</b> .....	04
<b>上顔面・眼窩底骨折</b>	
ユニバーサル アッパーフェイス モジュール .....	06
<b>中顔面骨折</b>	
ユニバーサル ミッドフェイス モジュール .....	11
<b>下顎骨折</b>	
ユニバーサル マンディブル モジュール .....	16
<b>顎矯正</b>	
ユニバーサル オーソグナティック モジュール .....	22
<b>下顎骨再建</b>	
ユニバーサル リコンストラクション モジュール .....	28
<b>中顔面・下顎骨折/顎矯正</b>	
ライビンガー MP ミニプレATING モジュール .....	35
<b>オプション器械</b>	
ライトアングルスクリュードライバー .....	41
<b>索引</b> .....	42


# Universal CMF Series

## システムの特徴

### スマートロックポリアクシャルロッキング機構

ロッキングスクリューは、ヘッド下にねじ切りを有し、スクリュー挿入時にプレートホール内側の「リップ」に噛み込む事によってロッキングされます。

ロッキングスクリューは垂直方向から最大振り角±10度の範囲でのポリアクシャルロッキングが可能です。

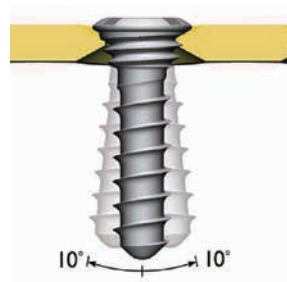






### カラーコーディングの説明

#### スクリュー径のカラーコーディング

- 1.2mm ..... ■
- 1.7mm ..... ■
- 2.0mm ..... ■
- 2.0mm ..... ■
- 2.3mm ..... ■


#### スクリューのカラーコーディング化

- セルフタッピング スクリュー 
- セルフタッピング MP スクリュー 
- セルフタッピング エマージェンシー スクリュー 
- セルフドリリング スクリュー 
- セルフタッピング ロッキングスクリュー 

#### 各モジュールのカラーコーディング

- 1.2mm      アッパーフェイス モジュール
- 1.7mm      ミッドフェイス モジュール
- 2.0mm      マンディブル モジュール
- 1.7/2.0mm      オーソグナティック モジュール
- 2.0/2.3mm      リコンストラクション モジュール
- 2.0mm      MP モジュール

### スクリューの表記

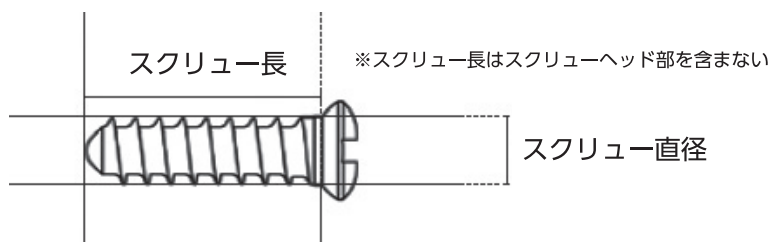

※スクリューヘッドはクロスピン形状を採用

# Universal CMF Series

## 各システムの概要

### 1.2mm Universal Upper-Face Module

#### ユニバーサル アッパーフェイス モジュール

- 2種類のスクリュー(セルフタッピング・セルフドリリング)
- 部位・症例に応じて、マリアブル(0.5mm厚・ブルー)・スタンダード(0.6mm厚・ゴールド)プレートの選択が可能
- 眼窩底骨折に対応したオービタルフロアプレート



適応部位



### 1.7mm Universal Mid-Face Module

#### ユニバーサル ミッドフェイス モジュール

- 3種類のスクリュー(セルフタッピング・セルフドリリング・ロッキング)  
※ロッキングスクリューはロッキングプレートのみに対応
- 部位・症例に応じて、スタンダード(0.6mm厚・ゴールド)・ロッキング(0.8mm厚・シルバー)プレートの選択が可能



適応部位



### 2.0mm Universal Mandible Module

#### ユニバーサル マンディブル モジュール

- 2種類のスクリュー(セルフタッピング・ロッキング)  
部位・症例に応じて、ミニプレート(1.0mm厚・ブルー)・フラクチャープレート(1.5mm厚・ゴールド)の選択が可能
- ミニプレート(ブルー)はリバーシブル



適応部位




## 1.7/2.0mm Universal Orthognathic Module

### ユニバーサル オーソグナティック モジュール

- 3種類のスクリュー(セルフタッピング・セルフドリリング・ロッキング)  
※セルフドリリングスクリューはオプション
- 顎変形症手術に特化したプレートラインナップ
  - ▶ ルフォーIプレート、SSROプレート、チンプレート
- 口腔内アプローチのインスツルメントとしてのライトアングルスクリュードライバー(オプション)



適応部位

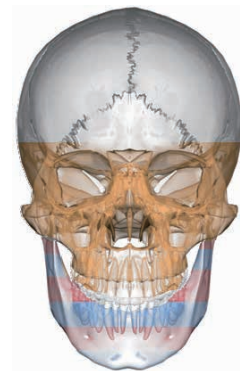

## 2.0/2.3mm Universal Reconstruction Module

### ユニバーサル リコンストラクション モジュール

- 2種類のスクリュー(セルフタッピング・ロッキング)
  - ▶ 3種類の径(2.0/2.3/2.7mm)から選択可能
- 用途に応じて2種類(1.5mm厚・ゴールド、2.8mm厚・シルバー)のプレート選択が可能
  - ▶ 2.0/2.3/2.7mm全サイズのスクリューに対応
- ベンディングが容易なアナトミカルにプレベンディングされたプレート



適応部位




## 2.0mm Leibinger MP Mini Plating Module

### ライビンガー MP ミニプレーティング モジュール

- WurzburgシステムとSteinhauserシステムを統合
- 汎用性のある豊富なインプラントラインナップ
- 操作性の良いシンプルな器械



適応部位

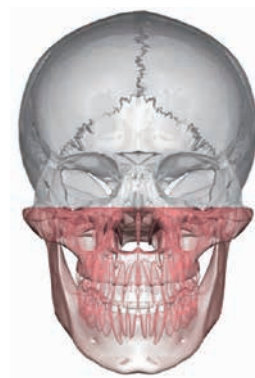

## Right Angled Screwdriver

### ライトアングルスクリュードライバー

- 口腔内からアプローチし、垂直方向へのドリリング・スクリュー挿入が可能
- 電動ドリルシステムへの接続によるドリリング
- ヘッド部の更なるロープロファイル化
- ドライバー操作をアシストするエクスターナルハンドル
- 有効長が短く改良されたツイストドリル



# 上顔面・眼窩底骨折

ユニバーサル アッパーフェイス モジュール



## インプラントトレイ

**29-12000** U-CMFアッパーフェイスモジュールケース

**29-12001** U-CMFアッパーフェイス内部トレイ

## ボーンスクリュー、クロスピン

医療機器承認番号

販売名

1)21600BZY00128000

ユニバーサルチタンボーンスクリュー

2)21700BZY00632000

ユニバーサルチタンボーンスクリュー(滅菌)


3)22100BZX00883000

ユニバーサルCMFツイストドリル(滅菌)

## 1.2mm セルフタッピングスクリュー



未滅菌	滅菌	規格
51-12003 <sup>1)</sup>	21-12003 <sup>2)</sup>	1.2×3mm
51-12004 <sup>1)</sup>	21-12004 <sup>2)</sup>	1.2×4mm
51-12005 <sup>1)</sup>	21-12005 <sup>2)</sup>	1.25×5mm
51-12006 <sup>1)</sup>	21-12006 <sup>2)</sup>	1.25×6mm
51-12007 <sup>1)</sup>	21-12007 <sup>2)</sup>	1.25×7mm
51-12008 <sup>1)</sup>	21-12008 <sup>2)</sup>	1.25×8mm
51-12010 <sup>1)</sup>	21-12010 <sup>2)</sup>	1.25×10mm
51-12012 <sup>1)</sup>	21-12012 <sup>2)</sup>	1.25×12mm

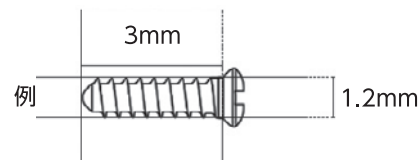

## 1.2mm セルフドリリングスクリュー



未滅菌	滅菌	規格
51-12903 <sup>1)</sup>	21-12903 <sup>2)</sup>	1.2×3mm
51-12904 <sup>1)</sup>	21-12904 <sup>2)</sup>	1.2×4mm

## 1.4mm エマージェンシースクリュー



未滅菌	滅菌	規格
51-14003 <sup>1)</sup>		1.4×3mm
51-14005 <sup>1)</sup>	21-14005 <sup>2)</sup>	1.4×5mm
51-14007 <sup>1)</sup>	21-14007 <sup>2)</sup>	1.4×7mm
51-14009 <sup>1)</sup>		1.4×9mm

## ツイストドリル(滅菌)



91-09504<sup>3)</sup> 径 0.9mm 長さ 46mm WR 5mm 滅菌



91-10506<sup>3)</sup> 径 1.0mm 長さ 50mm WR 7mm 滅菌



91-10512<sup>3)</sup> 径 1.0mm 長さ 54mm WR 13mm 滅菌

## スタンダードプレート 0.6mm厚

医療機器承認番号

1) 21600BZY00235000  
2) 21800BZY10092000

販売名

ユニバーサルCMF頭蓋/ミッドフェイスモジュール  
ユニバーサルCMF頭蓋/ミッドフェイスモジュール(滅菌)


### ストレート型プレート



24穴ストレート

未滅菌 滅菌  
55-06224<sup>1)</sup> 11-06224<sup>2)</sup>


### 3D型プレート

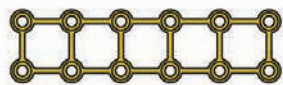

6×2穴


未滅菌 滅菌  
55-06233<sup>1)</sup> 11-06233<sup>2)</sup>

### L型プレート

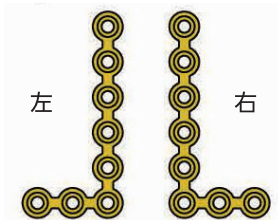

8穴  
未滅菌 滅菌  
55-06260<sup>1)</sup> 左 11-06260<sup>2)</sup> 左  
55-06261<sup>1)</sup> 右 11-06261<sup>2)</sup> 右

### T型プレート

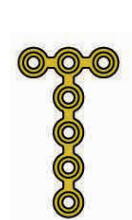

7穴  
未滅菌 滅菌  
55-06270<sup>1)</sup> 11-06270<sup>2)</sup>

### ダブルY型プレート



7穴  
未滅菌 滅菌  
55-06240<sup>1)</sup> 11-06240<sup>2)</sup>

### カーブ型プレート



4穴カーブ  
未滅菌 滅菌  
55-06254<sup>1)</sup> 11-06254<sup>2)</sup>



10穴カーブ  
未滅菌 滅菌  
55-06250<sup>1)</sup> 11-06250<sup>2)</sup>



オービタルプレート 0.3mm厚


医療機器承認番号	販売名
1) 21600BZY00267000	ユニバーサルCMF頭蓋/上顎用モジュール
2) 22100BZX00485000	ライピンガー骨手術器具
3) 21800BZY10093000	ユニバーサルCMF頭蓋/上顎用モジュール(滅菌)
4) 16200BZY01088000	メッシュプレート



スモール 0.3mm厚

未滅菌 滅菌

**54-03003<sup>1)</sup> 10-03003<sup>3)</sup>**

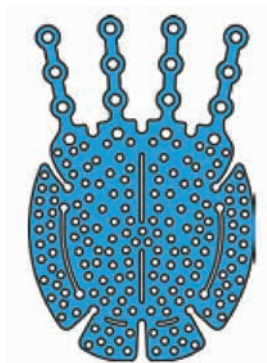

ミディアム 0.3mm厚

未滅菌 滅菌

**54-03002<sup>1)</sup> 10-03002<sup>3)</sup>**



ラージ 0.3mm厚

未滅菌 滅菌

**54-03001<sup>1)</sup> 11-03001<sup>3)</sup>**

対応テンプレート


スモール/ミディアム

**54-03000<sup>2)</sup>**

ラージ

**54-04000<sup>2)</sup>**

マイクロメッシュ

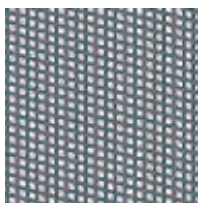

厚さ0.1mm 未滅菌

120×120mm


**54-00260<sup>4)</sup>**



厚さ0.1mm 未滅菌

60×60mm

**54-00262<sup>4)</sup>**

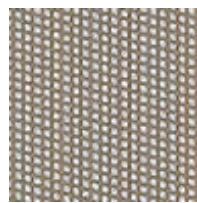

厚さ0.2mm 未滅菌

120×120mm

**54-00270<sup>4)</sup>**



厚さ0.2mm 未滅菌

60×60mm

**54-00272<sup>4)</sup>**

## 1.2mm アッパーフェイス 器械セット



U-CMFアッパーミッドフェイス器械トレイ  
**29-13030**



U-CMF プレート把持鑷子  
アングル  
**01-08110**



U-CMF プレートベンダーカッター  
アッパーミッドフェイス用 右  
**62-12175**



U-CMF アデラープライヤー  
アッパーミッドフェイス用  
**62-12173**



プレートカッター アッパー/ミッド/ニュー口用  
**62-18330**

U-CMF プレートベンダー  
アッパーミッドフェイス用 左  
**62-12176**



U-CMF ドライバーハンドル(メタル)  
1.2/1.7mm クロスピン型  
**62-20285**



U-CMF スクリュードライバーブレード  
1.2/1.7mm クロスピン型  
**62-12170**



U-CMF 滅菌コンテナ  
**29-13015**



U-CMF 滅菌コンテナ  
上フタ  
**29-13016**



U-CMF アクセサリートレイ  
**29-13022**

# 中顔面骨折

## ユニバーサル ミッドフェイス モジュール



### インプラントトレイ

- 29-17000** U-CMF ミッドフェイスモジュールケース
- 29-17001** U-CMF ミッドフェイスフラクチャー内部トレイ


## ボーンスクリュー、クロスピン

医療機器承認番号	販売名
1)21600BZY00128000	ユニバーサルチタンボーンスクリュー
2)21700BZY00632000	ユニバーサルチタンボーンスクリュー(滅菌)
3)22100BZX00883000	ユニバーサルCMFツイストドリル(滅菌)

### 1.7mm セルフタッピングスクリュー



未滅菌	滅菌	規格
51-17003 <sup>1)</sup>	21-17003 <sup>2)</sup>	1.7×3mm
51-17004 <sup>1)</sup>	21-17004 <sup>2)</sup>	1.7×4mm
51-17005 <sup>1)</sup>	21-17005 <sup>2)</sup>	1.7×5mm
51-17006 <sup>1)</sup>	21-17006 <sup>2)</sup>	1.7×6mm
51-17007 <sup>1)</sup>		1.7×7mm
51-17008 <sup>1)</sup>	21-17008 <sup>2)</sup>	1.7×8mm
51-17010 <sup>1)</sup>		1.7×10mm
51-17012 <sup>1)</sup>		1.7×12mm

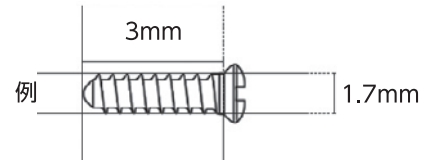

### 1.7mm セルフドリリングスクリュー



未滅菌	滅菌	規格
51-17903 <sup>1)</sup>	21-17903 <sup>2)</sup>	1.7×3mm
51-17904 <sup>1)</sup>	21-17904 <sup>2)</sup>	1.7×4mm
51-17905 <sup>1)</sup>		1.7×5mm
51-17906 <sup>1)</sup>		1.7×6mm

### 1.7mm ロッキングスクリュー



未滅菌	滅菌	規格
51-17504 <sup>1)</sup>	21-17504 <sup>2)</sup>	1.7×4mm
51-17505 <sup>1)</sup>	21-17505 <sup>2)</sup>	1.7×5mm
51-17506 <sup>1)</sup>	21-17506 <sup>2)</sup>	1.7×6mm

### 1.9mm エマージェンシースクリュー



未滅菌	滅菌	規格
51-19003 <sup>1)</sup>		1.9×3mm
51-19005 <sup>1)</sup>	21-19005 <sup>2)</sup>	1.9×5mm
51-19007 <sup>1)</sup>	21-19007 <sup>2)</sup>	1.9×7mm

## ツイストドリル(滅菌)



91-13505<sup>3)</sup> 径 1.35mm 長さ50mm WL 5mm 滅菌



91-13506<sup>3)</sup> U-CMF スクリュードライバーブレード 径 1.35mm 長さ 50mm WR 7mm 滅菌



91-13512<sup>3)</sup> 径 1.4mm 長さ 54mm WR 13mm 滅菌

# スタンダードプレート 0.6mm厚

医療機器承認番号

販売名

1) 21600BZY00235000

ユニバーサルCMF頭蓋/ミッドフェイスモジュール

2) 21800BZY10092000

ユニバーサルCMF頭蓋/ミッドフェイスモジュール(滅菌)

## ストレート型プレート



4穴 ストレート

未滅菌 滅菌  
55-06704<sup>1)</sup> 11-06704<sup>2)</sup>



24穴 ストレート

未滅菌 滅菌  
55-06724<sup>1)</sup> 11-06724<sup>2)</sup>

## カーブ型プレート



4穴 カーブ

未滅菌 滅菌  
55-06754<sup>1)</sup> 11-06754<sup>2)</sup>



10穴 カーブ

未滅菌 滅菌  
55-06750<sup>1)</sup> 11-06750<sup>2)</sup>

## T型プレート



5穴

未滅菌 滅菌  
55-06771<sup>1)</sup> 11-06771<sup>2)</sup>

## Y型プレート



5穴 8mm

未滅菌 滅菌  
55-05151<sup>1)</sup> 11-05151<sup>2)</sup>


## ダブルY型プレート



7穴 WY型


未滅菌 滅菌  
55-05164<sup>1)</sup> 11-05164<sup>2)</sup>

## L型プレート

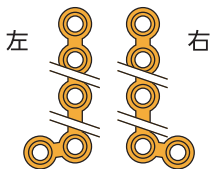


5穴 2mm 100°

未滅菌 滅菌  
55-06760<sup>1)</sup> 左 11-06760<sup>2)</sup> 左  
55-06761<sup>1)</sup> 右 11-06761<sup>2)</sup> 右

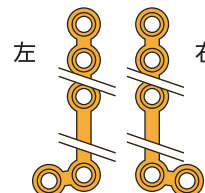


5穴 5mm 100°

未滅菌 滅菌  
55-06762<sup>1)</sup> 左 11-06762<sup>2)</sup> 左  
55-06763<sup>1)</sup> 右 11-06763<sup>2)</sup> 右

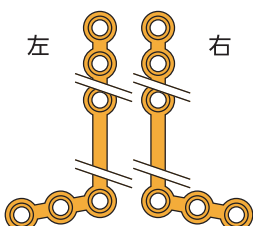

6穴 8mm 100°

未滅菌 滅菌  
55-06764<sup>1)</sup> 左 11-06764<sup>2)</sup> 左  
55-06765<sup>1)</sup> 右 11-06765<sup>2)</sup> 右

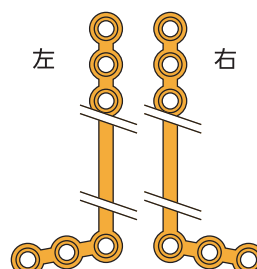

6穴 12mm 100°

未滅菌 滅菌  
55-06766<sup>1)</sup> 左 11-06766<sup>2)</sup> 左  
55-06767<sup>1)</sup> 右 11-06767<sup>2)</sup> 右

# ロッキングプレート 0.8mm厚

医療機器承認番号 販売名  
 1) 21600BZY00267000 ユニバーサルCMF頭蓋/上顎用モジュール  
 2) 21800BZY10093000 ユニバーサルCMF頭蓋/上顎用モジュール(滅菌)

## ストレート型プレート



16穴 ストレート  
 未滅菌 滅菌  
**55-05716<sup>1)</sup> 11-05716<sup>2)</sup>**

## カーブ型プレート



8穴 カーブ  
 未滅菌 滅菌  
**55-05758<sup>1)</sup> 11-05758<sup>2)</sup>**

## Y型プレート



5穴 4mm  
 未滅菌 滅菌  
**55-05751<sup>1)</sup> 11-05751<sup>2)</sup>**



5穴 8mm  
 未滅菌  
**55-05752<sup>1)</sup>**

## ダブルY型プレート




7穴  
 未滅菌 滅菌  
**55-05742<sup>1)</sup> 11-05742<sup>2)</sup>**

## 3D型プレート



2×2穴  
 未滅菌 滅菌  
**55-05731<sup>1)</sup> 11-05731<sup>2)</sup>**

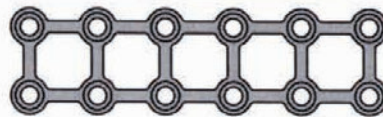

6×2穴  
 未滅菌  
**55-05733<sup>1)</sup>**

## L型プレート




5穴 2mm  
 未滅菌 滅菌  
**55-05761<sup>1)</sup> 11-05761<sup>2)</sup>**



5穴 5mm  
 未滅菌 滅菌  
**55-05763<sup>1)</sup> 11-05763<sup>2)</sup>**



6穴 8mm  
 未滅菌 滅菌  
**55-05765<sup>1)</sup> 11-05765<sup>2)</sup>**

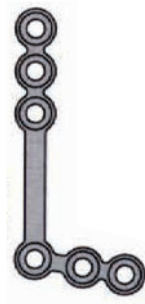

6穴 12mm (1.0mm厚)  
 未滅菌 滅菌  
**55-05767<sup>1)</sup> 11-05767<sup>2)</sup>**

## 1.7mm アッパーフェイス 器械セット



U-CMFアッパーミッドフェイス器械トレイ  
**29-13030**



U-CMF プレート把持鑷子  
アングル  
**01-08110**



U-CMF プレートベンダーカッター  
アッパーミッドフェイス用 右  
**62-12175**



U-CMF アデラープライヤー  
アッパーミッドフェイス用  
**62-12173**



プレートカッター アッパー/ミッド/ニューロ用  
**62-18330**

U-CMF プレートベンダー  
アッパーミッドフェイス用 左  
**62-12176**



U-CMF ドライバーハンドル(メタル)  
1.2/1.7mm クロスピン型  
**62-20285**



U-CMF スクリュードライバーブレード  
1.2/1.7mm クロスピン型  
**62-12170**



カニューレ付きフォーク用ハンドル  
U-CMF用  
**62-20000**



U-CMF ドリルガイド  
1.7mmロックングスクリュー  
**62-17517**




U-CMF スクリュードライバーブレード  
1.2/1.7mm クロスピン型  
**62-12170**



U-CMF 滅菌コンテナ  
**29-13015**



U-CMF 滅菌コンテナ  
上フタ  
**29-13016**

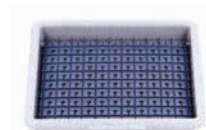

U-CMF アクセサリートレイ  
**29-13022**

# 下顎骨折

## ユニバーサル マンディブル モジュール



### インプラントトレイ

- 29-20230 U-CMF 下顎モジュールケース
- 29-20231 U-CMF 下顎モジュール内部トレイ



## ボーンスクリュー、クロスピン

医療機器承認番号

販売名

1)21600BZY00128000

ユニバーサルチタンボーンスクリュー


2)21700BZY00632000

ユニバーサルチタンボーンスクリュー(滅菌)

### 2.0mm セルフタッピングスクリュー



未滅菌	滅菌	規格
52-20404 <sup>1)</sup>	21-20404 <sup>2)</sup>	2.0×4mm
52-20405 <sup>1)</sup>	21-20405 <sup>2)</sup>	2.0×5mm
52-20406 <sup>1)</sup>	21-20406 <sup>2)</sup>	2.0×6mm
52-20407 <sup>1)</sup>		2.0×7mm
52-20408 <sup>1)</sup>	21-20408 <sup>2)</sup>	2.0×8mm
52-20410 <sup>1)</sup>	21-20410 <sup>2)</sup>	2.0×10mm
52-20412 <sup>1)</sup>	21-20412 <sup>2)</sup>	2.0×12mm
52-20414 <sup>1)</sup>	21-20414 <sup>2)</sup>	2.0×14mm
52-20416 <sup>1)</sup>	21-20416 <sup>2)</sup>	2.0×16mm
52-20418 <sup>1)</sup>		2.0×18mm
52-20420 <sup>1)</sup>		2.0×20mm

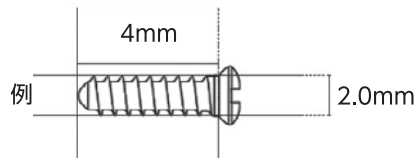

### 2.0mm ロッキングスクリュー




未滅菌	滅菌	規格
52-20504 <sup>1)</sup>	21-20504 <sup>2)</sup>	2.0×4mm
52-20505 <sup>1)</sup>	21-20505 <sup>2)</sup>	2.0×5mm
52-20506 <sup>1)</sup>	21-20506 <sup>2)</sup>	2.0×6mm
52-20507 <sup>1)</sup>	21-20507 <sup>2)</sup>	2.0×7mm
52-20508 <sup>1)</sup>	21-20508 <sup>2)</sup>	2.0×8mm
52-20510 <sup>1)</sup>	21-20510 <sup>2)</sup>	2.0×10mm
52-20512 <sup>1)</sup>	21-20512 <sup>2)</sup>	2.0×12mm
52-20514 <sup>1)</sup>	21-20514 <sup>2)</sup>	2.0×14mm
52-20516 <sup>1)</sup>	21-20516 <sup>2)</sup>	2.0×16mm
52-20518 <sup>1)</sup>		2.0×18mm
52-20520 <sup>1)</sup>		2.0×20mm

### 2.3mm セルフタッピングスクリュー(エマーゼンシー)



未滅菌	滅菌	規格
52-23404 <sup>1)</sup>	21-23404 <sup>2)</sup>	2.3×4mm
52-23406 <sup>1)</sup>	21-23406 <sup>2)</sup>	2.3×6mm
52-23408 <sup>1)</sup>	21-23408 <sup>2)</sup>	2.3×8mm
52-23410 <sup>1)</sup>	21-23410 <sup>2)</sup>	2.3×10mm
52-23412 <sup>1)</sup>	21-23412 <sup>2)</sup>	2.3×12mm
52-23414 <sup>1)</sup>	21-23414 <sup>2)</sup>	2.3×14mm
52-23416 <sup>1)</sup>	21-23416 <sup>2)</sup>	2.3×16mm
52-23418 <sup>1)</sup>	21-23418 <sup>2)</sup>	2.3×18mm
52-23420 <sup>1)</sup>	21-23420 <sup>2)</sup>	2.3×20mm

医療機器承認番号	販売名
1)21600BZY00128000	ユニバーサルチタンボンスクリュー
2)21700BZY00632000	ユニバーサルチタンボンスクリュー(滅菌)
3)22100BZX00883000	ユニバーサルCMFツイストドリル(滅菌)

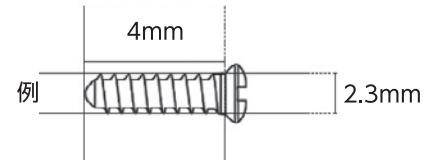

### ツイストドリル(滅菌)



91-16005<sup>3)</sup> 径 1.6mm 長さ 50mm WL 5mmストップ 滅菌



91-16007<sup>3)</sup> 径 1.6mm 長さ 50mm 7mmストップ 滅菌



91-16035<sup>3)</sup> 径 1.6mm 長さ 115mm WR 35mm 滅菌



91-16535<sup>3)</sup> 径 1.6mm 長さ 85mm WR 27mm 滅菌

## ミニプレート 1.0mm厚(リバーシブル)

医療機器承認番号	販売名
1)21600BZY00080000	ユニバーサルCMF下顎骨骨折モジュール
2)21800BZY10089000	ユニバーサルCMF下顎骨骨折モジュール(滅菌)
3)22300BZX00342000	ユニバーサルCMFミニプレート(MP)モジュール

### ストレート型プレート



4穴  
未滅菌 滅菌  
55-10504<sup>1)</sup> 11-10504<sup>2)</sup>



6穴  
未滅菌 滅菌  
55-10506<sup>1)</sup> 11-10506<sup>2)</sup>



4穴 バー付  
未滅菌 滅菌  
55-10505<sup>1)</sup> 11-10505<sup>2)</sup>



4穴 直ロング  
未滅菌 滅菌  
55-10503<sup>1)</sup> 11-10503<sup>2)</sup>



6穴 直ロング  
未滅菌 滅菌  
55-10507<sup>1)</sup> 11-10507<sup>2)</sup>



16穴  
未滅菌  
55-10516<sup>1)</sup>




16穴 ロッキング直  
未滅菌 滅菌  
55-10515<sup>1)</sup> 11-10515<sup>2)</sup>

### 3D型プレート



4×2穴 正方形  
未滅菌  
55-10542<sup>1)</sup>

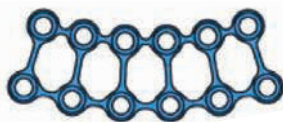

6×2穴 正方形カーブ  
未滅菌  
55-10562<sup>1)</sup>

### T型プレート



9穴  
未滅菌  
55-10569<sup>3)</sup>

## フラクチャープレート 1.5mm厚

医療機器承認番号

販売名

1)21600BZY00080000

ユニバーサルCMF下顎骨骨折モジュール

2)21800BZY10089000

ユニバーサルCMF下顎骨骨折モジュール(滅菌)



4穴

未滅菌

滅菌

55-15504<sup>1)</sup>

11-15504<sup>2)</sup>



4穴 バー付

未滅菌

滅菌

55-15505<sup>1)</sup>

11-15505<sup>2)</sup>



6穴

未滅菌

滅菌

55-15506<sup>1)</sup>

11-15506<sup>2)</sup>



6穴 バー付

未滅菌

滅菌

55-15507<sup>1)</sup>

11-15507<sup>2)</sup>



14穴

未滅菌

滅菌

55-15514<sup>1)</sup>

11-15514<sup>2)</sup>



6穴 140°

未滅菌

滅菌

55-15536<sup>1)</sup>

11-15536<sup>2)</sup>

## 2.0mm マンディブル 器械セット



U-CMF 顎骨器具トレイ  
**29-13020**



U-CMF プレート把持鑷子  
アングル  
**01-08110**



U-CMF ベンダー・カッター  
左 右  
**64-00242 64-00243**



U-CMF スクリュードライバーブレード  
2.0/2.3/2.7mm  
**62-20130**



U-CMF スクリュードライバーラチェットハンドル  
**62-20290**



U-CMF スクリュードライバーリボルビングリジッド  
**62-20295**



U-CMF ドリルガイド正円  
2.0mm  
**62-00201**



U-CMF トロッカーハンドル  
**62-00301**



チークレトラクター  
62-00301保持用  
**62-00302**



U-CMF トロッカー  
**62-00303**



デプスゲージ  
**01-08730**



U-CMF 滅菌コンテナ  
**29-13015**



U-CMF 滅菌コンテナ  
上フタ  
**29-13016**



U-CMF アクセサリートレイ  
**29-13022**

# 顎矯正

## ユニバーサル オーソグナティック モジュール



### インプラントトレイ

- 29-17200** U-CMF 矯正モジュールケース
- 29-17201** U-CMF 矯正モジュール内部トレイ
- 29-17202** U-CMF 矯正モジュールプレバントトレイ

## ボーンスクリュー、クロスピン

### 1.7mm セルフタッピングスクリュー



未滅菌	滅菌	規格
51-17003 <sup>1)</sup>	21-17003 <sup>2)</sup>	1.7×3mm
51-17004 <sup>1)</sup>	21-17004 <sup>2)</sup>	1.7×4mm
51-17005 <sup>1)</sup>	21-17005 <sup>2)</sup>	1.7×5mm
51-17006 <sup>1)</sup>	21-17006 <sup>2)</sup>	1.7×6mm
51-17007 <sup>1)</sup>		1.7×7mm
51-17008 <sup>1)</sup>	21-17008 <sup>2)</sup>	1.7×8mm
51-17010 <sup>1)</sup>		1.7×10mm
51-17012 <sup>1)</sup>		1.7×12mm

### 1.7mm セルフドリリングスクリュー




未滅菌	滅菌	規格
51-17903 <sup>1)</sup>	21-17903 <sup>2)</sup>	1.7×3mm
51-17904 <sup>1)</sup>	21-17904 <sup>2)</sup>	1.7×4mm
51-17905 <sup>1)</sup>		1.7×5mm
51-17906 <sup>1)</sup>		1.7×6mm

### ツイストドリル(滅菌)

91-13505 <sup>7)</sup>	径1.35mm 長さ 50mm WL 5mm	滅菌
91-13506 <sup>7)</sup>	径1.35mm 長さ 50mm WR 7mm	滅菌
91-13512 <sup>7)</sup>	径1.4mm 長さ 54mm WR 13mm	滅菌

医療機器承認番号	販売名
1)21600BZY00128000	ユニバーサルチタンボーンスクリュー
2)21700BZY00632000	ユニバーサルチタンボーンスクリュー(滅菌)
3)21600BZY00235000	ユニバーサルCMF頭蓋/ミッドフェイスモジュール
4)21800BZY10092000	ユニバーサルCMF頭蓋/ミッドフェイスモジュール(滅菌)
5)21600BZY00267000	ユニバーサルCMF頭蓋/上顎用モジュール
6)21800BZY10093000	ユニバーサルCMF頭蓋/上顎用モジュール(滅菌)
7)22100BZX00883000	ユニバーサルCMFツイストドリル(滅菌)

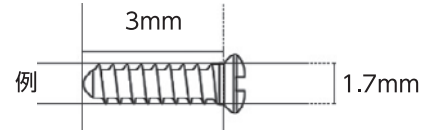

### 1.7mm ロッキングスクリュー



未滅菌	滅菌	規格
51-17504 <sup>1)</sup>	21-17504 <sup>2)</sup>	1.7×4mm
51-17505 <sup>1)</sup>	21-17505 <sup>2)</sup>	1.7×5mm
51-17506 <sup>1)</sup>	21-17506 <sup>2)</sup>	1.7×6mm

### 1.9mm エマージェンシースクリュー



未滅菌	滅菌	規格
51-19005 <sup>1)</sup>	21-19005 <sup>2)</sup>	1.9×5mm
51-19007 <sup>1)</sup>	21-19007 <sup>2)</sup>	1.9×7mm
51-19009 <sup>1)</sup>		1.9×9mm

## スタンダードプレート 0.6mm厚

5穴 L型 2mm 100°		未滅菌	滅菌
左	右	55-06760 <sup>3)</sup>	11-06760 <sup>4)</sup>
		55-06761 <sup>3)</sup>	11-06761 <sup>4)</sup>

5穴 L型 5mm 100°		未滅菌	滅菌
左	右	55-06762 <sup>3)</sup>	11-06762 <sup>4)</sup>
		55-06763 <sup>3)</sup>	11-06763 <sup>4)</sup>

6穴 L型 8mm 100°		未滅菌	滅菌
左	右	55-06764 <sup>3)</sup>	11-06764 <sup>4)</sup>
		55-06765 <sup>3)</sup>	11-06765 <sup>4)</sup>

6穴 L型 12mm 100°		未滅菌	滅菌
左	右	55-06766 <sup>3)</sup>	11-06766 <sup>4)</sup>
		55-06767 <sup>3)</sup>	11-06767 <sup>4)</sup>

## ロッキングプレート 0.8mm厚



5穴 L型 2mm		未滅菌	滅菌
		55-05761 <sup>5)</sup>	11-05761 <sup>6)</sup>



5穴 L型 5mm		未滅菌	滅菌
		55-05763 <sup>5)</sup>	11-05763 <sup>6)</sup>



6穴 L型 8mm		未滅菌	滅菌
		55-05765 <sup>5)</sup>	11-05765 <sup>6)</sup>



6穴 L型 12mm(1.0mm厚)		未滅菌	滅菌
		55-05767 <sup>5)</sup>	11-05767 <sup>6)</sup>

## ルフォー I プレート 0.9mm厚

医療機器承認番号

販売名

1)21600BZY00185000

ユニバーサルCMF顎矯正モジュール

2)21800BZY10090000

ユニバーサルCMF顎矯正モジュール(滅菌)



11穴 0mm

未滅菌

滅菌

55-11700<sup>1)</sup> 左 11-11700<sup>2)</sup> 左

55-12700<sup>1)</sup> 右 11-12700<sup>2)</sup> 右



11穴 3mm

未滅菌

滅菌

55-11703<sup>1)</sup> 左 11-11703<sup>2)</sup> 左

55-12703<sup>1)</sup> 右 11-12703<sup>2)</sup> 右



11穴 4mm

未滅菌

滅菌

55-11704<sup>1)</sup> 左 11-11704<sup>2)</sup> 左

55-12704<sup>1)</sup> 右 11-12704<sup>2)</sup> 右



11穴 6mm

未滅菌

滅菌

55-11706<sup>1)</sup> 左 11-11706<sup>2)</sup> 左

55-12706<sup>1)</sup> 右 11-12706<sup>2)</sup> 右



11穴 8mm

未滅菌

55-11708<sup>1)</sup> 左

55-12708<sup>1)</sup> 右



11穴 10mm

未滅菌

55-11710<sup>1)</sup> 左

55-12710<sup>1)</sup> 右

## チンプレート 0.6mm厚



6穴 4mm

未滅菌

滅菌

55-10704<sup>1)</sup> 11-10704<sup>2)</sup>



6穴 6mm

未滅菌

滅菌

55-10706<sup>1)</sup> 11-10706<sup>2)</sup>




6穴 8mm

未滅菌

滅菌

55-10708<sup>1)</sup> 11-10708<sup>2)</sup>

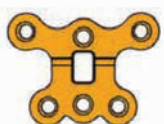

6穴 10mm

未滅菌

滅菌

55-10710<sup>1)</sup> 11-10710<sup>2)</sup>



6穴 12mm

未滅菌

滅菌

55-10712<sup>1)</sup> 11-10712<sup>2)</sup>



ステップ長(mm)



## ボーンスクリュー、クロスピン

医療機器承認番号

販売名

1) 21600BZY00128000

ユニバーサルチタンボーンスクリュー

2) 21700BZY00632000

ユニバーサルチタンボーンスクリュー(滅菌)


3) 22100BZX00883000

ユニバーサルCMFツイストドリル(滅菌)

## 2.0mm セルフタッピングスクリュー



未滅菌	滅菌	規格
52-20404 <sup>1)</sup>	21-20404 <sup>2)</sup>	2.0×4mm
52-20405 <sup>1)</sup>	21-20405 <sup>2)</sup>	2.0×5mm
52-20406 <sup>1)</sup>	21-20406 <sup>2)</sup>	2.0×6mm
52-20407 <sup>1)</sup>		2.0×7mm
52-20408 <sup>1)</sup>	21-20408 <sup>2)</sup>	2.0×8mm
52-20410 <sup>1)</sup>	21-20410 <sup>2)</sup>	2.0×10mm
52-20412 <sup>1)</sup>	21-20412 <sup>2)</sup>	2.0×12mm
52-20414 <sup>1)</sup>	21-20414 <sup>2)</sup>	2.0×14mm
52-20416 <sup>1)</sup>	21-20416 <sup>2)</sup>	2.0×16mm
52-20418 <sup>1)</sup>		2.0×18mm
52-20420 <sup>1)</sup>		2.0×20mm

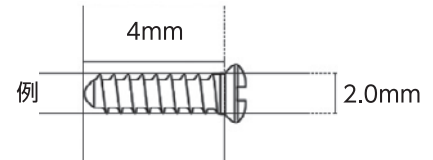

## 2.0mm ロッキングスクリュー



未滅菌	滅菌	規格
52-20504 <sup>1)</sup>	21-20504 <sup>2)</sup>	2.0×4mm
52-20505 <sup>1)</sup>	21-20505 <sup>2)</sup>	2.0×5mm
52-20506 <sup>1)</sup>	21-20506 <sup>2)</sup>	2.0×6mm
52-20507 <sup>1)</sup>	21-20507 <sup>2)</sup>	2.0×7mm
52-20508 <sup>1)</sup>	21-20508 <sup>2)</sup>	2.0×8mm
52-20510 <sup>1)</sup>	21-20510 <sup>2)</sup>	2.0×10mm
52-20512 <sup>1)</sup>	21-20512 <sup>2)</sup>	2.0×12mm
52-20514 <sup>1)</sup>	21-20514 <sup>2)</sup>	2.0×14mm
52-20516 <sup>1)</sup>	21-20516 <sup>2)</sup>	2.0×16mm
52-20518 <sup>1)</sup>		2.0×18mm
52-20520 <sup>1)</sup>		2.0×20mm

## ツイストドリル(滅菌)



91-16005<sup>3)</sup> 径1.6mm 長さ 50mm WL 5mmストップ 滅菌



91-16035<sup>3)</sup> 径1.6mm 長さ 115mm WR 35mm 滅菌




91-16535<sup>3)</sup> 径1.6mm 長さ 85mm WR 27mm 滅菌

2.3mm セルフタッピングスクリュー(エマーゼンシー)



未滅菌	滅菌	規格
52-23404 <sup>1)</sup>	21-23404 <sup>2)</sup>	2.3×4mm
52-23406 <sup>1)</sup>	21-23406 <sup>2)</sup>	2.3×6mm
52-23408 <sup>1)</sup>	21-23408 <sup>2)</sup>	2.3×8mm
52-23410 <sup>1)</sup>	21-23410 <sup>2)</sup>	2.3×10mm
52-23412 <sup>1)</sup>	21-23412 <sup>2)</sup>	2.3×12mm
52-23414 <sup>1)</sup>	21-23414 <sup>2)</sup>	2.3×14mm
52-23416 <sup>1)</sup>	21-23416 <sup>2)</sup>	2.3×16mm
52-23418 <sup>1)</sup>	21-23418 <sup>2)</sup>	2.3×18mm
52-23420 <sup>1)</sup>	21-23420 <sup>2)</sup>	2.3×20mm

医療機器承認番号	販売名
1)21600BZY00128000	ユニバーサルチタンボンスクリュー
2)21700BZY00632000	ユニバーサルチタンボンスクリュー(滅菌)
3)21600BZY00185000	ユニバーサルCMF顎矯正モジュール
4)21800BZY10090000	ユニバーサルCMF顎矯正モジュール(滅菌)

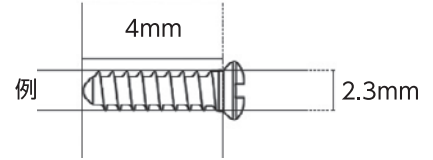

サジタルスプリットプレート 1.0mm厚



6穴 6mm カーブ  
未滅菌 滅菌  
55-10554<sup>3)</sup> 11-10554<sup>4)</sup>



6穴 12mm カーブ  
未滅菌 滅菌  
55-10556<sup>3)</sup> 11-10556<sup>4)</sup>



4穴 6mm ストレート  
未滅菌 滅菌  
55-10564<sup>3)</sup> 11-10564<sup>4)</sup>



4穴 12mm ストレート  
未滅菌 滅菌  
55-10566<sup>3)</sup> 11-10566<sup>4)</sup>

## 1.7/2.0mm オートグナティック 器械セット



U-CMF 矯正器械用トレイ  
**29-13040**



セルフリテイニングプレート鑷子  
アングル型  
**01-08115**



U-CMF プレートベンダーカッター  
アッパーミッドフェイス用 右  
**62-12175**

U-CMF プレートベンダー  
アッパーミッドフェイス用 左  
**62-12176**



U-CMF スクリュードライバーブレード  
1.2/1.7mm クロスピン型  
**62-12170**



U-CMF スクリュードライバーブレード  
2.0/2.3/2.7mm  
**62-20130**



U-CMF ドライバーハンドル(メタル)  
**62-20285**



U-CMF スクリュードライバーラチェットハンドル  
**62-20290**



U-CMF スクリュードライバーリボルビンググリッド  
**62-20295**



U-CMF ドリルガイド正円  
2.0mm  
**62-00201**



U-CMF トロッカーハンドル  
**62-00301**



チークトラクター  
62-00301保持用  
**62-00302**



U-CMF トロッカー  
**62-00303**




デプスゲージ  
**01-08730**



U-CMF 滅菌コンテナ  
**29-13015**



U-CMF 滅菌コンテナ  
上フタ  
**29-13016**

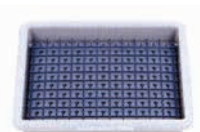

U-CMF アクセサリートレイ  
**29-13022**

# 下顎骨再建

ユニバーサル リコンストラクション モジュール



## インプラントトレイ

29-13060 U-CMF 再建モジュール


## ボーンスクリュー、クロスピン

医療機器承認番号	販売名
1)21600BZY00128000	ユニバーサルチタンボーンスクリュー
2)21700BZY00632000	ユニバーサルチタンボーンスクリュー(滅菌)
3)22100BZX00883000	ユニバーサルCMFツイストドリル(滅菌)

### 2.0mm セルフタッピングスクリュー



未滅菌	滅菌	規格
52-20404 <sup>1)</sup>	21-20404 <sup>2)</sup>	2.0×4mm
52-20405 <sup>1)</sup>	21-20405 <sup>2)</sup>	2.0×5mm
52-20406 <sup>1)</sup>	21-20406 <sup>2)</sup>	2.0×6mm
52-20407 <sup>1)</sup>		2.0×7mm
52-20408 <sup>1)</sup>	21-20408 <sup>2)</sup>	2.0×8mm
52-20410 <sup>1)</sup>	21-20410 <sup>2)</sup>	2.0×10mm
52-20412 <sup>1)</sup>	21-20412 <sup>2)</sup>	2.0×12mm
52-20414 <sup>1)</sup>	21-20414 <sup>2)</sup>	2.0×14mm
52-20416 <sup>1)</sup>	21-20416 <sup>2)</sup>	2.0×16mm
52-20418 <sup>1)</sup>		2.0×18mm
52-20420 <sup>1)</sup>		2.0×20mm

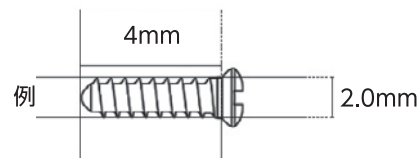

### 2.0mm ロッキングスクリュー



未滅菌	滅菌	規格
52-20504 <sup>1)</sup>	21-20504 <sup>2)</sup>	2.0×4mm
52-20505 <sup>1)</sup>	21-20505 <sup>2)</sup>	2.0×5mm
52-20506 <sup>1)</sup>	21-20506 <sup>2)</sup>	2.0×6mm
52-20507 <sup>1)</sup>	21-20507 <sup>2)</sup>	2.0×7mm
52-20508 <sup>1)</sup>	21-20508 <sup>2)</sup>	2.0×8mm
52-20510 <sup>1)</sup>	21-20510 <sup>2)</sup>	2.0×10mm
52-20512 <sup>1)</sup>	21-20512 <sup>2)</sup>	2.0×12mm
52-20514 <sup>1)</sup>	21-20514 <sup>2)</sup>	2.0×14mm
52-20516 <sup>1)</sup>	21-20516 <sup>2)</sup>	2.0×16mm
52-20518 <sup>1)</sup>		2.0×18mm
52-20520 <sup>1)</sup>		2.0×20mm


## ツイストドリル(滅菌)



91-16035<sup>3)</sup> 径 1.6mm 長さ 115mm WR 35mm 滅菌



91-16535<sup>3)</sup> 径 1.6mm 長さ 85mm WR 27mm 滅菌

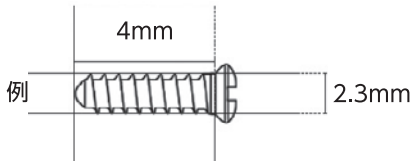

医療機器承認番号	販売名
1)21600BZY00128000	ユニバーサルチタンボンスクリュー
2)21700BZY00632000	ユニバーサルチタンボンスクリュー(滅菌)
3)22100BZX00883000	ユニバーサルCMFツイストドリル(滅菌)

2.3mm セルフタッピングスクリュー



未滅菌	滅菌	規格
52-23404 <sup>1)</sup>	21-23404 <sup>2)</sup>	2.3×4mm
52-23406 <sup>1)</sup>	21-23406 <sup>2)</sup>	2.3×6mm
52-23408 <sup>1)</sup>	21-23408 <sup>2)</sup>	2.3×8mm
52-23410 <sup>1)</sup>	21-23410 <sup>2)</sup>	2.3×10mm
52-23412 <sup>1)</sup>	21-23412 <sup>2)</sup>	2.3×12mm
52-23414 <sup>1)</sup>	21-23414 <sup>2)</sup>	2.3×14mm
52-23416 <sup>1)</sup>	21-23416 <sup>2)</sup>	2.3×16mm
52-23418 <sup>1)</sup>	21-23418 <sup>2)</sup>	2.3×18mm
52-23420 <sup>1)</sup>	21-23420 <sup>2)</sup>	2.3×20mm

2.3mm ロッキングスクリュー



未滅菌	滅菌	規格
52-23504 <sup>1)</sup>		2.3×4mm
52-23506 <sup>1)</sup>		2.3×6mm
52-23508 <sup>1)</sup>	21-23508 <sup>2)</sup>	2.3×8mm
52-23510 <sup>1)</sup>	21-23510 <sup>2)</sup>	2.3×10mm
52-23512 <sup>1)</sup>	21-23512 <sup>2)</sup>	2.3×12mm
52-23514 <sup>1)</sup>	21-23514 <sup>2)</sup>	2.3×14mm
52-23516 <sup>1)</sup>	21-23516 <sup>2)</sup>	2.3×16mm
52-23518 <sup>1)</sup>	21-23518 <sup>2)</sup>	2.3×18mm
52-23520 <sup>1)</sup>		2.3×20mm

ツイストドリル(滅菌)



91-19035<sup>3)</sup> 径 1.9mm 長さ 115mm WR 35mm 滅菌



91-19535<sup>3)</sup> 径 1.9mm 長さ 85mm WR 27mm 滅菌

2.7mm セルフタッピングスクリュー



未滅菌	滅菌	規格
52-27408 <sup>1)</sup>		2.7×8mm
52-27410 <sup>1)</sup>	21-27410 <sup>2)</sup>	2.7×10mm
52-27412 <sup>1)</sup>	21-27412 <sup>2)</sup>	2.7×12mm
52-27414 <sup>1)</sup>	21-27414 <sup>2)</sup>	2.7×14mm
52-27416 <sup>1)</sup>		2.7×16mm
52-27418 <sup>1)</sup>		2.7×18mm
52-27420 <sup>1)</sup>		2.7×20mm

2.7mm ロッキングスクリュー



未滅菌	滅菌	規格
52-27508 <sup>1)</sup>		2.7×8mm
52-27510 <sup>1)</sup>	21-27510 <sup>2)</sup>	2.7×10mm
52-27512 <sup>1)</sup>	21-27512 <sup>2)</sup>	2.7×12mm
52-27514 <sup>1)</sup>	21-27514 <sup>2)</sup>	2.7×14mm
52-27516 <sup>1)</sup>		2.7×16mm
52-27518 <sup>1)</sup>		2.7×18mm
52-27520 <sup>1)</sup>		2.7×20mm

## プライマリーリコンプレート 1.5mm厚

医療機器承認番号	販売名
1)21600BZY00079000	ユニバーサルCMF下顎骨再建モジュール
2)21800BZY10088000	ユニバーサルCMF下顎骨再建モジュール(滅菌)




11穴 テンプレート付

未滅菌	滅菌
<b>55-15911<sup>1)</sup></b>	<b>11-15911<sup>2)</sup></b>

17穴 テンプレート付

未滅菌	滅菌
<b>55-15917<sup>1)</sup></b>	<b>11-15917<sup>2)</sup></b>

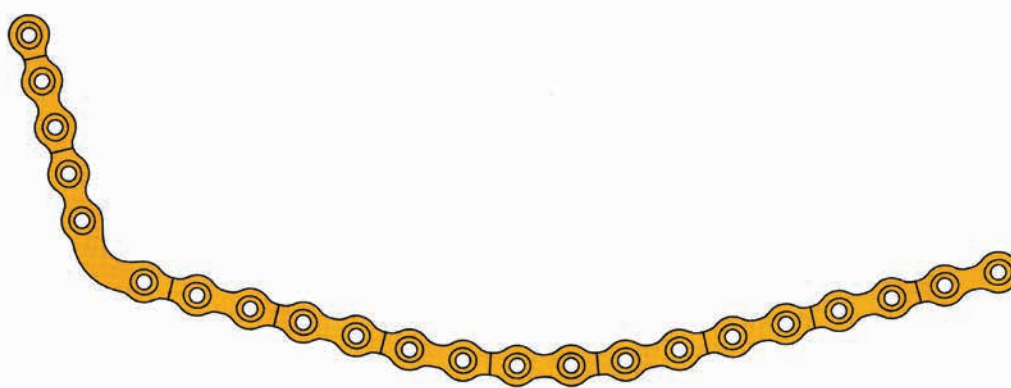

右 5+17穴 テンプレート付

未滅菌	滅菌
<b>55-15920<sup>1)</sup></b>	<b>11-15920<sup>2)</sup></b>

左 5+17穴 テンプレート付

未滅菌	滅菌
<b>55-15922<sup>1)</sup></b>	<b>11-15922<sup>2)</sup></b>

## 再建プレート 2.8mm厚

医療機器承認番号	販売名
1)21600BZY00079000	ユニバーサルCMF下顎骨再建モジュール
2)21800BZY10088000	ユニバーサルCMF下顎骨再建モジュール(滅菌)



11穴 テンプレート付

未滅菌

滅菌

**55-28911<sup>1)</sup>**

**11-28911<sup>2)</sup>**


17穴 テンプレート付

未滅菌

滅菌

**55-28917<sup>1)</sup>**

**11-28917<sup>2)</sup>**

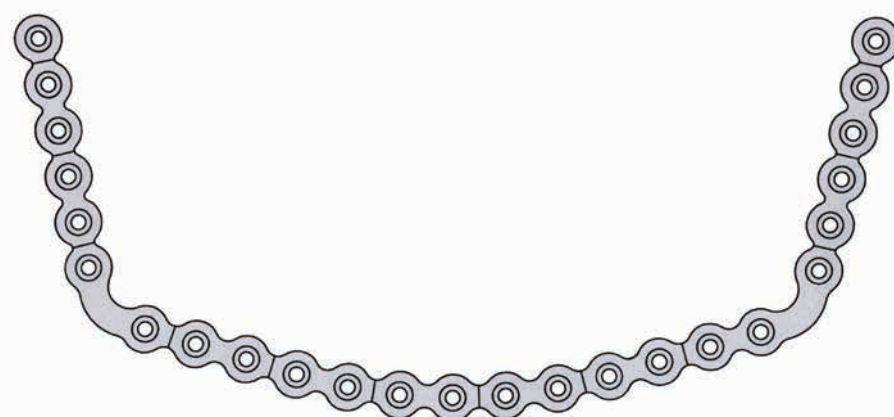

全顎 6+17+6穴 テンプレート付

未滅菌

**55-28930<sup>1)</sup>**

全顎 6+15+6穴 テンプレート付

未滅菌

滅菌

**55-28932<sup>1)</sup>**

**11-28932<sup>2)</sup>**

全顎 6+13+6穴 テンプレート付

未滅菌


滅菌

**55-28934<sup>1)</sup>**

**11-28934<sup>2)</sup>**



医療機器承認番号	販売名
1)21600BZY00079000	ユニバーサルCMF下顎骨再建モジュール
2)21800BZY10088000	ユニバーサルCMF下顎骨再建モジュール(滅菌)

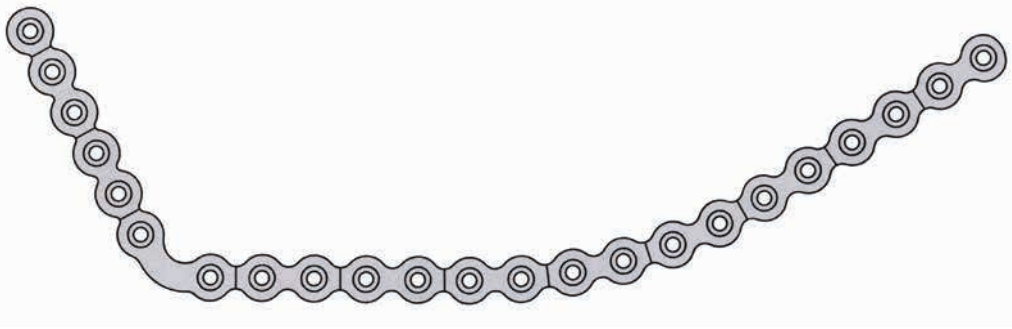

右 6+17穴 テンプレート付

未滅菌      滅菌

**55-28920<sup>1)</sup>**    **11-28920<sup>2)</sup>**

左 6+17穴 テンプレート付


未滅菌      滅菌

**55-28922<sup>1)</sup>**    **11-28922<sup>2)</sup>**

## 2.0/2.3mm リコンストラクション 器械セット



U-CMF 顎骨器具トレイ  
**29-13020**

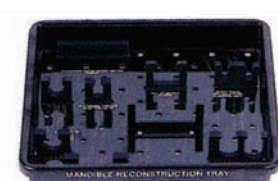

U-CMF 顎再建トレイ  
**29-13021**



U-CMF ベンダー・カッター  
左再建プレート用 右再建プレート用  
**64-00230**      **64-00231**



U-CMF ベンダー・カッター  
左                      右  
**64-00242**    **64-00243**



U-CMF ローラーベンダー  
**64-00250**



U-CMF プレート骨把持鉗子  
左                      右  
**64-00175**    **64-00176**



セルフリテイニングプレート 鑷子  
アングル型  
**01-08115**



U-CMF スクリュードライバーブレード  
2.0/2.3/2.7mm  
**62-20130**



U-CMF スクリュードライバーラチェットハンドル  
**62-20290**



U-CMF スクリュードライバーリボルビング  
リジッド  
**62-20295**



U-CMF ドリルガイド正円  
2.0mm  
**62-00201**



U-CMF ドリルガイド正円  
2.3mm  
**62-00238**



U-CMF トロッカーハンドル  
**62-00301**



チークレトラクター  
62-00301保持用  
**62-00302**



U-CMF トロッカー  
**62-00303**



デプスゲージ  
**01-08730**



術中再建用スクリューホルダー  
**60-80535**

# 中顔面・下顎骨折 / 顎矯正

ライビンガー MP ミニプレATINGモジュール



## インプラントトレイ

**29-20250** MPモジュールケース

**29-20251** MPモジュール 内部トレイ

## MP ミニプレート (未滅菌)

医療機器承認番号

22300BZX00342000

販売名

ユニバーサルCMF ミニプレート(MP)モジュール

プレート厚:1.0mm

### ミニプレート MP



4穴 レギュラー  
未滅菌  
**55-08204**



4穴 ミディアム  
未滅菌  
**55-08203**



4穴 ロング  
未滅菌  
**55-08205**



6穴 直  
未滅菌  
**55-08206**



4穴  
未滅菌  
**55-10563**




16穴 直  
未滅菌  
**55-08216**


### ミニプレートL型 MP




4穴 レギュラー  
未滅菌  
**55-08231** 左  
**55-08230** 右

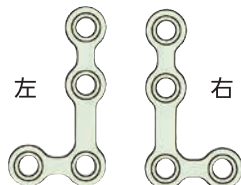

4穴 ミディアム  
未滅菌  
**55-08235** 左  
**55-08234** 右

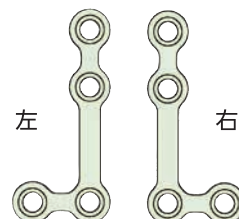


4穴 ロング  
未滅菌  
**55-08233** 左  
**55-08232** 右

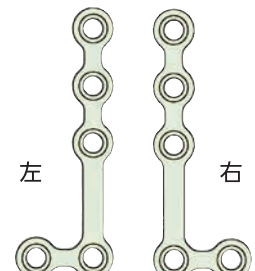

5穴 エキストラロング  
未滅菌  
**55-08237** 左  
**55-08236** 右

### ミニプレートT型 MP

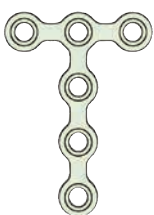

90° レギュラー  
未滅菌  
**55-08240**

### ミニプレートY型 MP



5穴 レギュラー  
未滅菌  
**55-08250**



5穴 ロング  
未滅菌  
**55-08251**

### ミニプレートWY型 MP



6穴 レギュラー  
未滅菌  
**55-08260**




6穴 ロング  
未滅菌  
**55-08262**

プレート厚:0.6mm

医療機器承認番号 22300BZX00342000  
販売名 ユニバーサルCMF ミニプレート(MP)モジュール


3Dミニプレート MP

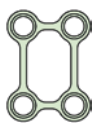

0.6mm厚  
2×2長方形  
未滅菌  
**55-06312**



0.6mm厚  
2×2正方形  
未滅菌  
**55-06310**

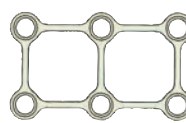

0.6mm厚  
3×2正方形  
未滅菌  
**55-06320**


プレート厚:0.75mm

ミニプレート MP




0.75mm厚 30穴  
未滅菌  
**55-08510**

ミニプレートL型 MP

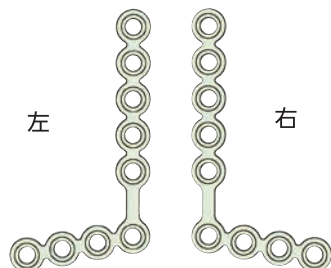

0.75mm厚 9穴  
未滅菌  
**55-08521** 左  
**55-08520** 右

ミニプレートT型 MP

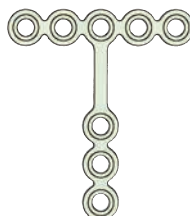

0.75mm厚 8穴  
未滅菌  
**55-08542**

ミニプレートY型 MP



0.75mm厚 8穴  
未滅菌  
**55-08579**

ミニプレート MP



0.75mm厚 カーブ 12穴  
未滅菌  
**55-08586**

## プレート厚:0.6mm

医療機器承認番号

販売名

1)22300BZX00342000

ユニバーサルCMF ミニプレート(MP)モジュール

2)22100BZX00828000

ユニバーサルCMF スライディングプレート

### チンプレート MP



4mm

未滅菌

**55-09104<sup>1)</sup>**



6mm

未滅菌

**55-09106<sup>1)</sup>**



8mm

未滅菌

**55-09108<sup>1)</sup>**



10mm

未滅菌

**55-09110<sup>1)</sup>**

## U-CMF スライディングプレート (未滅菌)

### プレート厚:1.0mm



ストレートタイプ ショート

未滅菌

**55-10590<sup>2)</sup>**



ストレートタイプ ロング

未滅菌

**55-10591<sup>2)</sup>**

## ボーンスクリュー、クロスピン

医療機器承認番号

販売名


22300BZX00342000

ユニバーサル CMF ミニプレート(MP)モジュール

## 2.0mm クロスピン MP



未滅菌	規格
<b>50-20704E</b>	2.0×4mm
<b>50-20705E</b>	2.0×5mm
<b>50-20706E</b>	2.0×6mm
<b>50-20708E</b>	2.0×8mm
<b>50-20710E</b>	2.0×10mm
<b>50-20712E</b>	2.0×12mm
<b>50-20714E</b>	2.0×14mm
<b>50-20716E</b>	2.0×16mm
<b>50-20718E</b>	2.0×18mm
<b>50-20720E</b>	2.0×20mm

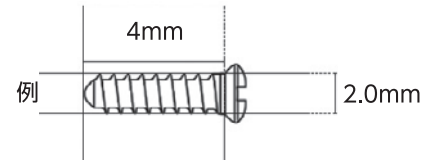

## 2.0mm セルフドリリング MP



未滅菌	規格
<b>50-20904E</b>	2.0×4mm
<b>50-20905E</b>	2.0×5mm
<b>50-20906E</b>	2.0×6mm

## 2.3mm クロスピン エマージェンシー MP



未滅菌	規格
<b>50-23706E</b>	2.3×6mm
<b>50-23708E</b>	2.3×8mm
<b>50-23710E</b>	2.3×10mm
<b>50-23712E</b>	2.3×12mm
<b>50-23714E</b>	2.3×14mm
<b>50-23716E</b>	2.3×16mm

## ツイストドリル(滅菌)

医療機器承認番号 販売名  
 1)22100BZX00883000 ユニバーサル CMF ツイストドリル(滅菌)

91-15105<sup>1)</sup>



径 1.5mm 長さ 50mm WR5mm

滅菌

91-15008<sup>1)</sup>



径 1.5mm 長さ 50mm WR8mm

滅菌

91-15020<sup>1)</sup>



径 1.5mm 長さ 58mm WR20mm

滅菌

91-15920<sup>1)</sup>



径 1.5mm 長さ 107mm WR20mm

滅菌

## 器械・アクセサリ

- 29-13070 ユニバーサルMP 器具用 トレイ
- 01-08115 セルフリテイニングプレート 鑷子 アングル型
- 36-00726 プレートベンディングプライヤー
- 01-08070 アデラープライヤー
- 62-18335 ユニバーサル MP プレートカッター
- 62-20290 U-CMF スクリュードライバーラチェットハンドル
- 62-20295 U-CMF スクリュードライバーリボルビング リジッド
- 60-20140 ユニバーサル MP スクリュードライバーブレード
- 01-08502 01-08500 用 ハンドル
- 01-08506 01-08500 用 トロッカー
- 01-08508 01-08500 用 ドリルガイド
- 01-08504 01-08500 用 チークレトラクター
- 62-08732 ユニバーサル MP デプスゲージ
- 29-13015 U-CMF 滅菌コンテナ
- 29-13016 U-CMF 滅菌コンテナ 上フタ
- 29-13022 U-CMF アクセサリートレイ



# オプション器械

医療機器承認番号

販売名

1)22100BZX00485000

ライピンガー骨手術器具

## ライトアングルスクリュードライバー



### 本体

- 6514-7-200** ライトアングル スクリュードライバー (6514-7-205 1個含む)
- 6514-7-201** プレートホールディング フォーク
- 6514-7-202** エクスターナル ハンドル
- 6514-7-205** ターニング アタッチメント

### ツイストドリル(未滅菌)

- 60-14908<sup>1)</sup>** ツイストドリル ライトアングルスクリュードライバー用 径 1.4mm×18mm WL 8mm
- 60-15995<sup>1)</sup>** ツイストドリル ライトアングルスクリュードライバー用 径 1.5mm×16mm WL 5mm (MP)
- 60-16996<sup>1)</sup>** ツイストドリル ライトアングルスクリュードライバー用 径 1.6mm×17mm WL 6mm (マンディブル)

### ドライバーブレード

- 62-20139** ブレード ライトアングルスクリュードライバー用 2.0/2.3mm ユニバーサル用
- 62-12179** ブレード ライトアングルスクリュードライバー用 1.2/1.7mm
- 62-20149** ブレード ライトアングルスクリュードライバー用 2.0mm MPスクリー用

### 滅菌ケース

- 29-13090** インstrument トレイ
- 29-13091** インstrument トレイ 上フタ

### メンテナンス オイル

- 6514-7-103** メンテナンスオイルスプレー アダプタ付

# Index

## 索引

品番	品名	規格	ページ	品番	品名	規格	ページ				
<b>上顔面・眼窩底骨折</b>											
01-08110	U-CMF プレート 把持鑷子	アングル	10	54-03003	U-CMF オービダルフロア プレート	スモール 0.3MM	09				
10-03002	U-CMF オービダルフロア プレート	ミディアム 0.3MM 滅菌済	09	54-04000	U-CMF オービダル テンプレート	ラージ	09				
10-03003	U-CMF オービダルフロア プレート	スモール 0.3MM 滅菌済	09	55-06224	U-CMF プレート	24穴ストレート	08				
11-03001	U-CMF オービダルフロア プレート	ラージ 0.3MM 滅菌済	09	55-06233	U-CMF 3-Dプレート	6×2穴	08				
11-06224	U-CMF プレート	24穴ストレート 滅菌済	08	55-06240	U-CMF プレート	7穴WY型	08				
11-06233	U-CMF 3-Dプレート	6×2穴 滅菌済	08	55-06250	U-CMF プレート	10穴カーブ	08				
11-06240	U-CMF プレート	7穴 WY型 滅菌済	08	55-06254	U-CMF プレート	4穴カーブ	08				
11-06250	U-CMF プレート	10穴カーブ 滅菌済	08	55-06260	U-CMF プレート	8穴L型左	08				
11-06254	U-CMF プレート	4穴カーブ 滅菌済	08	55-06261	U-CMF プレート	8穴L型右	08				
11-06260	U-CMF プレート	8穴 L型 左 滅菌済	08	55-06270	U-CMF プレート	7穴 T型	08				
11-06261	U-CMF プレート	8穴 L型 右 滅菌済	08	62-12170	U-CMF スクリュードライバーブレード	1.2/1.7MM クロスピン型	10				
11-06270	U-CMF プレート	7穴 T型 滅菌済	08	62-12173	U-CMF アデラープライヤー	アッパーミッドフェイス用	10				
21-12003	U-CMFセルフタッピングスクリュークロスピン	径1.2MM 長さ3MM 滅菌済	07	62-12175	U-CMF プレートベンダーカッター	アッパーミッドフェイス用 右	10				
21-12004	U-CMFセルフタッピングスクリュークロスピン	径1.2MM 長さ4MM 滅菌済	07	62-12176	U-CMF プレートベンダー	アッパーミッドフェイス用 左	10				
21-12005	U-CMFセルフタッピングスクリュークロスピン	径1.25MM 長さ5MM 滅菌済	07	62-18330	プレートカッター アッパー/ミッド/ニューロ用		10				
21-12006	U-CMFセルフタッピングスクリュークロスピン	径1.25MM 長さ6MM 滅菌済	07	62-20285	U-CMF ドライバーハンドル(メタル)		10				
21-12007	U-CMFセルフタッピングスクリュークロスピン	径1.25MM 長さ7MM 滅菌済	07	91-09504	ツイストドリル 滅菌済	径0.9MM 長さ46MM WR5MM	07				
21-12008	U-CMFセルフタッピングスクリュークロスピン	径1.25MM 長さ8MM 滅菌済	07	91-10506	ツイストドリル 滅菌済	径1.0MM 長さ50MM WR7MM	07				
21-12010	U-CMFセルフタッピングスクリュークロスピン	径1.25MM 長さ10MM 滅菌済	07	91-10512	ツイストドリル 滅菌済	径1.0MM 長さ54MM WR13MM	07				
21-12012	U-CMFセルフタッピングスクリュークロスピン	径1.25MM 長さ12MM 滅菌済	07	<b>中顔面骨折</b>							
21-12903	U-CMFセルフドリリングスクリュー	1.2MMクロスピン長さ3MM 滅菌済	07	01-08110	U-CMF プレート 把持鑷子	アングル	15				
21-12904	U-CMFセルフドリリングスクリュー	1.2MMクロスピン長さ4MM 滅菌済	07	11-05151	U-CMF プレート	5穴 Y型 8MM 滅菌済	13				
21-14005	エマーゼンシーアスクリュークロスピン	径1.4MM 長さ5MM 滅菌済	07	11-05164	U-CMF プレート	7穴WY型 滅菌済	13				
21-14007	エマーゼンシーアスクリュークロスピン	径1.4MM 長さ7MM 滅菌済	07	11-05716	U-CMF ロッキングプレート	16穴ストレート 滅菌済	14				
29-12000	U-CMF アッパーフェイスモジュールケース		06	11-05731	U-CMF 3-Dロッキングプレート	2×2穴 滅菌済	14				
29-12001	U-CMF アッパーフェイス内部トレイ		06	11-05742	U-CMF ロッキングプレート	7穴 WY型 滅菌済	14				
29-13015	U-CMF 滅菌コンテナ		10	11-05751	U-CMF ロッキングプレート	5穴Y型4MM 滅菌済	14				
29-13016	U-CMF 滅菌コンテナ	上フタ	10	11-05758	U-CMF ロッキングプレート	8穴カーブ 滅菌済	14				
29-13022	U-CMF アクセサリートレイ		10	11-05761	U-CMF ロッキングプレート	5穴L型2MM 滅菌済	14				
29-13030	U-CMF アッパーミッドフェイス器械トレイ		10	11-05763	U-CMF ロッキングプレート	5穴L型5MM 滅菌済	14				
51-12003	U-CMFセルフタッピングスクリュー	1.2MMクロスピン長さ3MM	07	11-05765	U-CMF ロッキングプレート	6穴L型8MM 滅菌済	14				
51-12004	U-CMFセルフタッピングスクリュー	1.2MMクロスピン長さ4MM	07	11-05767	U-CMF ロッキングプレート	6穴L型12MM 滅菌済	14				
51-12005	U-CMFセルフタッピングスクリュー	1.25MMクロスピン長さ5MM	07	11-06704	U-CMF プレート	4穴ストレート 滅菌済	13				
51-12006	U-CMFセルフタッピングスクリュー	1.25MMクロスピン長さ6MM	07	11-06724	U-CMF プレート	24穴ストレート 滅菌済	13				
51-12007	U-CMFセルフタッピングスクリュー	1.25MMクロスピン長さ7MM	07	11-06750	U-CMF プレート	10穴カーブ 滅菌済	13				
51-12008	U-CMFセルフタッピングスクリュー	1.25MMクロスピン長さ8MM	07	11-06754	U-CMF プレート	4穴カーブ パー付 滅菌済	13				
51-12010	U-CMFセルフタッピングスクリュー	1.25MMクロスピン長さ10MM	07	11-06760	U-CMF プレート	5穴L型左2MM 100° 滅菌済	13				
51-12012	U-CMFセルフタッピングスクリュー	1.25MMクロスピン長さ12MM	07	11-06761	U-CMF プレート	5穴L型右2MM 100° 滅菌済	13				
51-12903	U-CMFセルフドリリングスクリュー	1.2MMクロスピン長さ3MM	07	11-06762	U-CMF プレート	5穴L型左5MM 100° 滅菌済	13				
51-12904	U-CMFセルフドリリングスクリュー	1.2MMクロスピン長さ4MM	07	11-06763	U-CMF プレート	5穴L型右5MM 100° 滅菌済	13				
51-14003	エマーゼンシーアスクリュー	1.4MMクロスピン長さ3MM	07	11-06764	U-CMF プレート	6穴L型左8MM 100° 滅菌済	13				
51-14005	エマーゼンシーアスクリュー	1.4MMクロスピン長さ5MM	07	11-06765	U-CMF プレート	6穴L型右8MM 100° 滅菌済	13				
51-14007	エマーゼンシーアスクリュー	1.4MMクロスピン長さ7MM	07	11-06766	U-CMF プレート	6穴L型左12MM 100° 滅菌済	13				
51-14009	エマーゼンシーアスクリュー	1.4MMクロスピン長さ9MM	07	11-06767	U-CMF プレート	6穴L型右12MM 100° 滅菌済	13				
54-00260	チタンマイクロメッシュ 120×120M	厚さ0.1MM 未滅菌	09	11-06771	U-CMF プレート	5穴 T型 滅菌済	13				
54-00262	チタンマイクロメッシュ 60×60M	厚さ0.1MM 未滅菌	09	21-17003	U-CMF セルフタッピングスクリュークロスピン	径1.7MM 長さ3MM 滅菌済	12				
54-00270	チタンマイクロメッシュ 120×120M	厚さ0.2MM 未滅菌	09	21-17004	U-CMF セルフタッピングスクリュークロスピン	径1.7MM 長さ4MM 滅菌済	12				
54-00272	チタンマイクロメッシュ 60×60M	厚さ0.2MM 未滅菌	09	21-17005	U-CMF セルフタッピングスクリュークロスピン	径1.7MM 長さ5MM 滅菌済	12				
54-03000	U-CMF オービダル テンプレート	スモール/ミディアム	09	21-17006	U-CMF セルフタッピングスクリュークロスピン	径1.7MM 長さ6MM 滅菌済	12				
54-03001	U-CMF オービダルフロア プレート	ラージ 0.3MM	09	21-17008	U-CMF セルフタッピングスクリュークロスピン	径1.7MM 長さ8MM 滅菌済	12				
54-03002	U-CMF オービダルフロア プレート	ミディアム 0.3MM	09	21-17504	U-CMF ロッキングスクリュー クロスピン	径1.7MM 長さ4MM 滅菌済	12				



品番	品名	規格	ページ	品番	品名	規格	ページ
52-20407	U-CMF ボーンスクリュー クロスピン	径2.0MM 長さ7MM	17	<b>顎矯正</b>			
52-20408	U-CMF ボーンスクリュー クロスピン	径2.0MM 長さ8MM	17	01-08115	セルフリテイニングプレート 鑷子	アングル型	27
52-20410	U-CMF ボーンスクリュー クロスピン	径2.0MM 長さ10MM	17	01-08730	デブスゲージ		27
52-20412	U-CMF ボーンスクリュー クロスピン	径2.0MM 長さ12MM	17	11-05761	U-CMF ロッキングプレート	5穴L型2MM 滅菌済	23
52-20414	U-CMF ボーンスクリュー クロスピン	径2.0MM 長さ14MM	17	11-05763	U-CMF ロッキングプレート	5穴L型5MM 滅菌済	23
52-20416	U-CMF ボーンスクリュー クロスピン	径2.0MM 長さ16MM	17	11-05765	U-CMF ロッキングプレート	6穴L型8MM 滅菌済	23
52-20418	U-CMF ボーンスクリュー クロスピン	径2.0MM 長さ18MM	17	11-05767	U-CMF ロッキングプレート	6穴L型12MM 滅菌済	23
52-20420	U-CMF ボーンスクリュー クロスピン	径2.0MM 長さ20MM	17	11-06760	U-CMF プレート	5穴L型左2MM 100° 滅菌済	23
52-20504	U-CMF ロッキングスクリュー クロスピン	径2.0MM 長さ4MM	17	11-06761	U-CMF プレート	5穴L型右2MM 100° 滅菌済	23
52-20505	U-CMF ロッキングスクリュー クロスピン	径2.0MM 長さ5MM	17	11-06762	U-CMF プレート	5穴L型左5MM 100° 滅菌済	23
52-20506	U-CMF ロッキングスクリュー クロスピン	径2.0MM 長さ6MM	17	11-06763	U-CMF プレート	5穴L型右5MM 100° 滅菌済	23
52-20507	U-CMF ロッキングスクリュー クロスピン	径2.0MM 長さ7MM	17	11-06764	U-CMF プレート	6穴L型左8MM 100° 滅菌済	23
52-20508	U-CMF ロッキングスクリュー クロスピン	径2.0MM 長さ8MM	17	11-06765	U-CMF プレート	6穴L型右8MM 100° 滅菌済	23
52-20510	U-CMF ロッキングスクリュー クロスピン	径2.0MM 長さ10MM	17	11-06766	U-CMF プレート	6穴L型左12MM 100° 滅菌済	23
52-20512	U-CMF ロッキングスクリュー クロスピン	径2.0MM 長さ12MM	17	11-06767	U-CMF プレート	6穴L型右12MM 100° 滅菌済	23
52-20514	U-CMF ロッキングスクリュー クロスピン	径2.0MM 長さ14MM	17	11-10554	U-CMF ロッキングサジタルプレート	6穴 バー長6MM カーブ 滅菌済	26
52-20516	U-CMF ロッキングスクリュー クロスピン	径2.0MM 長さ16MM	17	11-10556	U-CMF ロッキングサジタルプレート	6穴 バー長12MM カーブ 滅菌済	26
52-20518	U-CMF ロッキングスクリュー クロスピン	径2.0MM 長さ18MM	17	11-10564	U-CMF ロッキングサジタルプレート	4穴 バー長6MM ストレート 滅菌済	26
52-20520	U-CMF ロッキングスクリュー クロスピン	径2.0MM 長さ20MM	17	11-10566	U-CMF ロッキングサジタルプレート	6穴 バー長12MM ストレート 滅菌済	26
52-23404	U-CMF ボーンスクリュー クロスピン	径2.3MM 長さ4MM	18	11-10704	U-CMF チンプルート	6穴 4MM 滅菌済	24
52-23406	U-CMF ボーンスクリュー クロスピン	径2.3MM 長さ6MM	18	11-10706	U-CMF チンプルート	6穴 6MM 滅菌済	24
52-23408	U-CMF ボーンスクリュー クロスピン	径2.3MM 長さ8MM	18	11-10708	U-CMF チンプルート	6穴 8MM 滅菌済	24
52-23410	U-CMF ボーンスクリュー クロスピン	径2.3MM 長さ10MM	18	11-10710	U-CMF チンプルート	6穴 10MM 滅菌済	24
52-23412	U-CMF ボーンスクリュー クロスピン	径2.3MM 長さ12MM	18	11-10712	U-CMF チンプルート	6穴 12MM 滅菌済	24
52-23414	U-CMF ボーンスクリュー クロスピン	径2.3MM 長さ14MM	18	11-11700	U-CMF ルフォー I プレート	11穴 0MM 左 滅菌済	24
52-23416	U-CMF ボーンスクリュー クロスピン	径2.3MM 長さ16MM	18	11-11703	U-CMF ルフォー I プレート	11穴 3MM 左 滅菌済	24
52-23418	U-CMF ボーンスクリュー クロスピン	径2.3MM 長さ18MM	18	11-11704	U-CMF ルフォー I プレート	11穴 4MM 左 滅菌済	24
52-23420	U-CMF ボーンスクリュー クロスピン	径2.3MM 長さ20MM	18	11-11706	U-CMF ルフォー I プレート	11穴 6MM 左 滅菌済	24
55-10503	U-CMF プレート	4穴直 ロング	19	11-12700	U-CMF ルフォー I プレート	11穴 0MM 右 滅菌済	24
55-10504	U-CMF ミニプレート	4穴	19	11-12703	U-CMF ルフォー I プレート	11穴 3MM 右 滅菌済	24
55-10505	U-CMF ミニプレート	4穴 バー付	19	11-12704	U-CMF ルフォー I プレート	11穴 4MM 右 滅菌済	24
55-10506	U-CMF ミニプレート	6穴	19	11-12706	U-CMF ルフォー I プレート	11穴 6MM 右 滅菌済	24
55-10507	U-CMF プレート	6穴直 ロング	19	21-17003	U-CMF セルフタッピングスクリュー クロスピン	径1.7MM 長さ3MM 滅菌済	23
55-10515	U-CMF プレート	16穴ロッキング 直	19	21-17004	U-CMF セルフタッピングスクリュー クロスピン	径1.7MM 長さ4MM 滅菌済	23
55-10516	U-CMF ミニプレート	16穴	19	21-17005	U-CMF セルフタッピングスクリュー クロスピン	径1.7MM 長さ5MM 滅菌済	23
55-10542	U-CMF 3Dプレート	4×2穴 正方形	19	21-17006	U-CMF セルフタッピングスクリュー クロスピン	径1.7MM 長さ6MM 滅菌済	23
55-10562	U-CMF 3Dプレート	6×2穴 正方形カーブ	19	21-17008	U-CMF セルフタッピングスクリュー クロスピン	径1.7MM 長さ8MM 滅菌済	23
55-10569	ミニプレート T型	9穴	19	21-17504	U-CMF ロッキングスクリュー クロスピン	径1.7MM 長さ4MM 滅菌済	23
55-15504	U-CMF フラクチャープレート	4穴	20	21-17505	U-CMF ロッキングスクリュー クロスピン	径1.7MM 長さ5MM 滅菌済	23
55-15505	U-CMF フラクチャープレート	4穴 バー付	20	21-17506	U-CMF ロッキングスクリュー クロスピン	径1.7MM 長さ6MM 滅菌済	23
55-15506	U-CMF フラクチャープレート	6穴	20	21-17903	U-CMF セルフドリリングスクリュー クロスピン	径1.7MM 長さ3MM 滅菌済	23
55-15507	U-CMF フラクチャープレート	6穴 バー付	20	21-17904	U-CMF セルフドリリングスクリュー クロスピン	径1.7MM 長さ4MM 滅菌済	23
55-15514	U-CMF フラクチャープレート	14穴	20	21-19005	U-CMF エマーゼンシーズスクリュー クロスピン	径1.9MM 長さ5MM 滅菌済	23
55-15536	U-CMF フラクチャープレート	6穴 140°	20	21-19007	U-CMF エマーゼンシーズスクリュー クロスピン	径1.9MM 長さ7MM 滅菌済	23
62-00201	U-CMF ドリルガイド正円	2.0MM	21	21-20404	U-CMF ボーンスクリュー クロスピン	径2.0MM 長さ4MM 滅菌済	25
62-00301	U-CMF トロッカーハンドル		21	21-20405	U-CMF ボーンスクリュー クロスピン	径2.0MM 長さ5MM 滅菌済	25
62-00302	チークレトラクター	62-00301保持用	21	21-20406	U-CMF ボーンスクリュー クロスピン	径2.0MM 長さ6MM 滅菌済	25
62-00303	U-CMF トロッカー		21	21-20408	U-CMF ボーンスクリュー クロスピン	径2.0MM 長さ8MM 滅菌済	25
62-20130	U-CMF スクリュードライバースプレード	2.0/2.3/2.7MM	21	21-20410	U-CMF ボーンスクリュー クロスピン	径2.0MM 長さ10MM 滅菌済	25
62-20290	U-CMF スクリュードライバースプレード	2.0/2.3/2.7MM	21	21-20412	U-CMF ボーンスクリュー クロスピン	径2.0MM 長さ12MM 滅菌済	25
62-20295	U-CMF スクリュードライバースプレード	2.0/2.3/2.7MM	21	21-20414	U-CMF ボーンスクリュー クロスピン	径2.0MM 長さ14MM 滅菌済	25
64-00242	U-CMF ベンダー・カッター	左	21	21-20416	U-CMF ボーンスクリュー クロスピン	径2.0MM 長さ16MM 滅菌済	25
64-00243	U-CMF ベンダー・カッター	右	21	21-20504	U-CMF ロッキングスクリュー クロスピン	径2.0MM 長さ4MM 滅菌済	25
91-16005	ツイストドリル 滅菌済	径1.6MM 長さ50MM WLSMMストップ	18	21-20505	U-CMF ロッキングスクリュー クロスピン	径2.0MM 長さ5MM 滅菌済	25
91-16007	ツイストドリル 滅菌済	径1.6MM 長さ50MM 7MMストップ	18	21-20506	U-CMF ロッキングスクリュー クロスピン	径2.0MM 長さ6MM 滅菌済	25
91-16035	ツイストドリル 滅菌済	径1.6MM 長さ115MM WR35MM	18	21-20507	U-CMF ロッキングスクリュー クロスピン	径2.0MM 長さ7MM 滅菌済	25
91-16535	ツイストドリル 滅菌済	径1.6MM 長さ85MM WR27MM	18	21-20508	U-CMF ロッキングスクリュー クロスピン	径2.0MM 長さ8MM 滅菌済	25
				21-20510	U-CMF ロッキングスクリュー クロスピン	径2.0MM 長さ10MM 滅菌済	25
				21-20512	U-CMF ロッキングスクリュー クロスピン	径2.0MM 長さ12MM 滅菌済	25

品番	品名	規格	ページ	品番	品名	規格	ページ
21-20514	U-CMF ロッキングスクリュー クロスピン	径2.0MM 長さ14MM 滅菌済	25	52-23406	U-CMF ボーンスクリュー クロスピン	径2.3MM 長さ6MM	26
21-20516	U-CMF ロッキングスクリュー クロスピン	径2.0MM 長さ16MM 滅菌済	25	52-23408	U-CMF ボーンスクリュー クロスピン	径2.3MM 長さ8MM	26
21-23404	U-CMF ボーンスクリュー クロスピン	径2.3MM 長さ4MM 滅菌済	26	52-23410	U-CMF ボーンスクリュー クロスピン	径2.3MM 長さ10MM	26
21-23406	U-CMF ボーンスクリュー クロスピン	径2.3MM 長さ6MM 滅菌済	26	52-23412	U-CMF ボーンスクリュー クロスピン	径2.3MM 長さ12MM	26
21-23408	U-CMF ボーンスクリュー クロスピン	径2.3MM 長さ8MM 滅菌済	26	52-23414	U-CMF ボーンスクリュー クロスピン	径2.3MM 長さ14MM	26
21-23410	U-CMF ボーンスクリュー クロスピン	径2.3MM 長さ10MM 滅菌済	26	52-23416	U-CMF ボーンスクリュー クロスピン	径2.3MM 長さ16MM	26
21-23412	U-CMF ボーンスクリュー クロスピン	径2.3MM 長さ12MM 滅菌済	26	52-23418	U-CMF ボーンスクリュー クロスピン	径2.3MM 長さ18MM	26
21-23414	U-CMF ボーンスクリュー クロスピン	径2.3MM 長さ14MM 滅菌済	26	52-23420	U-CMF ボーンスクリュー クロスピン	径2.3MM 長さ20MM	26
21-23416	U-CMF ボーンスクリュー クロスピン	径2.3MM 長さ16MM 滅菌済	26	55-05761	U-CMF ロッキングプレート	5穴L型2MM	23
21-23418	U-CMF ボーンスクリュー クロスピン	径2.3MM 長さ18MM 滅菌済	26	55-05763	U-CMF ロッキングプレート	5穴L型5MM	23
21-23420	U-CMF ボーンスクリュー クロスピン	径2.3MM 長さ20MM 滅菌済	26	55-05765	U-CMF ロッキングプレート	6穴L型8MM	23
29-13015	U-CMF 滅菌コンテナー		27	55-05767	U-CMF ロッキングプレート	6穴L型12MM	23
29-13016	U-CMF 滅菌コンテナー	上フタ	27	55-06760	U-CMF プレート	5穴左L型1MM 100°	23
29-13022	U-CMF アクセサリートレイ		27	55-06761	U-CMF プレート	5穴右L型2MM 100°	23
29-13040	U-CMF 矯正器械用トレイ		27	55-06762	U-CMF プレート	5穴左L型5MM 100°	23
29-17200	U-CMF 矯正モジュールケース		22	55-06763	U-CMF プレート	5穴右L型5MM 100°	23
29-17201	U-CMF 矯正モジュール内部トレイ		22	55-06764	U-CMF プレート	6穴左L型8MM 100°	23
29-17202	U-CMF 矯正モジュールプレバントトレイ		22	55-06765	U-CMF プレート	6穴右L型8MM 100°	23
51-17003	U-CMF セルフタッピングスクリュー クロスピン	径1.7MM 長さ3MM	23	55-06766	U-CMF プレート	6穴左L型12MM 100°	23
51-17004	U-CMF セルフタッピングスクリュー クロスピン	径1.7MM 長さ4MM	23	55-06767	U-CMF プレート	6穴右L型12MM 100°	23
51-17005	U-CMF セルフタッピングスクリュー クロスピン	径1.7MM 長さ5MM	23	55-10554	U-CMF ロッキングサジタルプレート	6穴 バー長6MM カーブ	26
51-17006	U-CMF セルフタッピングスクリュー クロスピン	径1.7MM 長さ6MM	23	55-10556	U-CMF ロッキングサジタルプレート	6穴バー長12MM カーブ	26
51-17007	U-CMF セルフタッピングスクリュー クロスピン	径1.7MM 長さ7MM	23	55-10564	U-CMF ロッキングサジタルプレート	4穴バー長6MM ストレート	26
51-17008	U-CMF セルフタッピングスクリュー クロスピン	径1.7MM 長さ8MM	23	55-10566	U-CMF ロッキングサジタルプレート	6穴バー長12MM ストレート	26
51-17010	U-CMF セルフタッピングスクリュー クロスピン	径1.7MM 長さ10MM	23	55-10704	U-CMF チンプルート	6穴 4MM	24
51-17012	U-CMF セルフタッピングスクリュー クロスピン	径1.7MM 長さ12MM	23	55-10706	U-CMF チンプルート	6穴 6MM	24
51-17504	U-CMF ロッキングスクリュー クロスピン	径1.7MM 長さ4MM	23	55-10708	U-CMF チンプルート	6穴 8MM	24
51-17505	U-CMF ロッキングスクリュー クロスピン	径1.7MM 長さ5MM	23	55-10710	U-CMF チンプルート	6穴 10MM	24
51-17506	U-CMF ロッキングスクリュー クロスピン	径1.7MM 長さ6MM	23	55-10712	U-CMF チンプルート	6穴 12MM	24
51-17903	U-CMF セルフドリリングスクリュー クロスピン	径1.7MM 長さ3MM	23	55-11700	U-CMF ルフォー I プレート	11穴 0MM 左	24
51-17904	U-CMF セルフドリリングスクリュー クロスピン	径1.7MM 長さ4MM	23	55-11703	U-CMF ルフォー I プレート	11穴 3MM 左	24
51-17905	U-CMF セルフドリリングスクリュー クロスピン	径1.7MM 長さ5MM	23	55-11704	U-CMF ルフォー I プレート	11穴 4MM 左	24
51-17906	U-CMF セルフドリリングスクリュー クロスピン	径1.7MM 長さ6MM	23	55-11706	U-CMF ルフォー I プレート	11穴 6MM 左	24
51-19005	U-CMF エマージェンシースクリュー クロスピン	径1.9MM 長さ5MM	23	55-11708	U-CMF ルフォー I プレート	11穴 8MM 左	24
51-19007	U-CMF エマージェンシースクリュー クロスピン	径1.9MM 長さ7MM	23	55-11710	U-CMF ルフォー I プレート	11穴 10MM 左	24
51-19009	U-CMF エマージェンシースクリュー クロスピン	径1.9MM 長さ9MM	23	55-12700	U-CMF ルフォー I プレート	11穴 0MM 右	24
52-20404	U-CMF ボーンスクリュー クロスピン	径2.0MM 長さ4MM	25	55-12703	U-CMF ルフォー I プレート	11穴 3MM 右	24
52-20405	U-CMF ボーンスクリュー クロスピン	径2.0MM 長さ5MM	25	55-12704	U-CMF ルフォー I プレート	11穴 4MM 右	24
52-20406	U-CMF ボーンスクリュー クロスピン	径2.0MM 長さ6MM	25	55-12706	U-CMF ルフォー I プレート	11穴 6MM 右	24
52-20407	U-CMF ボーンスクリュー クロスピン	径2.0MM 長さ7MM	25	55-12708	U-CMF ルフォー I プレート	11穴 8MM 右	24
52-20408	U-CMF ボーンスクリュー クロスピン	径2.0MM 長さ8MM	25	55-12710	U-CMF ルフォー I プレート	11穴 10MM 右	24
52-20410	U-CMF ボーンスクリュー クロスピン	径2.0MM 長さ10MM	25	62-00201	U-CMF ドリルガイド正円	2.0MM	27
52-20412	U-CMF ボーンスクリュー クロスピン	径2.0MM 長さ12MM	25	62-00301	U-CMF トロッカーハンドル		27
52-20414	U-CMF ボーンスクリュー クロスピン	径2.0MM 長さ14MM	25	62-00302	チークレトラクター	62-00301保持用	27
52-20416	U-CMF ボーンスクリュー クロスピン	径2.0MM 長さ16MM	25	62-00303	U-CMF トロッカー		27
52-20418	U-CMF ボーンスクリュー クロスピン	径2.0MM 長さ18MM	25	62-12170	U-CMF スクリュードライバーブレード	1.2/1.7MM クロスピン型	27
52-20420	U-CMF ボーンスクリュー クロスピン	径2.0MM 長さ20MM	25	62-12175	U-CMF プレートベンダーカッター	アッパーミッドフェイス用 右	27
52-20504	U-CMF ロッキングスクリュー クロスピン	径2.0MM 長さ4MM	25	62-12176	U-CMF プレートベンダー	アッパーミッドフェイス用 左	27
52-20505	U-CMF ロッキングスクリュー クロスピン	径2.0MM 長さ5MM	25	62-20130	U-CMF スクリュードライバーブレード	2.0/2.3/2.7MM	27
52-20506	U-CMF ロッキングスクリュー クロスピン	径2.0MM 長さ6MM	25	62-20285	U-CMF ドライバーハンドル(メタル)		27
52-20507	U-CMF ロッキングスクリュー クロスピン	径2.0MM 長さ7MM	25	62-20290	U-CMF スクリュードライバーラチェットハンドル		27
52-20508	U-CMF ロッキングスクリュー クロスピン	径2.0MM 長さ8MM	25	62-20295	U-CMF スクリュードライバーリボルビングリジッド		27
52-20510	U-CMF ロッキングスクリュー クロスピン	径2.0MM 長さ10MM	25	91-13505	ツイストドリル 滅菌済	径1.35MM 長さ50MM WL5MM	23
52-20512	U-CMF ロッキングスクリュー クロスピン	径2.0MM 長さ12MM	25	91-13506	ツイストドリル 滅菌済	径1.35MM 長さ50MM WR7MM	23
52-20514	U-CMF ロッキングスクリュー クロスピン	径2.0MM 長さ14MM	25	91-13512	ツイストドリル 滅菌済	径1.4MM 長さ54MM WR13MM	23
52-20516	U-CMF ロッキングスクリュー クロスピン	径2.0MM 長さ16MM	25	91-16005	ツイストドリル 滅菌済	径1.6MM 長さ50MM WL 5MMストップ	25
52-20518	U-CMF ロッキングスクリュー クロスピン	径2.0MM 長さ18MM	25	91-16035	ツイストドリル 滅菌済	径1.6MM 長さ115MM WR35MM	25
52-20520	U-CMF ロッキングスクリュー クロスピン	径2.0MM 長さ20MM	25	91-16535	ツイストドリル 滅菌済	径1.6MM 長さ85MM WR27MM	25
52-23404	U-CMF ボーンスクリュー クロスピン	径2.3MM 長さ4MM	26				



品番	品名	規格	ページ	品番	品名	規格	ページ
55-28934	U-CMF 再建プレート	全顎 6+13+6穴 テンプレート付	32	55-08203	ミニプレート MP	4穴 ミディアム	36
60-80142	研磨バー	ストライカーシャフト	34	55-08204	ミニプレート MP	4穴 レギュラー	36
60-80535	術中再建用スクリューホルダー		34	55-08205	ミニプレート MP	4穴 ロング	36
62-00201	U-CMF ドリルガイド正円	2.0MM	34	55-08206	ミニプレート MP	6穴 直	36
62-00238	U-CMF ドリルガイド正円	2.3MM	34	55-08216	ミニプレート MP	16穴 直	36
62-00301	U-CMF トロッカーハンドル		34	55-08230	ミニプレート L型 MP	4穴 レギュラー 右	36
62-00302	チークレトラクター	62-00301保持用	34	55-08231	ミニプレート L型 MP	4穴 レギュラー 左	36
62-00303	U-CMF トロッカー		34	55-08232	ミニプレート L型 MP	4穴 ロング 右	36
62-20130	U-CMF スクリュードライバーブレード 2.0/2.3/2.7MM		34	55-08233	ミニプレート L型 MP	4穴 ロング 左	36
62-20290	U-CMF スクリュードライバーラチェットハンドル		34	55-08234	ミニプレート L型 MP	4穴 ミディアム 右	36
62-20295	U-CMF スクリュードライバーリボルビングリジッド		34	55-08235	ミニプレート L型 MP	4穴 ミディアム 左	36
64-00175	U-CMF プレート骨把持鉗子	左	34	55-08236	ミニプレート L型 MP	4穴 エキストラロング 右	36
64-00176	U-CMF プレート骨把持鉗子	右	34	55-08237	ミニプレート L型 MP	4穴 エキストラロング 左	36
64-00230	U-CMFベンダー・カッター	左再建プレート用	34	55-08240	ミニプレート T型 MP	90°レギュラー	36
64-00231	U-CMFベンダー・カッター	右再建プレート用	34	55-08250	ミニプレート Y型 MP	5穴 レギュラー	36
64-00242	U-CMFベンダー・カッター	左	34	55-08251	ミニプレート Y型 MP	5穴 ロング	36
64-00243	U-CMFベンダー・カッター	右	34	55-08260	ミニプレート WY型 MP	6穴 レギュラー	36
64-00250	U-CMFローラーベンダー		34	55-08262	ミニプレート WY型 MP	6穴 ロング	36
91-16035	ツイストドリル 滅菌済	径1.6MM 長さ115MM WR35MM	29	55-08510	ミニプレート MP	0.75MM厚 30穴	37
91-16535	ツイストドリル 滅菌済	径1.6MM 長さ85MM WR27MM	29	55-08520	ミニプレート L型 MP	0.75MM厚 9穴 右	37
91-19035	ツイストドリル 滅菌済	径1.9MM 長さ115MM WR35MM	30	55-08521	ミニプレート L型 MP	0.75MM厚 9穴 左	37
91-19535	ツイストドリル 滅菌済	径1.9MM 長さ85MM WR27MM	30	55-08542	ミニプレート T型 MP	0.75MM厚 8穴	37
				55-08579	ミニプレート Y型 MP	0.75MM厚 8穴	37
				55-08586	ミニプレート MP	0.75MM厚 カーブ 12穴	37
<b>中顔面・下顎骨折/顎矯正</b>				55-09104	チンプレート MP	4MM	38
01-08070	アデラープライヤー		40	55-09106	チンプレート MP	6MM	38
01-08115	セルフリテイニングプレート 鑷子	アングル型	40	55-09108	チンプレート MP	8MM	38
01-08502	01-08500 用 ハンドル		40	55-09110	チンプレート MP	10MM	38
01-08504	01-08500 用 チークレトラクター		40	55-10563	ミニプレート MP	4穴	36
01-08506	01-08500 用 トロッカー		40	55-10590	U-CMF スライディングプレート	ストレートタイプ ショート	38
01-08508	01-08500 用 ドリルガイド		40	55-10591	U-CMF スライディングプレート	ストレートタイプ ロング	38
29-13015	U-CMF滅菌コンテナ		40	60-20140	ユニバーサルMP		40
29-13016	U-CMF滅菌コンテナ	上フタ	40	62-08732	ユニバーサルMP デブスゲージ		40
29-13022	U-CMFアクセサリートレイ		40	62-18335	ユニバーサルMP プレートカッター		40
29-13070	ユニバーサルMP 器具用 トレイ		40	62-20290	U-CMF スクリュードライバーラチェットハンドル		40
29-20250	MP モジュールケース		35	62-20295	U-CMF スクリュードライバーリボルビングリジッド		40
29-20251	MP モジュール 内部トレイ		35	91-15008	ツイストドリル 滅菌済	径1.5MM 長さ50MM WR8MM	40
36-00726	プレートベンディングプライヤー		40	91-15020	ツイストドリル 滅菌済	径1.5MM 長さ58MM WR20MM	40
50-20704E	ボーンスクリュークロスピン MP	2.0×4MM	39	91-15105	ツイストドリル 滅菌済	径1.5MM 長さ50MM WR5MM	40
50-20705E	ボーンスクリュークロスピン MP	2.0×5MM	39	91-15920	ツイストドリル 滅菌済	径1.6MM 長さ107MM WR20MM	40
50-20706E	ボーンスクリュークロスピン MP	2.0×6MM	39				
50-20708E	ボーンスクリュークロスピン MP	2.0×8MM	39	<b>オプション器械</b>			
50-20710E	ボーンスクリュークロスピン MP	2.0×10MM	39	29-13090	インストルメント トレイ	ライトアングルスクリュードライバー用	41
50-20712E	ボーンスクリュークロスピン MP	2.0×12MM	39	29-13091	インストルメント トレイ 上フタ	ライトアングルスクリュードライバー用	41
50-20714E	ボーンスクリュークロスピン MP	2.0×14MM	39	60-14908	ツイストドリル ライトアングルスクリュードライバー用	径1.4MM×18MM WL8MM	41
50-20716E	ボーンスクリュークロスピン MP	2.0×16MM	39	60-15995	ツイストドリル ライトアングルスクリュードライバー用	径1.5MM×19MM WL5MM	41
50-20718E	ボーンスクリュークロスピン MP	2.0×18MM	39	60-16996	ツイストドリル ライトアングルスクリュードライバー用	径1.6MM×17MM WL6MM	41
50-20720E	ボーンスクリュークロスピン MP	2.0×20MM	39	62-20139	ブレード ライトアングルスクリュードライバー用	2.0/2.3MM ユニバーサル用	41
50-20904E	ボーンスクリューセルフドリリング MP	2.0×4MM	39	62-12179	ブレード ライトアングルスクリュードライバー用	1.2/1.7MM	41
50-20905E	ボーンスクリューセルフドリリング MP	2.0×5MM	39	62-20149	ブレード ライトアングルスクリュードライバー用	2.0MM MP スクリュー用	41
50-20906E	ボーンスクリューセルフドリリング MP	2.0×6MM	39	6514-7-103	メンテナンスオイルスプレー アダプタ付	アングルスクリュードライバー用	41
50-23706E	ボーンスクリュークロスピン エマージェンシー MP	2.3×6MM	39	6514-7-200	ライトアングル スクリュードライバー		41
50-23708E	ボーンスクリュークロスピン エマージェンシー MP	2.3×8MM	39	6514-7-201	プレートホールディング フォーク		41
50-23710E	ボーンスクリュークロスピン エマージェンシー MP	2.3×10MM	39	6514-7-202	エクスターナル ハンドル		41
50-23712E	ボーンスクリュークロスピン エマージェンシー MP	2.3×12MM	39	6514-7-205	ターニング アタッチメント		41
50-23714E	ボーンスクリュークロスピン エマージェンシー MP	2.3×14MM	39				
50-23716E	ボーンスクリュークロスピン エマージェンシー MP	2.3×16MM	39				
55-06310	3Dミニプレート MP	0.6MM 厚 2×2正方形	37				
55-06312	3Dミニプレート MP	0.6MM 厚 2×2長方形	37				
55-06320	3Dミニプレート MP	0.6MM 厚 3×2正方形	37				

## Japan

この印刷物はstryker社の製品を掲載しています。全てのstryker社製品は、ご使用前にその添付文書・製品ラベル・取扱説明書をご参照ください。この印刷物に掲載されております仕様・形状は改良等の理由により、予告なしに変更されることがあります。stryker社製品についてご不明な点がございましたら、弊社までお問合せください。

Literature Number: LB1-86  
CS/IB 5m 12/16

Copyright © 2016 Stryker  
Printed in Japan

製造販売業者

**日本stryker株式会社**

112-0004 東京都文京区後楽2-6-1 飯田橋ファーストタワー  
P 03 6894 0000

[www.stryker.co.jp](http://www.stryker.co.jp)

医療従事者向けサイト: Stryker medical professional site  
[www.stryker.co.jp/mp2/](http://www.stryker.co.jp/mp2/)