

LIFEPAK® CR2-Schulungssystem

Datenblatt

Übung verbessert die Einsatzbereitschaft.

- Dynamisches und vielseitiges Schulungsgerät
- Gleicher intuitiver und einfacher Betrieb wie beim LIFEPAK CR2 Defibrillator
- Vollständig individuell anpassbare Szenarien
- Keine Fernbedienung notwendig
- ClearVoice™-Technologie



Das LIFEPAK CR2 AED-Schulungssystem (Trainer) bietet eine realistische Übungsmöglichkeit für die Verwendung des LIFEPAK CR2 Defibrillators ohne eine wirkliche Ladung und Entladung elektrischer Energie. Der LIFEPAK CR2 Trainer sieht genauso aus wie der LIFEPAK CR2 Defibrillator und simuliert dessen tatsächliche Funktionsweise unter Verwendung der gleichen einfachen Benutzeroberfläche. Voreingestellte Demos können für den vollautomatischen oder den halbautomatischen Modus programmiert werden, um eine schnelle Präsentation der wichtigsten Funktionen des LIFEPAK CR2 Defibrillators sowie der Vorteile der cprINSIGHT™-Analysetechnologie zu ermöglichen.

Wie das Original

Der LIFEPAK CR2 Trainer führt die Anwender durch eine simulierte Analyse, Energieabgabe und angeleitete HLW-Intervalle mit HLW-Coaching und sendet sogar automatisch E-Mail-Benachrichtigungen über W-LAN durch den LIFELINKcentral™ AED Program Manager, wenn das Gerät in Betrieb genommen und die Elektroden platziert wurden. Genau wie der LIFEPAK CR2 Defibrillator verwendet der Trainer ebenfalls die ClearVoice™-Technologie und automatische Lautstärkenanpassung, damit die Anweisungen auch in lauten Umgebungen gut zu hören sind.

Programmierbare Szenarien

Alle Funktionen des LIFEPAK CR2 Trainers sind programmierbar, um die gesamte Bandbreite von Szenarien zu simulieren, denen Anwender des LIFEPAK CR2 Defibrillators in der Realität ausgesetzt sein können. Der LIFEPAK CR2 Trainer bietet zwei vollständig konfigurierbare Szenarien, die über den Einrichtungsbildschirm individuell angepasst und für maximale Flexibilität unterwegs aktualisiert werden können.

E-Mail-Benachrichtigungen

Die LIFEPAK CR2 Trainer Demo App kann zur Einrichtung von automatischen E-Mail-Benachrichtigungen verwendet werden, oder E-Mail-Benachrichtigungen können manuell über Bluetooth® von jedem Windows®, Android®- oder iOS®-Mobilgerät versendet werden. Diese App simuliert die automatischen E-Mail-Benachrichtigungen, die versendet werden, wenn ein LIFEPAK CR2 Gerät zusammen mit dem LIFELINKcentral AED Program Manager verwendet wird.

Einfach und bezahlbar

Der Trainer erkennt, wenn auf die QUIK-STEP™-Schulungselektroden Druck ausgeübt wird, und durchläuft automatisch das Szenario, ohne dass dafür eine Fernbedienung benötigt wird. Durch eine Pause-Taste am Gerät kann ein laufendes Szenario nach Bedarf gestoppt werden. Zudem ist das LIFEPAK CR2 AED-Schulungssystem kostengünstig. Es wird mit vier herkömmlichen Batterien vom Typ D betrieben, die Elektroden sind preisgünstig und wiederverwendbar und simulieren die schnell zugänglichen, speziellen QUIK-STEP EKG-Defibrillationselektroden, mit denen der LIFEPAK CR2 Defibrillator arbeitet.

Technische Daten

Allgemein

Er kann in Umgebungen mit kontrollierter Temperatur und vor Nässe geschützt verwendet werden. Außerdem ist er für eine intensive Nutzung und lange Betriebsdauer geeignet.

Äußere Merkmale

Höhe: 27,2 cm mit Griff

Breite: 21,8 cm

Tiefe: 8,6 cm

Gewicht: 1,8 kg mit Batterien

Batterien

6 Volt/4 Zellen, Reichweite 3,3–6,6 V DC. Vier nicht wiederaufladbare Alkalibatterien (Typ D). Neue Batterien bieten mindestens 100 Stunden ständige Betriebszeit bei Lautstärke 4.

Tasten

Sprache, Stromversorgung, Kind-Modus, Schock

Display

Stromversorgungsanzeige: Aus bei ausgeschaltetem Gerät; Ein bei Gerät im Betriebs- oder Einrichtungsmodus; Blinkt bei Gerät im Standby-Modus (geschlossener Deckel)

Simulationsoptionen

Gerätetyp: Halb-, vollautomatisch

Anzahl der Ereignisse: 1, 2, 3, 4, Wiederholung

Schock empfohlen: Ja, Nein

HLW-Metronom: Nur drücken, 30:2

HLW-Dauer: Kurz, 60 s, 120 s, 180 s

cprINSIGHT-Technologie: Ein, Aus

Keine HLW erkannt: Ein, Aus

Bewegung erkannt: Ein, Aus

Zweisprachig: Ein, Aus

Zweite Sprache: Alle

Atmung kontrollieren: Ein, Aus

Wenn Sie Ihren LIFEPAK CR2 Defibrillator von einem autorisierten Stryker-Vertriebspartner oder Verkäufer erworben haben, hat dieser Zugriff auf Ihr LIFELINKcentral AED Program Manager-Konto und kann möglicherweise Benachrichtigungen von Ihrem LIFEPAK CR2 Defibrillator erhalten. Bitte beachten Sie, dass diese Einstellung zur Benachrichtigung Ihres Vertriebspartners oder Verkäufers JEDERZEIT deaktiviert werden kann. Wenn Sie diese Einstellung deaktivieren möchten, senden Sie bitte eine Anfrage an den Kundendienst von Stryker mit der Bitte um selbstständige Verwaltung Ihres Kontos ohne Versand von Benachrichtigungen an Ihren Vertriebspartner oder Verkäufer.

Alle Angaben gelten mit Stand vom August 2019.

Bitte kontaktieren Sie Ihren Stryker Gebietsleiter, um weitere Informationen zu erhalten, oder besuchen Sie unsere Website unter www.strykeremergencycare.com

Öffentlicher Zugang zur Notfallversorgung

AED-Anwender sollten in der HLW sowie der Verwendung von AED-Geräten geschult sein.

Auch wenn nicht jeder Mensch gerettet werden kann, haben Studien gezeigt, dass eine frühzeitige Defibrillation die Überlebensraten deutlich steigern kann. AEDs können an Erwachsenen und Kindern verwendet werden. AEDs können an Kindern mit einem Körpergewicht von weniger als 25 kg verwendet werden, aber bei einigen Modellen sind separate Defibrillationselektroden notwendig.

Mit den hierin bereitgestellten Informationen soll das Produktangebot von Stryker demonstriert werden. Lesen Sie die vollständigen Informationen zu Indikationen, Kontraindikationen, Warn- und Vorsichtshinweisen und möglichen Nebenwirkungen in der Bedienungsanleitung, bevor Sie die Produkte von Stryker verwenden. Die hier dargestellten Produkte tragen gemäß EU-Verordnungen und -Richtlinien die CE-Kennzeichnung. Es ist möglich, dass nicht alle Produkte auf allen Märkten verfügbar sind, da die Produktverfügbarkeit von behördlichen und/oder medizinischen Praktiken in den einzelnen Märkten abhängt. Bitte wenden Sie sich mit Fragen zur Verfügbarkeit von Stryker-Produkten in Ihrem Gebiet an Ihren Gebietsleiter. Technische Daten können unangekündigt geändert werden.

Stryker oder seine verbundenen Unternehmen besitzen oder verwenden die folgenden Marken oder Dienstleistungsmarken oder haben diese beantragt: ClearVoice, cprINSIGHT, LIFELINKcentral, LIFEPAK, QUIK-STEP, Stryker. Alle anderen Marken sind Marken ihrer jeweiligen Eigentümer oder Inhaber.

Wenn ein Produkt, eine Funktion, ein Dienstleistungsname oder Logo in dieser Liste nicht genannt wird, stellt dies keinen Verzicht auf die Marken- oder sonstige geistige Eigentumsrechte von Stryker hinsichtlich dieses Namens oder Logos dar.



CE Class IIB (0123)

Hergestellt von:

Physio-Control, Inc.
11811 Willows Road NE
Redmond, WA, 98052 U.S.A.
Toll free 800 442 1142
strykeremergencycare.com

Stryker European
Operations B.V.
Herikerbergweg 110
1101 CM Amsterdam
Netherlands
 for Physio-Control, Inc.
Tel +31 (0)43 3620008
Fax +31 (0)43 3632001

Vertrieben von:

Dr. Homer Stryker Platz 1
Duisburg 47228
Germany
Tel +49 2065 837 0
Fax +49 2065 837 837