

# Transport Stretcher

## トランスポートストレッチャー747



### 少しの余裕がゆとりをもたらす

軽い力で移動できたら、スムーズに運転できたら、しっかり停車してくれたら、簡単に背上げ・昇降できたら、ワンランク上の仕様で日々のオペレーションに貢献します。



#### 4面コントローラー・4輪同時ブレーキ

四方どこからでもブレーキ/移動/走行の切替えができます。1つのコントローラーを踏み込むだけで、4輪同時にロックできます。ストライカー独自の金属ギア旋回ブレーキで、静止中ブレはほとんどありません。車輪側面を把持する回転ブレーキは走行面を潰さず、長期使用での劣化を起こしません。



#### 第5車輪

ストライカーが開発した前後回転のみの第5車輪がスムーズな直進、方向転換をサポートします。4面コントローラーのいずれかを「走行」側へ踏み込むと、第5車輪が本体中央部に下ります。



#### 両側油圧昇降ペダル

左右の足踏み式油圧昇降ペダルで、患者の様子を目視しながら容易に昇降できます。降下ペダルの踏み位置で、正逆トレンデレンブルグの角度も直感的に調整できます。耐荷重227kgで余裕があります。



#### 空気圧式背上げ

背面の手動レバー操作で、空気圧アシストで容易に背上げできます。90度まで上がるため、患者の状態に合わせて調整できます。スライド式サイドレールで、背上げ時の患者安全も確保できます。

# Transport Stretcher

## トランスポートストレッチャー747



### 各部の名称

- A 第5車輪操舵システム ● B ハイ・ロー ペダル (左右) ● C プレーキ・ステア ペダル (四方)
- D スライド式サイドレール ● E トレイ/フットボード取付位置 ● F 空気圧式背上げ
- G ポップアップ プッシュハンドル ● H 固定型2段式IVポール (頭部/総耐荷重18kg)
- I スタンダードマットレス ● J ベースフード (耐荷重27kg)
- K 着脱型IVポール/縦型酸素ボンベホルダー取付穴 (4隅/5穴) ● L サイドレール解除レバー (左右)

### 製品一覧

品名	カタログ番号	JANコード	品名	カタログ番号	JANコード
トランスポートストレッチャー747	0747-000-000	04546540640987	着脱型IVポール	0390-025-010	04546540492487
除細動器用トレイ	1105-045-200	04546540650795	スタンダードマットレス	1059-326-001	07613153583103
4役フットボード	1105-045-400	04546540650801	ウルトラコンフォートSEマットレス	1704-034-601	07613327298574
フットボード	1105-045-500	04546540650818	コンフォートゲルSEマットレス	1805-034-601	07613327346619
拡張型トレイ	1105-045-700	04546540656612	抑制帯セット	0785-045-010	04546540504111
拡張型トレイホルダー	1105-045-800	07613327350135	足首用抑制帯	0785-045-020	07613327175318
IVキャディ <sup>*1*</sup>	0785-155-000	07613327350142	胴体用抑制帯	0785-045-015	07613327175240
固定型2段式IVポール (足部) <sup>*2</sup>	0744-035-070	04546540661586	胸部用抑制帯	1010-058-000	07613327175288
縦型酸素ボンベホルダー	1115-130-000	04546540650825	手首用抑制帯	0946-044-000	07613327175219

### 仕様

カタログ番号	STRANSP747	
全長	211 cm	
全幅	76 cm	
本体重量 (付属品含まず)	113 kg	
耐荷重	227 kg	
床から寝台までの高さ (寝台天面高、 マットレス含まず)	最高位	91 cm
	最低位	55 cm
背上げ角度	0~90°	
トレンデンプルグリバーストレンデンプル	± 18°	
寝台寸法	66×192 cm	
サイドレール寸法	33×140 cm	
キャスター径	20 cm	

### 標準構成

	数量
トランスポートストレッチャー747	1
スタンダードマットレス	1
固定型2段式IVポール (頭部)	1
縦型酸素ボンベホルダー	1
着脱型IVポール	1

※1 新品購入時のみ選択可能。 ※2 別途取付工賃が発生します。

## Japan

この資料は医療従事者に向けて作成しています。患者を治療する際、医師は常に自身の専門的な臨床判断に基づく製品の選択をする必要があります。当社は医療上の助言をいたしません、医療従事者が製品を使用する前に、その使用方法に関する情報提供を受けることを推奨しています。使用前にその製品ラベル・取扱説明書・添付文書等を参照してください。ストライカー製品についてご不明な点は、弊社までお問い合わせください。

◎マークの付いた製品名は、ストライカーグループ各社の登録商標です。

Literature Number: BD01-025\_rev1  
PV 1k 12/24

Copyright © 2024 Stryker  
Printed in Japan

## 日本ストライカー株式会社 メディカル事業本部

製品に関するお問い合わせは

**フリーコール 0120-715-545** 平日9:00~17:00  
(土日、祝日、年末年始を除く)