

stryker

# Primeシリーズストレッチャー一覧

	Prime 1115	Prime 1115X	Prime 1105X
耐荷重	318kg		
全長	215.9cm		
寝台幅	66cm	76cm	76cm
サイドレールを上げた場合の全幅	86.4cm	96.5cm	96.5cm
サイドレールを下げた場合の全幅	76.8cm	77.5cm	77.5cm
床から寝台までの最低／最高の高さ	52.7cm／86.4 cm	59.1cm／92.7cm	59.1cm／92.7cm
背上げ角度	0°～90°(±5°)		
膝上げ	高さ:14cm 最大重量:90.7kg	非対応	非対応
トレンデレンブルグ／リバーstrendeレンブルグ	+17°／-17°(±3°)		
チェアポジション	○	×	×
X線撮影	×	○	○
体重計オプション	○	○	○
マットレス(別売)	コンフォートゲルSEマットレス ウルトラコンフォートSEマットレス	ウルトラコンフォートSEマットレス	

## 標準装備・機能

寝台下酸素ボンベホルダー

縦型酸素ボンベホルダー

IVポール取付穴(4カ所)

固定型2段式IVポール

着脱型IVポール

自動洗浄機対応

## アクセサリ

品名	カタログ番号	JANコード	品名	カタログ番号	JANコード
Prime 1115X ストレッチャー	1115-000-000X	04546540698186	スライディングボード 66cm	1105-045-610	07613327375725
Prime 1105X ストレッチャー	1105-000-000X	04546540698179	スライディングボード 76cm	1105-045-310	07613327375749
Prime 1115 ストレッチャー	1115-000-000	04546540641007	抑制帯セット	0785-045-010	04546540504111
体重計システム Prime 26インチ用 <sup>*1,2</sup>	1070-110-260	04546540656605	抑制帯 足首用 ベルクロ式 左右一体	0785-045-020	07613327175318
体重計システム Prime 30インチ用 <sup>*1,3</sup>	1070-060-360	04546540715913	抑制帯 胴体用B バックル2分割式	0785-045-015	07613327175240
Prime かかと受け <sup>*1,4</sup>	1105-045-022	07613252271239	抑制帯 胸部用A ベルクロ2分割式	1010-058-000	07613327175288
IVキャディ <sup>*1,4</sup>	0785-155-000	07613327350142	抑制帯 手首用 ベルクロ式 左右各1セット	0946-044-000	07613327175219
Prime 1115X, 1105X用ポンプブラック <sup>*1,4</sup>	1105-045-035	07613252061052	ウルトラコンフォートSEマットレス 66x10cm	1704-034-601	07613327298574
Prime 1115用ポンプブラック <sup>*1,4</sup>	1105-045-065	07613252061069	ウルトラコンフォートSEマットレス 76x10cm	1704-034-301	07613327298581
Prime X線カセットホルダー	1105-045-100	07613327504866	ウルトラコンフォートSEマットレス 76x7.6cm	1703-034-301	07613327298598
Prime 背上げ用X線カセットホルダー	1105-045-300	07613327504842	ウルトラコンフォートSEマットレスカバー 66x10cm	1704-034-635	04546540828088
サイドレールパッド 1組	1001-052-000	07613327354010	ウルトラコンフォートSEマットレスカバー 76x7.6cm	1703-034-335	04546540845337
除細動器用トレイ	1105-045-200	04546540650795	ウルトラコンフォートSEマットレスカバー 76x10cm	1704-034-335	04546540846969
4役フットボード	1105-045-400	04546540650801	ウルトラコンフォート延長マットレス 66x10cm	1105-034-609	07613252728887
フットボードチャートホルダー	1105-045-500	04546540650818	コンフォートゲルSEマットレス 66cm	1805-034-601	07613327346619
拡張型トレイ	1105-045-700	04546540656612	コンフォートゲルSEマットレス 76cm	1805-034-301	07613327346602
拡張型トレイホルダー	1105-045-800	07613327350135	コンフォートゲルSEマットレスカバー 66cm	1805-034-635	04546540846075
縦型酸素ボンベホルダー	1115-130-000	04546540650825	コンフォートゲルSEマットレスカバー 76cm	1805-034-335	04546540846723
着脱型IVポール	0390-025-010	04546540492487			

医療機器届出番号	販売名
13B1X10209000671	Mシリーズ ストレッチャー
13B1X10209000298	ストライカー社 治療台兼用移送車

一般医療機器／特定保守管理医療機器

## Japan

この資料は医療従事者に向けて作成しています。患者を治療する際、医師は常に自身の専門的な臨床判断に基づく製品の選択をする必要があります。当社は医療上の助言をいたしません、医療従事者が製品を使用する前に、その使用方法に関する情報提供を受けることを推奨しています。使用前にその製品ラベル・取扱説明書・添付文書等を参照してください。ストライカー製品についてご不明な点は、弊社までお問い合わせください。

®マークの付いた製品名は、ストライカーグループ各社の登録商標です。

Literature Number: AC01-003  
PV 0m 04/25

Copyright © 2025 Stryker  
Printed in Japan

stryker



# Primeシリーズ 救急処置台ストレッチャーベッド

取り回しが楽で安定性の高い  
高機能ストレッチャーで安全に配慮した移送

## 日本ストライカー株式会社 メディカル事業本部

お客様センター

**☎ 0120-715-545**

営業時間 平日9:00～17:00まで(土日、祝日、年末年始を除く)

# 高機能ストレッチャーで 安全に配慮した効率的な処置

Primeストレッチャーは医療従事者の安全性とワークフローの効率化を第一に考え、さらに患者の快適性も考慮した設計となっています。

## ● BackSmartとKnee Assist (背上げと膝上げアシスト)

体重を利用してレバー操作だけで背上げ、膝上げをアシストする技術です。臀部が下がる機構により、快適かつ足側へのズレを軽減します<sup>2</sup>。



## ● ポップアップ プッシュハンドル

折りたたんで収納できるので、処置時邪魔になりません。

## ● ハイ・ローペダル/トレンデレンブルグペダル

足踏み油圧式ペダルです。ペダルは三方にあり、寝台の昇降とトレンデレンブルグ角度の調節ができます。

## ● Big Wheelで楽な取り回し

Big Wheelは第5車輪に比べて、押し出す力は50%少なく、取り回す力は60%少なく操舵が可能です<sup>1,2</sup>。



	標準設置	追加オプション
① 固定型2段式 IVポール	頭・右1 足・左1	左右付け替え可。3段式も有
② ポップアップ プッシュハンドル	頭側	足側にも増設可能
③ 体重計	オプション	製造元で装着するため、後付け不可
④ ポンプラック Prime 1115用	オプション	耐荷重18kg

※本体ご発注時での対応となります。別途取付工賃が発生する場合があります。また、納品までにお時間をいただきます。

- Hospital Focuses on Mobility with Big Wheel, 2005
- Stryker Prime Series Stretcher with Big Wheel and electric lift reduces exertion when lifting the stretcher litter, 2015.



## ● チェアポジション

チェアポジションにすることができ、移乗作業・回数を減らすことができます。

## ● 耐荷重 318kg

全Primeシリーズ共通の標準仕様です。



## ● 0(ゼロ)ギャップ

スライド式のサイドレールは倒したときに寝台下に完全に収納されるので、移乗が楽に行えます。

## ● 体重測定機雑(オプション)

オプションで体重測定機能を選択可能です\*。



## ● 4カ所のブレーキと操舵ペダル

すべてのキャスターに金属性のブレーキを搭載、摩耗しにくく、安全に使用できます。ブレーキペダルは、どこからでもアクセスできるよう、4カ所に配置しています。

## ● ベースフード 耐荷重27kg

\*体重45kg未満の場合は±1.3kg、体重45kg以上の場合には±3%の誤差があります。誤差をなるべく小さく測定する場合は、寝台を最も高い位置にし、水平にします。トレンデレンブルグまたは逆トレンデレンブルグが5度を超えないようにしてください。測定値を取引・証明には使用できません。

# X線撮影が可能なストレッチャー

Prime Xは、Primeの基本性能にX線撮影機能を搭載したストレッチャーです。Prime Xは二重寝台で、360°どの位置からでもカセットを挿入できます。さらにClearviewテクノロジーにより、透視台に近いイメージクオリティを実現しています<sup>3</sup>。



## ■ 下部を持ち上げ

下部を簡単に持ち上げられるため、カセット(はめこみ型)プラットフォームの取り扱い時に洗浄も可能です。



## ■ 360° アクセス

頭側、足側、360°どこからでもカセット挿入可能です。



## ■ 簡単に識別

Prime Xストレッチャーは、ハンドル、サイドレール、バンパーに赤のアクセントリングを装着しているため、簡単に識別できます。

## ■ BackSmart(背上げアシスト)

体重を利用してレバー操作だけで背上げをアシストする技術です。

## ■ Clearviewテクノロジー

2層のABS複合材で覆われた構造発泡体は、透視台に匹敵する画質を実現します<sup>3</sup>。

## ● 体重測定機雑(オプション)

オプションで体重測定機能を選択可能です\*。



第5車輪



Big Wheel

## ■ 足回りオプション

床の材質、傾斜、患者の体重、輸送距離など、使用環境やニーズに応じて適切なオプションを選択できます。

	標準設置	追加オプション
① 固定型2段式 IVポール	頭・右1 足・左1	左右付け替え可。3段式も有。
② ポップアップ プッシュハンドル	頭側	足側にも増設可能
③ 体重計	オプション	製造元で装着するため、後付け不可
④ ボンブラック Prime1115X/1105X用	オプション	耐荷重18kg

\*本体ご発注時での対応となります。別途取付工賃が発生する場合があります。また、納品までにお時間をいただきます。

\*体重45kg未満の場合は±1.3kg、体重45kg以上の場合は±3%の誤差があります。誤差をなるべく小さく測定する場合は、寝台を最も高い位置にし、水平にします。トレンデンブルグまたは逆トレンデンブルグが5度を超えないようにしてください。測定値を取引・証明には使用できません。

3. Data on file.


# マットレス

## コンフォートゲル SEマットレス ゲルの力で床ずれリスクの軽減

床ずれは2時間という短時間で生じる場合もあります<sup>4,5</sup>。  
 ストライカー独自のゲル技術を採用したマットレスで床ずれリスクを軽減します。  
 なお、ゲルが写るためX線撮影には適しません。

### CoreGel テクノロジー

仙骨部に配置されたゲルは、身体を受け止めるポケットを作り、ズレを防ぎます。  
 この設計により、体重を吸収・分散させ、体圧を再分配します<sup>6</sup>。

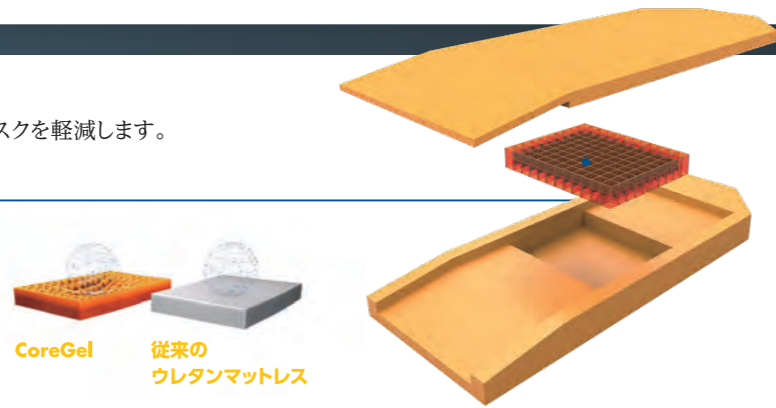

CoreGel 従来のウレタンマットレス

4. Stop them at the Door; Should a Pressure Injury Prevention Protocol be Implemented in the Emergency Department, J WOCN, 2010.  
 5. Gefen, A. (2008). How Much Time Does it Take to Get a Pressure Ulcer? Integrated Evidence from Human, Animal, and In Vitro Studies. Ostomy Wound Manage,[online] 54(10), pp.26-35. Available at: <https://www.o-wm.com/content/how-much-time-does-it-take-get-a-pressure-ulcer-integrated-evidence-human-animal-and-in-vitro>  
 6. Data on file

## ウルトラコンフォートSEマットレス

### 耐久性

素材はTPU(熱可塑性ポリウレタンエラストマー)で、柔軟性があり、耐薬品性があります。

### X線対応


X線撮影に対応しているマットレスです。

### 液体の侵入を防ぐ

カバーはミシンで縫合したのではなく、高周波で溶接しているため縫い目がありません。液体の侵入や浸潤を防ぎます。

### 3面ファスナー

カバーを3面から開けることができるため、内部の確認も、カバーの交換も、楽に行うことができます。

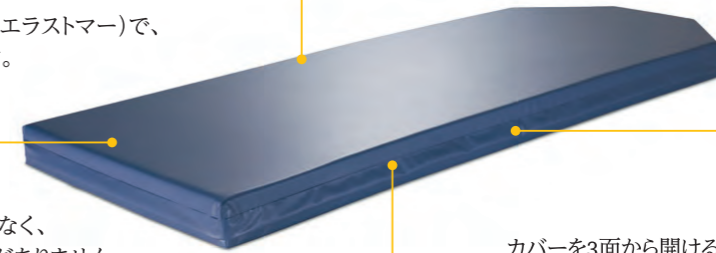


# Prime シリーズ アクセサリー

## ニーズに合わせて選べるアクセサリ

多様なアクセサリ類で、ニーズに合わせてカスタマイズ可能です。

### Prime 1115

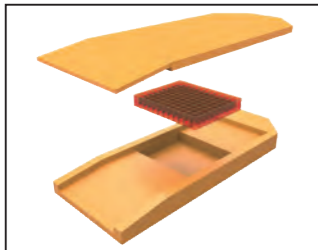

◎**コンフォートゲルSEマットレス**  
 ストライカー独自のゲル技術で、患者の快適性が向上するマットレスです。

### Prime 1115X/1105X



■**X線カセットホルダー**  
 側面に固定して、頸椎など側方撮影ができます。



◎**コンフォートゲルSEマットレスカバー**  
 コンフォートゲルSEマットレス専用カバー。



■**背上げ用X線カセットホルダー**  
 背上げの状態でもX線撮影ができます。二重寝台にカセットを置いて撮影の際は、必ず外してください。



4**役フットボード**  
 足側に取り付けて、寝台と同じ高さにして寝台を延長したり、垂直に立ててフットボードにしたり、患者側に倒して除細動器などを置くトレイにしたり、斜めにして書記台にしたりすることができます。(耐荷重14kg)



拡張型**トレイ**  
 サイドレール間を渡すように設置するトレイです。(耐荷重14kg)



拡張型**トレイホルダー**  
 拡張型トレイを収納します。写真はトレイが入った状態で、トレイは別売りです。(耐荷重14kg)



除細動器用**トレイ**  
 足側に簡単に取り付けられる、除細動器などを置くトレイです。(耐荷重14kg)



IV**キャディ**  
 スタンドアロン型IVポール。コネクターでスタンドをストレッチャーへ固定します。体重計と併用できません。本体と一緒に注文してください。製造元で取り付けるため、納品までにお時間をいただきます。別途取付工賃が発生します。



フットボード**チャートホルダー**  
 足側に簡単に取り付けられる、書類などを収納するホルダーです。(耐荷重14kg)



サイドレール**パッド(1組)**  
 サイドレールに被せるカバーです。




縦型**酸素ボンベホルダー**  
 頭側2カ所、足側2カ所にある着脱型IVポールと共用の差し込み穴に入れて使用します。(耐荷重18kg)



着脱型**IVポール**  
 頭側2カ所、足側2カ所にある縦型酸素ボンベホルダーと共用の差し込み穴に入れて使用します。(耐荷重18kg)



かかと**受け(1組)**  
 足側に設置してかかとを支えます。IVポールなど、足側に設置する他のアクセサリがすべて併用できません。本体と一緒に注文してください。製造元で取り付けるため、納品までにお時間をいただきます。別途取付工賃が発生します。

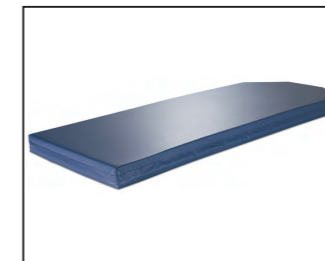

ウルトラ**コンフォートSEマットレス**  
 〈Prime 1115〉  
 ウルトラコンフォートSEマットレス 66x10cm  
 〈Prime 1115X〉  
 ウルトラコンフォートSEマットレス 76x7.6cm  
 ウルトラコンフォートSEマットレス 76x10cm



ウルトラ**コンフォートSEマットレスカバー**  
 〈Prime 1115〉  
 ウルトラコンフォートSEマットレスカバー 66x10cm  
 〈Prime 1115X〉  
 ウルトラコンフォートSEマットレスカバー 76x7.6cm  
 ウルトラコンフォートSEマットレスカバー 76x10cm

## Prime シリーズ / 共通アクセサリ