

ST1-X Stretcher

ST1-Xストレッチャー



X線撮影可能な ベーシックストレッチャー

患者を乗せたままX線撮影が可能な二重寝台です。
下げた時に寝台の下に収納されるサイドレールで移乗がしやすく、
第5車輪で楽に取り回すことができます。
診療、処置、搬送の3役をこなす1台です。



360° アクセス

二重寝台なので患者を持ち上げる必要なくX線撮影が可能です。頭側、足側、360°どこからでもカセット挿入が可能です。



第5車輪

ストライカーが開発した前後回転のみの第5車輪がスムーズな直進、方向転換をサポートします。2面コントローラーのいずれかを「走行」側へ踏み込むと、第5車輪が本体中央部に下ります。



両側油圧昇降ペダル

左右の足踏み式油圧昇降ペダルで、患者の様子を目視しながら容易に昇降できます。降下ペダルの踏み位置で、正逆トレンデレンブルグの角度も直感的に調整できます。耐荷重250kgで余裕があります。




空気圧式背上げ

背面の手動レバー操作で、空気圧アシストで容易に背上げできます。90度まで上がるため、患者の状態に合わせて調整できます。スライド式サイドレールで、背上げ時の患者安全も確保できます。

ST1-X Stretcher

ST1-Xストレッチャー

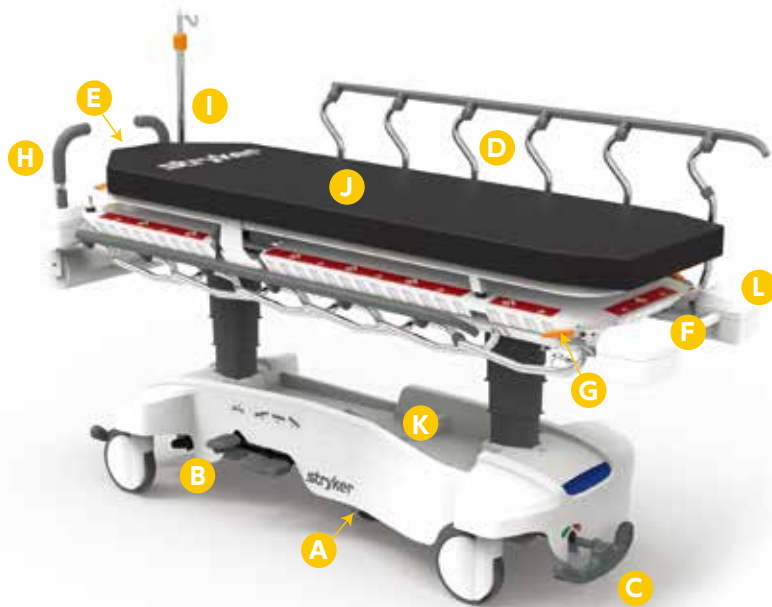

各部の名称

- A 第5車輪操舵システム B ハイ・ロー ペダル(左右)
- C ブレーキ・ステア ペダル(二方) D スライド式サイドレール E 空気圧式背上げ
- F トレイ取付位置 G サイドレール解除レバー (左右) H ポップアップ プッシュハンドル
- I 固定型2段式IVポール (頭部・足部/総耐荷重各18kg)
- J スタンダードマットレス K ベースフード (耐荷重27kg)
- L 着脱型IVポール/縦型酸素ボンベホルダー用ホール (4隅)

アクセサリ

品名	カタログ番号	JANコード	品名	カタログ番号	JANコード
ST1-X ストレッチャー	6300-000-200	07613327482874	ST1/ST1-X 着脱型IVポール	MM050	07613327482928
ST1/ST1-X スタンダードマットレス	6300-0-100	07613327482911	ST1/ST1-X 足首用抑制帯	MM052	07613327482942
ST1/ST1-X ボンベホルダー	MM044	07613327482898	ST1/ST1-X 胴体用抑制帯	MM053	07613327482966
ST1/ST1-X チャートホルダー付除細動器用トレイ	MM047	07613327482904	ST1/ST1-X 手首用抑制帯	MM054	07613327482959
ST1/ST1-X ペーパーロールホルダー	MM048	07613327482935	ST1/ST1-X 抑制帯セット	MM055	07613327624335

オプション

品名	
ST1/ST1-X 固定型3段式IVポール	新品購入時、取り付け可能です。 別途取付工賃が発生します。
足側プッシュハンドル	

医療機器届出番号	販売名
13B1X10209000964	Model ST1 / ST1-X トランスポートストレッチャー 一般医療機器 / 特定保守管理医療機器

Japan

この資料は医療従事者に向けて作成しています。患者を治療する際、医師は常に自身の専門的な臨床判断に基づく製品の選択をする必要があります。当社は医療上の助言をいたしません、医療従事者が製品を使用する前に、その使用方法に関する情報提供を受けることを推奨しています。使用前にその製品ラベル・取扱説明書・添付文書等を参照してください。ストライカー製品についてご不明な点は、弊社までお問い合わせください。

◎マークの付いた製品名は、ストライカーグループ各社の登録商標です。

Literature Number: BD01-043_rev1
PV 1k 12/24

Copyright © 2024 Stryker
Printed in Japan

仕様

カタログ番号	SST1XSTD
全長	217cm
床から寝台までの高さ	最高位 91cm 最低位 61cm
全幅	78cm
サイドレールを上げた場合	78cm
サイドレールを下げた場合	73.5cm
耐荷重	250kg
トレンデレンブルグ/ リバーストレンデレンブルグ	±16°
寝台寸法	62±0.5cm × 193±0.5cm

標準構成

品名	数量
ST1-X ストレッチャー	1
ST1/ST1-X スタンダードマットレス	1
ST1/ST1-X 固定型2段式IVポール (頭部/足部)	1
ST1/ST1-X 縦型酸素ボンベホルダー	1
ST1/ST1-X 着脱型IVポール	1

日本ストライカー株式会社 メディカル事業本部

製品に関するお問い合わせは

0120-715-545

営業時間 平日9:00~17:00 (土日、祝日、年末年始を除く)