


**stryker**<sup>®</sup>

**Giá lăn  
Hệ thống garô SmartPump<sup>®</sup>**

**REF 5920-013-000**

**Hướng dẫn sử dụng**

**R<sub>x</sub> ONLY**

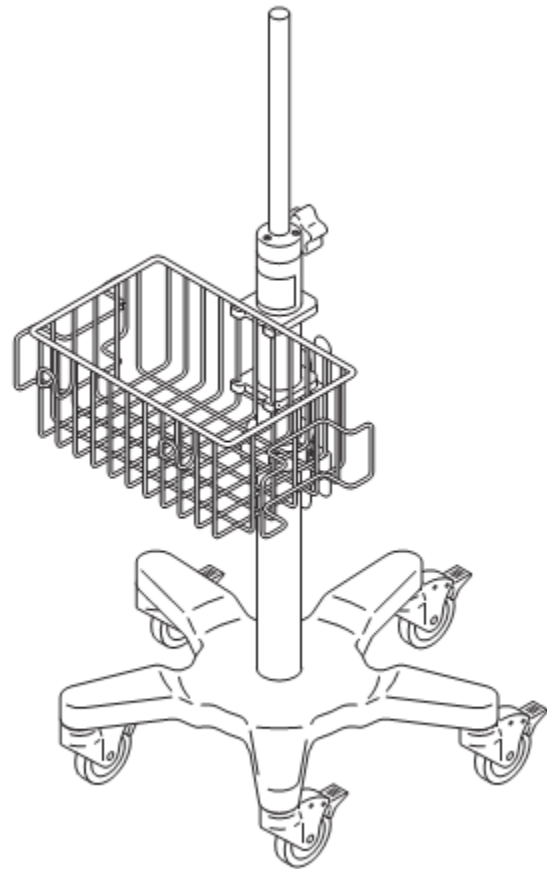

## Giới thiệu

Sổ tay *Hướng dẫn sử dụng* này là nguồn thông tin toàn diện nhất cho việc sử dụng sản phẩm của bạn. Sổ tay hướng dẫn này có thể được sử dụng bởi các giảng viên tại chức và các kỹ thuật viên trang thiết bị y sinh. Hãy giữ và tham khảo sổ tay hướng dẫn này trong suốt thời gian sử dụng sản phẩm.

## Quy ước

Các quy ước sau đây được sử dụng trong sổ tay hướng dẫn này:

- **CẢNH BÁO** nêu bật một vấn đề liên quan đến an toàn. **LUÔN LUÔN** tuân theo những thông tin này để ngăn ngừa thương tích cho bệnh nhân và/hoặc nhân viên y tế.
- **THẬN TRỌNG** nêu bật vấn đề về độ tin cậy của sản phẩm. **LUÔN LUÔN** tuân thủ các thông tin này để tránh hư hại cho sản phẩm.
- **LƯU Ý** bổ sung và/hoặc làm rõ thông tin quy trình.

## Thông tin liên hệ

Để biết thêm thông tin, bao gồm thông tin an toàn hoặc đào tạo tại chức, hãy liên hệ với đại diện bán hàng của Stryker hoặc gọi cho dịch vụ khách hàng của Stryker theo số 1-800-253-3210. Nếu ở ngoài Hoa Kỳ, hãy liên hệ với công ty con Stryker gần nhất của bạn.

## Mô tả

Giá lăn Stryker được thiết kế để lắp Máy bơm garô SmartPump của Stryker một cách an toàn. Giá đỡ này cho phép truy cập hiệu quả vào các điều khiển của máy bơm và đi dời.

## Sử dụng với

Phần này xác định các bộ phận cần thiết để sử dụng với thiết bị để có được sự kết hợp an toàn. Các thay đổi của bộ phận có thể xảy ra.



**CẢNH BÁO: NGUY CƠ LẬT ĐỔ** - KHÔNG ĐƯỢC sử dụng giá lăn REF 5920-013-000 với bất kỳ thiết bị nào khác, trừ khi có quy định khác. **LUÔN LUÔN** sử dụng giá lăn với máy bơm garô. Việc không tuân thủ có thể gây ra chấn thương cho bệnh nhân và/hoặc nhân viên y tế.

MÔ TẢ	REF
Máy bơm garô một kênh của hệ thống garô SmartPump	5920-010-000
Máy bơm garô hai kênh của hệ thống garô SmartPump	5920-011-000


## An toàn của người sử dụng/bệnh nhân



### CẢNH BÁO:

- Trước khi sử dụng thiết bị này, hoặc bất kỳ bộ phận nào tương thích với thiết bị này, hãy đọc và hiểu rõ hướng dẫn sử dụng. Chú ý đặc biệt đến thông tin an toàn. Hãy làm quen với thiết bị trước khi sử dụng.
- Khi nhận được lần đầu tiên, và trước mỗi lần sử dụng, hãy kiểm tra hư hỏng của từng bộ phận. **KHÔNG ĐƯỢC** sử dụng bất kỳ thiết bị nào nếu có hư hỏng.
- Chỉ sử dụng thiết bị được Stryker phê duyệt, trừ khi có quy định khác.
- **KHÔNG ĐƯỢC** sửa đổi, bảo dưỡng, hoặc sửa chữa bất kỳ thiết bị nào, trừ khi có quy định khác. Gọi cho dịch vụ khách hàng của Stryker. Xem phần *Thông tin liên hệ*.
- Chỉ những cá nhân được đào tạo và có kinh nghiệm trong việc bảo trì phụ kiện thiết bị y tế có thể tái sử dụng này mới được lắp ráp và bảo dưỡng thiết bị này.

## Tính năng

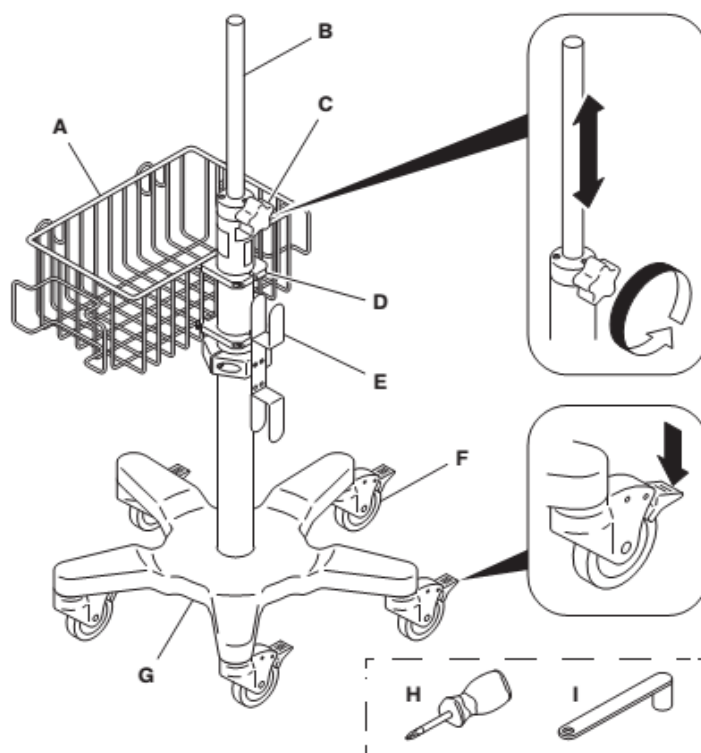


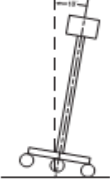



<b>A</b>	<b>Giỏ tiện ích</b>
<b>B</b>	<b>Tổ hợp cột</b>
<b>C</b>	<b>Núm điều chỉnh chiều cao</b>
<b>D</b>	<b>Kẹp gió (2)</b>
<b>E</b>	<b>Cuộn dây nguồn có kẹp</b>

<b>F</b>	<b>Bánh xe có khóa (5)</b>
<b>G</b>	<b>Bệ</b>
<b>H</b>	<b>Tuốc nơ vít</b>
<b>I</b>	<b>Cờ lê</b>

## Định nghĩa

Các biểu tượng nằm trên thiết bị và/hoặc ghi nhãn được định nghĩa trong phần này hoặc trong *Biểu đồ Định nghĩa Biểu tượng*. Xem *Biểu đồ Định nghĩa Biểu tượng* được cung cấp cùng với thiết bị.

<b>BIỂU TƯỢNG</b>	<b>ĐỊNH NGHĨA</b>
	Đế siết chặt nút điều chỉnh chiều cao và khóa vị trí cột
	Đế nới lỏng nút điều chỉnh chiều cao và mở khóa vị trí cột
	Dấu hiệu cảnh báo chung
	 <b>THẬN TRỌNG:</b> Giá lăn có tải phải quay trở lại vị trí thẳng đứng khi nghiêng 10 độ. Đọc hướng dẫn sử dụng đi kèm với giá lăn.

## Hướng dẫn lắp ráp

### LƯU Ý:

- Tham khảo các hình minh họa và các bước hướng dẫn tương ứng.
- Hãy chắc chắn rằng các bộ phận sau đây được bao gồm trước khi lắp ráp giá lăn: (1) giỏ tiện ích, (2) kẹp giỏ, (1) cuộn dây nguồn có kẹp, (1) tổ hợp cột, (1) bệ, (1) tuốc nơ vít và (1) cờ lê. Nếu bất kỳ bộ phận nào bị thiếu, hãy gọi cho dịch vụ khách hàng của Stryker. Xem phần *Thông tin liên hệ*.

### BƯỚC HƯỚNG DẪN

<b>1</b>	Tháo vít nắp đầu lục giác, vòng đệm khóa, và vòng đệm phẳng ra khỏi tổ hợp cột. Sử dụng cờ lê nếu cần.
<b>2</b>	Gắn chặt bệ vào cột bằng cách sử dụng vòng đệm phẳng, vòng đệm khóa, và vít nắp đầu lục giác. Sử dụng cờ lê để siết chặt vít nắp đầu lục giác. LƯU Ý: Đảm bảo rằng vòng đệm phẳng nằm dựa vào bệ và vòng đệm khóa nằm giữa

	vòng đệm phẳng và vít nắp đầu lục giác.
<b>3</b>	Lắp và đặt từng kẹp giỏ trên giỏ tiện ích. Đặt tổ hợp cột và bệ vào vị trí thẳng đứng. Tháo núm điều chỉnh chiều cao. Lắp giỏ tiện ích và cuộn dây nguồn với kẹp vào tổ hợp cột.
<b>4</b>	Lắp núm điều chỉnh chiều cao. Đặt giỏ tiện ích và cuộn dây nguồn vào tổ hợp cột theo yêu cầu. <b>LƯU Ý:</b> Hãy chắc chắn rằng giỏ tiện ích không cản trở các nhãn trên tổ hợp cột. Sử dụng tuốc nơ vít để siết chặt tất cả vít máy đầu nón cụt để cố định các kẹp giỏ và kẹp cuộn dây vào tổ hợp cột.

## Kiểm tra và bảo trì

Xem *hướng dẫn sử dụng* được cung cấp với Máy bơm Garô SmartPump.

## Vệ sinh

Xem *hướng dẫn sử dụng* được cung cấp với Máy bơm Garô SmartPump.

## Bảo quản và xử lý

Xem *hướng dẫn sử dụng* được cung cấp với Máy bơm Garô SmartPump.

## Thải bỏ/Tái chế

Xem *hướng dẫn sử dụng* được cung cấp với Máy bơm Garô SmartPump.




## Khắc phục sự cố

Xem *hướng dẫn sử dụng* được cung cấp với Máy bơm Garô SmartPump.

## Thông số kỹ thuật



<b>Mô hình:</b>	Giá lăn SmartPump
<b>REF:</b>	5920-013-000
<b>Khối lượng:</b>	11.2 kg [24.8 lb]; không có thiết bị nào; 4.5 kg [10 lb]; đôi trọng của bệ
<b>Kích thước</b>	<b>Chiều cao:</b> 1.4 m [4.75 ft]; vị trí cao nhất; 1.1 m [3.8 ft]; vị trí thấp nhất
	<b>Đường kính bệ:</b> 0.5 m [1.75 ft]
<b>Giới hạn trọng lượng của giỏ tiện ích:</b>	2.3 kg [5 lb]

## Hướng dẫn lắp ráp (tiếp tục)

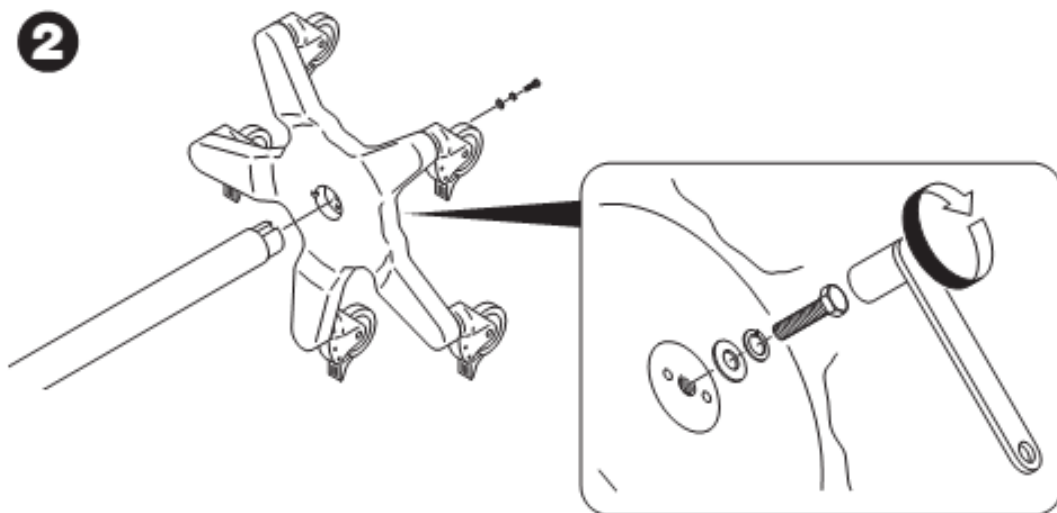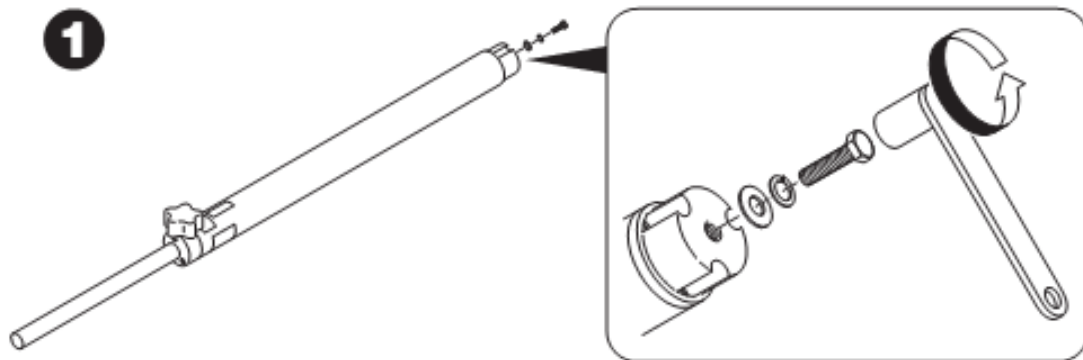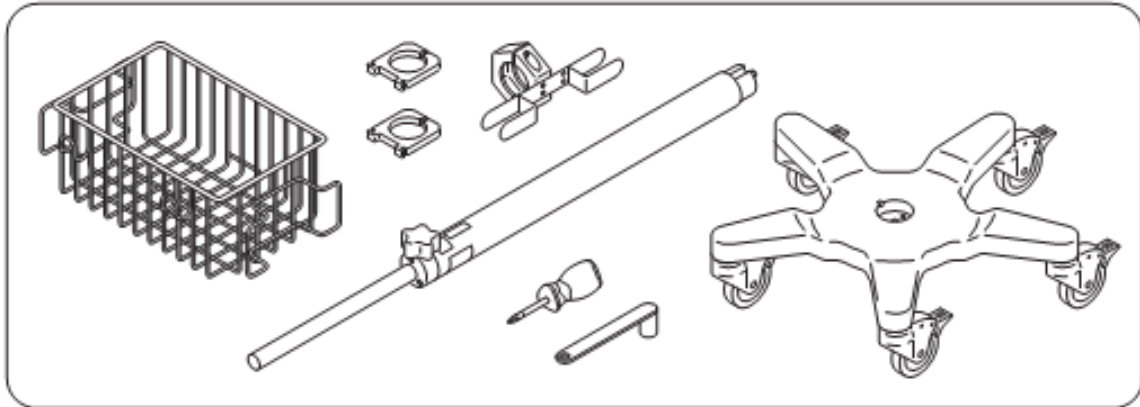

## Hướng dẫn lắp ráp

**3**

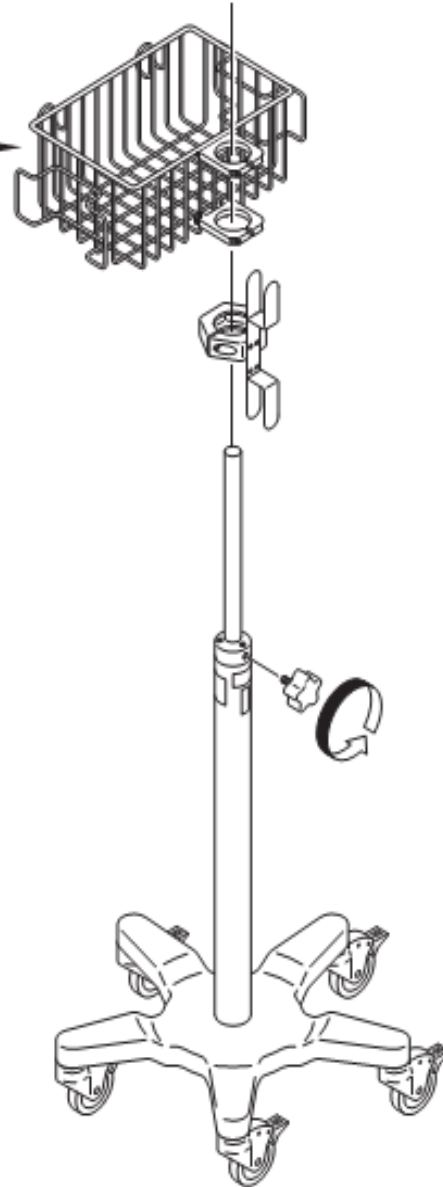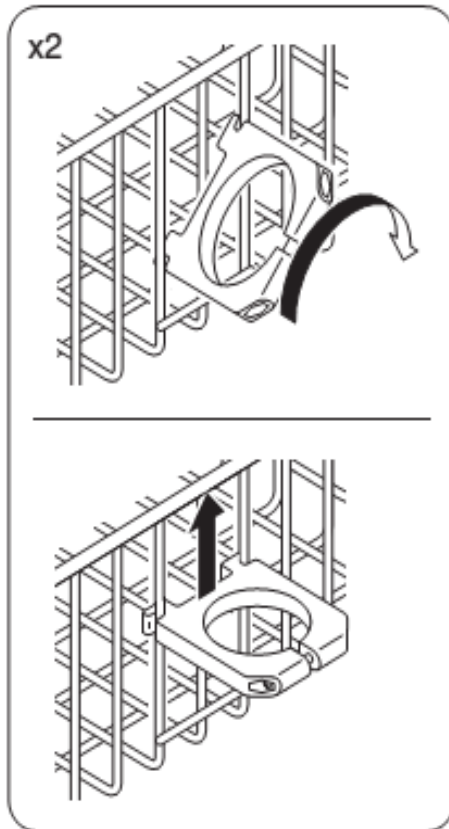

## Hướng dẫn lắp ráp (tiếp tục)

