

stryker[®]

System 8

Bộ pin

REF

8212-000-000


REF

8215-000-000

Hướng dẫn sử dụng

R_x ONLY

CE

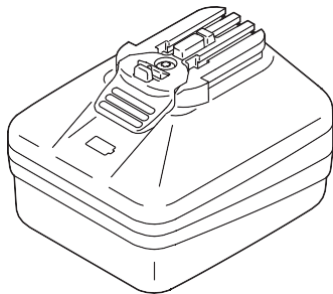

Giới thiệu

Hướng dẫn sử dụng này bao gồm các thông tin nhằm đảm bảo việc sử dụng sản phẩm an toàn, hiệu quả và phù hợp. Hướng dẫn này dành cho các giảng viên, bác sĩ, y tá, bác sỹ phẫu thuật, và các kỹ thuật viên trang thiết bị y sinh học. Vui lòng giữ và tham khảo hướng dẫn này trong quá trình sử dụng sản phẩm.

Các quy ước sau được sử dụng trong hướng dẫn này:

- **CẢNH BÁO** nêu bật các vấn đề liên quan đến an toàn. Vui lòng tuân thủ thông tin này để ngăn việc gây thương tích cho bệnh nhân và nhân viên y tế.
- **THẬN TRỌNG** nêu bật các vấn đề về độ ổn định của sản phẩm. Vui lòng tuân thủ thông tin này để tránh gây thiệt hại cho sản phẩm.
- **LƯU Ý** bổ sung và / hoặc làm rõ các thông tin về quy trình sử dụng.

Để biết thêm thông tin, bao gồm thông tin về an toàn, đào tạo hoặc tài liệu hiện tại, hãy liên hệ với đại diện bán hàng của Stryker hoặc gọi cho dịch vụ khách hàng của Stryker theo số 1-269-323-7700 hoặc 1-800-253-3210. Nếu bạn không ở Hoa Kỳ, vui lòng liên hệ với đại lý Stryker gần nhất.

Chỉ định

Xem hướng dẫn sử dụng đi kèm tay khoan.

Chống chỉ định

Xem hướng dẫn sử dụng đi kèm tay khoan.

Sử dụng với

Bộ pin chỉ được sử dụng với các tay khoan sau của Stryker:

MÔ TẢ

MÃ

Tay khoan System 8	820X-XXX-XXX series
Tay khoan System 7	720X-XXX-XXX series
Tay khoan Cordless System 8	4505-000-000
Điều khiển không dây 4	4405-000-000
Cura ngang System 8 Sabo®	4508-000-000
Cura ngang Sabo2	4408-000-000

Sạc pin với một trong số các bộ sạc pin Stryker sau đây được cấu hình với Module sạc System 6 của Stryker (Mã 6110-625-000):

MÔ TẢ	MÃ
Bộ sạc pin Universal	7110-120-000
Bộ sạc pin System 6	6110-120-000


Chỉ dẫn an toàn



CẢNH BÁO:

- Trước khi sử dụng thiết bị hoặc bất kỳ bộ phận nào tương thích với thiết bị, đọc kỹ và nắm rõ các hướng dẫn sử dụng. Đặc biệt chú ý đến thông tin an toàn. Làm quen với thiết bị trước khi sử dụng.
- Chỉ những chuyên gia chăm sóc sức khỏe và bác sĩ được đào tạo và có kinh nghiệm với việc sử dụng được vận hành thiết bị này.
- Bác sĩ thực hiện các quy trình có trách nhiệm trong việc xác định sự phù hợp của thiết bị và kỹ thuật cụ thể được sử dụng cho mỗi bệnh nhân. Stryker với tư cách là nhà sản xuất không đưa ra bất kỳ đề xuất nào về phương án điều trị hay phẫu thuật.
- Khi sử dụng lần đầu và trước mỗi lần sử dụng, làm sạch và khử trùng thiết bị như chỉ định. Xem hướng dẫn bảo dưỡng kèm tay khoan.
- Khi sử dụng lần đầu và trước mỗi lần sử dụng, kiểm tra thiết bị để phát hiện các hư hỏng. KHÔNG sử dụng bất kỳ thiết bị nào nếu có dấu hiệu hư hỏng.
Trước khi sử dụng, LUÔN cho phép thiết bị đạt đến phạm vi nhiệt độ hoạt động được quy định trong hướng dẫn sử dụng cung cấp kèm với tay khoan.
- Để ngăn thiết bị quá nóng, LUÔN tuân theo chu kỳ làm việc được đề xuất trong hướng dẫn sử dụng kèm theo tay khoan.
- KHÔNG để pin tiếp xúc với các vật bằng kim loại.

Đặc tính

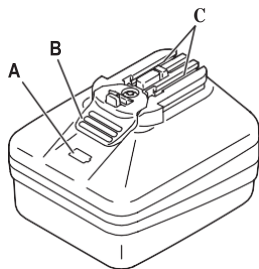

A	Đèn báo Chỉ thị - cho biết tình trạng pin. Đèn sẽ sáng trong trạng thái ổn định trong 10 giây khi sử dụng pin.
B	Chốt pin – Giữ pin trong tay khoan.
C	Tiếp xúc pin – Khớp với tay khoan để thành mạch điện

Biểu tượng

Các biểu tượng trên thiết bị và / hoặc nhãn được định nghĩa trong phần này hoặc trong bảng định nghĩa biểu tượng. Xem bảng định nghĩa biểu tượng cung cấp cùng với thiết bị.

BIỂU TƯỢNG	ĐỊNH NGHĨA
	Cảnh báo chung
	Tình trạng pin (đèn báo chỉ thị)
<p>WARNING ADVERTISSEMENT</p>	<p> Cảnh báo: Pin có chứa Lithium-ion. Có nguy cơ cháy nổ. KHÔNG làm ngắn mạch, mở, nghiền nát hoặc đốt. Chỉ khử trùng theo hướng dẫn. Tham khảo hướng dẫn sử dụng.</p>

Hướng dẫn

LƯU Ý:

- Xem hướng dẫn sử dụng kèm theo với bộ sạc pin để sạc pin đúng cách trước mỗi lần sử dụng.
- Để đạt dung lượng tối đa, hãy sạc pin trước khi khử trùng, ngay cả khi pin chưa được sử dụng.
- Một lần sạc điển hình sẽ mất từ 5 đến 30 phút. Sạc pin đã cạn có thể mất tối đa 90 phút.
- Để đạt dung lượng tối đa, hãy để pin trong bộ sạc pin để duy trì mức sạc đầy. KHÔNG lưu trữ các pin trong một tay khoan. Tháo pin khi tay khoan không hoạt động.
- Stryker khuyến nghị sử dụng pin được sạc trong 30 ngày gần nhất.
- Xem hướng dẫn sử dụng kèm theo tay khoan để lắp đặt và tháo pin ra khỏi tay khoan.
- Khi đèn báo nhấp nháy, sử dụng tay khoan ở chế độ chậm có thể kéo dài thời gian sử dụng của pin.

Hướng dẫn bảo dưỡng

Để biết hướng dẫn xử lý, hãy xem hướng dẫn sử dụng kèm theo với tay cầm.

Tiêu hủy/Tái chế



Bộ pin sạc lại này có chứa
Lithium-Ion.

Li-ION

Đề tuân thủ Chi thị về Pin của Cộng đồng Châu Âu 2006/66 / EC, thiết bị này được thiết kế để loại bỏ an toàn các pin tại thời điểm hết hạn sử dụng với một cơ sở xử lý chất thải.

Các bộ pin phải được khử nhiễm trước khi được tái chế. Nếu không thể tháo dỡ pin để tái chế, bệnh viện không nên lấy pin ra khỏi thiết bị thải. Tiếp tục xử lý một lượng nhỏ pin di động để chôn lấp và tiêu hủy được cho phép theo Chi thị 2006/66 / EC và các quy định của các Quốc gia thành viên.

Thông số kỹ thuật

THẬN TRỌNG: LUÔN bảo quản thiết bị trong điều kiện môi trường quy định trong thời gian sử dụng.

Model:	Bộ pin System 8, nhỏ (Mã 8212-000-000)	Bộ pin System 8, lớn (Mã 8215-000-000)
Loại:	Pin có thể sạc lại, Pin Lithium-Ion	
Kích thước:	Cao 58 mm [2,3 inch] Rộng 71 mm [2,8 inch] Dài 84 mm [3,3 inch]	Cao 76 mm [3,0 inch] Rộng 71 mm [2,8 inch] Dài 84 mm [3,3 inch]
Khối lượng:	0,27 kg [0,60 lb]	0,42 kg [0,93 lb]
Điện áp:	9,9 V —(đòng điện trực tiếp)	9,9 V —
Công:	13,4 Wh	26,7 Wh
Cường độ dòng điện:	30 A (giới hạn)	60 A (giới hạn)
Công suất:	1350 mAh	2700 mAh
Chế độ hoạt động:	Xem hướng dẫn sử dụng đi kèm tay khoan.	
Bảo vệ xâm nhập:	IPX0	
Điều kiện môi trường:	Xem hướng dẫn sử dụng đi kèm tay khoan.	