

STRYKER SURGICAL
COMMITTED
TO YOUR SUCCESS.

ConstaVac™ CBCIII

Blood Conservation System

ブラッドコンサベーションシステム

- 20年以上の長期使用実績
- 簡便な100%ディスポーザブル
- 術前Hct低下のない術後回収式^{*1}
- 手技量で賄える経済性



術後回収式・非洗浄式 自己血輸血装置

^{*1} Autologous Blood Transfusion After Total Knee Arthroplasty A Randomized, Prospective Study Comparing Predonated and Postoperative Salvage Blood Steven T. Woolson, MD and William W. Wall, MD/Stanford University Hospital The Journal of Arthroplasty/Vol. 18/No. 3/2003

ConstaVac™ CBC III

CBC III 術後回収式・非洗浄式 自己血輸血装置

術後回収式・非洗浄式 自己血輸血装置のスタンダード。20年以上の長期使用実績

手術時の同種血輸血を回避する一つの選択肢が自己血輸血。

CBC IIIは、術後の閉創部ドレーンからの出血を回収し、回収血全血を返血する、術後回収式・非洗浄式の代表的な製品です。日本では1995年に販売され、以来、20年継続して臨床使用されています。

2012年には、日本自己血輸血学会から「回収式自己血輸血実施基準(2012)」が公表され、ますます、安心して使用できる環境が整って参りました。

術後回収式・非洗浄式のパイオニア製品であり、多くの実績を重ねているCBC IIIを、自己血輸血の手段の一つとして、ご活用ください。

※返血は 回収から6時間以内に完了する必要があります。禁忌などの詳細は、添付文書、取扱説明書、実施基準をご確認ください。

独自の臨床メリット

- 術前貯血式と同等の臨床効果で、術前 Hct 低下に影響を与えない *1
- 長期・多数の日本・世界での使用実績
- 滅菌済み、クローズド回路構成
- 日本自己血輸血学会の「回収式自己血輸血実施基準(2012)」対象製品

優れた経済性

- 消耗品として、診療報酬 手技点数で相対できます(2018年4月現在)
K923 保険術中術後自己血回収術
- 器械不要で、器機導入費や保守費用などの隠れたコストなし
- オールインワン・パッケージ
返血回路、フィルタ以外すべて同梱

日本の病院に適したシンプルな運用

- 術後ベッドサイドで貯血し、その場で患者へ返血。回収血は保管しないため取違えの恐れなし
- 薬剤の添加、器具、電源不要
病室で返血手技が完了
- 100% ディスポーザブル
手術室と病棟で器材の行き来なし





クローズドシステム

返血までの一連の手技で、無菌的に回収血を取り扱うので、薬剤添加も洗浄工程も不要です。

キットの返血バッグから先の返血回路以外、道具、電気も不要です。

作業としては、病室のベッドサイドで、操作を理解した一人のスタッフだけで、容易に返血できます。

シンプルな装置、シンプルな手技が CBC III のメリットです。

返血レバー

リザーバーから返血バッグに回収血を移動

陰圧ダイヤル

電動ポンプにより、オフ、25、50、100mmHgの、安定した陰圧でドレーン可能

陰圧インジケーター

リザーバ圧そのものを表す、風船式圧力インジケーター

エアフィルター (内部)

エアポンプと無菌性を両立

リザーバー

容量 800ml ペン記入可能なラベル付

安全ストラップ

ベッドレールに簡便固定

内臓プレフィルター

ドレーン回路からの組織を濾過

ファットリテンションバルブ

脂肪分をリザーバーに留める特殊弁

Package information

滅菌パッケージに同梱されています

① ドレーンチューブ


以下、組立済み

② 800ml リザーバー

③ Yコネクター

④ 回収チューブ

⑤ 返血バッグ

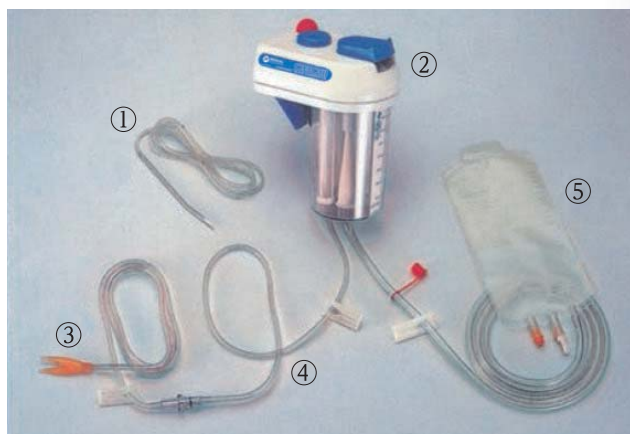

Option

返血で必要になる、CBC IIIに最適な輸血フィルター SQ40s も、お取り扱いしています。
40 μ m 以上の微小凝集塊を除去する、スクリーンフィルター式の輸血用血液フィルターです。

充填量	20mL
1mL 滴数	20 滴
材質	膜：ポリエステル、本体：ポリプロピレン
滅菌方法	エチレンオキサイドガス



販売元 ヘモネティクスジャパン合同会社
製造販売元 川澄化学工業株式会社

Ordering Information

カタログ番号	製品名	規格
0225-414-000JP *1	CBCIII ブラッドコンサーベーションシステム	径 3.2mm (シングルパック)
0225-426-000JP *1	CBCIII ブラッドコンサーベーションシステム	径 4.8mm (シングルパック)
SQ40S-KJS *2	輸血フィルター SQ40s	CBC2用

20 μ m, 40 μ m のマイクロアグリゲートフィルターを使用しての返血を推奨します。

医療機器承認番号	販売名
*1 20600BZY01133000	CBCII ブラッドコンサーベーションシステム
*2 16100BZZ00047000	輸血フィルター S Q 4 0 s

Japan

この印刷物はストライカー社の製品を掲載しています。全てのストライカー社製品は、ご使用前にその添付文書・製品ラベル・取扱説明書をご参照ください。この印刷物に掲載されております仕様・形状は改良等の理由により、予告なしに変更されることがあります。ストライカー社製品についてご不明な点がございましたら、弊社までお問合せください。

Literature Number: IT1-103
YN/MI 2m 04/19

Copyright © 2019 Stryker
Printed in Japan

製造販売業者
日本ストライカー株式会社
112-0004 東京都文京区後楽2-6-1 飯田橋ファーストタワー
P 03 6894 0000

www.stryker.co.jp

医療従事者向けサイト: Stryker medical professional site
www.stryker.co.jp/mp2/