

stryker

Free to  
be your  
**best**



## **Stryker F1**

**Cordless Small Bone  
Power Tool System**

# Stryker F1 Cordless Small

Stryker F1システムは、軽量でバランスのとれた出力と精度を有する革新的なpower toolです

## SmartGRIP Technology



ペンシルグリップ



ピストルグリップ

ハンドピース、バッテリーを一体型のモジュールにし、Stryker独自のSmartGRIPを生み出しました。

- 優れた操作性と制御機能
- バランスの良い筐体デザイン
- 菌による汚染の可能性を最小限に低減
- 確かな耐久性を実現



## Motors

Stryker F1システムは、5つのモーターをご用意しています。どのモーターも、いずれのSmartGRIPモジュールでも使用することができます。



F1 サジタルソー  
1900-034-000



F1 オシレーティングソー  
1900-031-000



F1 レシプロソー  
1900-037-000



F1 マイクロドリル  
1900-015-000



F1 ユニバーサルモーター  
1900-099-000

# Bone Power Tool System



## Attachments

Stryker F1システムには、3つのアタッチメントがあります。これらのアタッチメントにはF1ユニバーサルモーターを使用します。そのため、数少ないコンポーネントで効率的に手術を行うことができます。



F1 ワイヤーコレット  
1900-062-000



F1 スモールAOチャック  
1900-110-000



F1 ヤコブスチャックキー付  
1900-132-000



ヤコブスチャックキー  
4100-130-060

## SmartGRIP Reliability

- SmartGRIP モジュールは、充電後使用せずに 30 日間保管しても、出力や性能が低下することはありません。\*
- 各バッテリー内部を絶縁し、滅菌作業時の耐熱性能を高めています。

\* Stryker 社内資料



ペンシルグリップ



ピストルグリップ

## Battery indicator light

- バッテリー表示ランプは、バッテリーの残量を色で示します。
  - ・モーターを挿入すると、緑色に点灯します。これはバッテリー残量が充分にあり SmartGRIP モジュールの操作が可能になったことを示しています。
  - ・バッテリーの残量が 20% になると、黄色に点灯します。
  - ・バッテリーの残量がゼロに近くなると黄色に点滅し、SmartGRIP モジュールの電源がまもなくオフになることを示します。



## Stryker F1 System part number

### SmartGRIP Modules\*

1900-013-000 F1 スマートグリップ/ペンシルグリップ  
1900-012-000 F1 スマートグリップ/ピストルグリップ

### Motors\*

1900-034-000 F1 サジタルソー  
1900-031-000 F1 オシレーティングソー  
1900-037-000 F1 レシプロソー  
1900-015-000 F1 マイクロドリル  
1900-099-000 F1 ユニバーサルモーター

### Attachments

1900-062-000 F1 ワイヤコレット / 0.7-2.0mm  
1900-110-000 F1 スモール AO チャック / AO  
1900-132-000 F1 ヤコブスチャックキー付 / 4.0mm  
4100-130-060 ヤコブスチャックキー / 4.0mm

### Battery charger

7110-190-000 F1 ユニバーサルチャージャー  
1900-125-000 F1 チャージャーモジュール

### Sterilization solutions

1900-476-020 F1 コンテナ S 底  
1900-476-030 F1 コンテナ S 蓋  
1900-376-010 F1 ハンドピースインサートトレイ  
1900-377-010 F1 スマートグリップインサートトレイ  
1900-470-120 F1 テンパープルーフロック付ステラッドインジケーター  
1000 枚/箱  
1900-470-130 F1 コンテナステラッドインジケーター  
250 枚/箱  
1900-470-140 F1 ポリプロピレンフィルター  
1000 枚/箱

医療機器認証番号

販売名

\* 230AFBZX00035000 ストライカー社 F1 システム

## Japan

この印刷物はストライカー社の製品を掲載しています。全てのストライカー社製品は、ご使用前にその添付文書・製品ラベル・取扱説明書をご参照ください。この印刷物に掲載されております仕様・形状は改良等の理由により、予告なしに変更されることがあります。ストライカー社製品についてご不明な点がございましたら、弊社までお問合せください。

Literature Number: NE1-35  
YN/MI 3m 07/18

Copyright © 2018 Stryker  
Printed in Japan

製造販売業者

日本ストライカー株式会社

112-0004 東京都文京区後楽2-6-1 飯田橋ファーストタワー  
P 03 6894 0000

www.stryker.co.jp

医療従事者向けサイト: Stryker medical professional site  
www.stryker.co.jp/mp2/