


ES2™ spinal system

ES2 スパインシステム

- ▶ 15mm リダクションスレッドを有する
ブレード一体型スクリュー
- ▶ 5.5mm 径又は 6.0mm 径ロッドが選択可能
- ▶ パワーツールによるスクリュー刺入

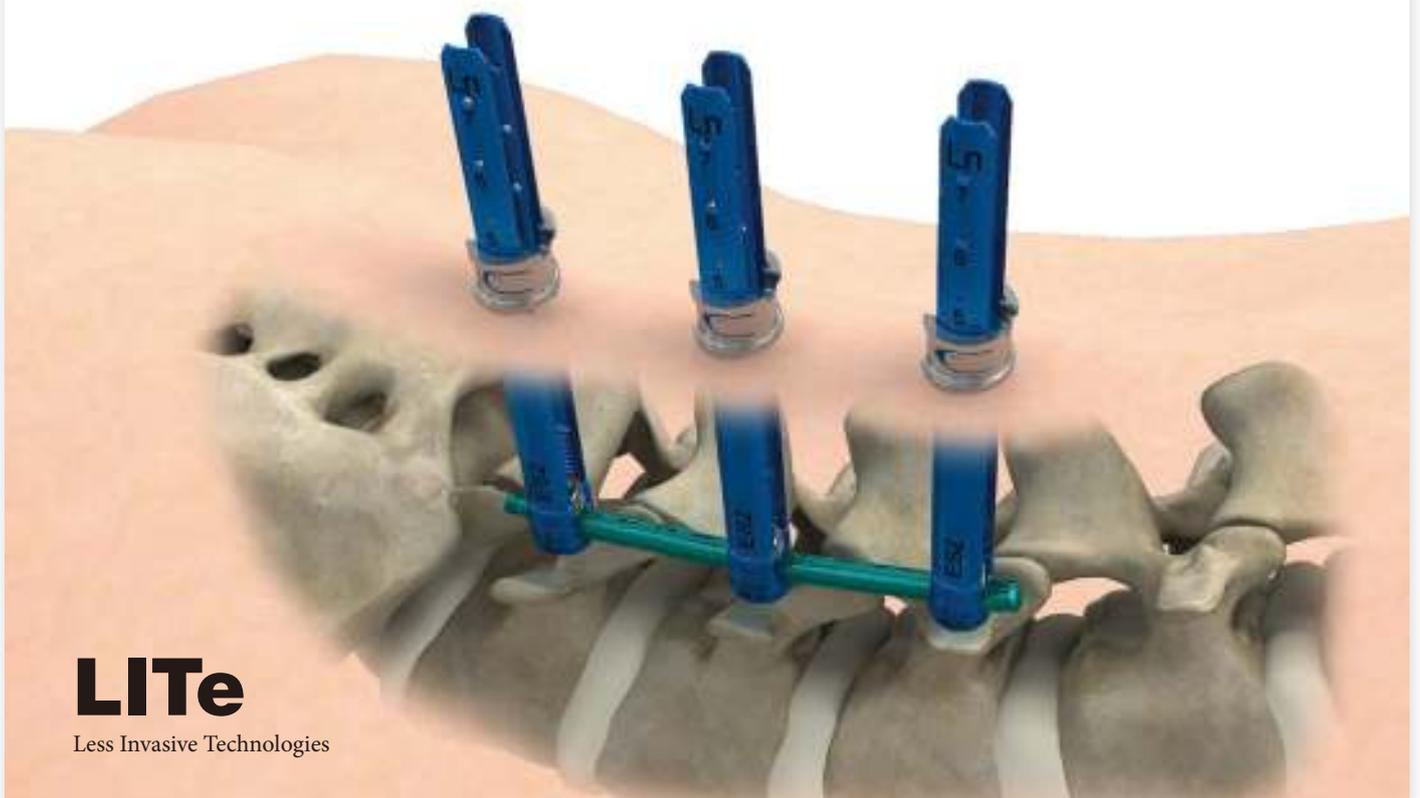

LITe

Less Invasive Technologies


ES2 Spinal System

Efficiency · Simplicity · Security

Stryker Spineは2009年にMANTISを販売開始し、変性疾患、外傷、腫瘍、感染等の幅広い症例を適応としてご使用頂き、数多くのご評価を頂いてきました。この度、そのMANTISは改良され、より効率的 (Efficiency) で、簡便 (Simplicity) かつ安全 (Security) なES2として生まれ変わりました。

2 SIZE BLADE OPTIONS


- 患者様の体格、固定部位に合わせ、2種類のブレードサイズから選択が可能
- 胸椎レベルや痩せた患者様には術野を妨げないショートブレードが有用

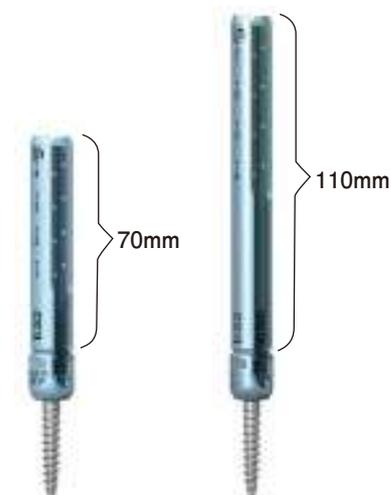

ショートブレード ロングブレード


BUILT-IN REDUCTION THREADS

- ブレード内にデザインされた15mmのリダクションスレッドが、パースエーターを不要とし、簡便なロッド締結が可能

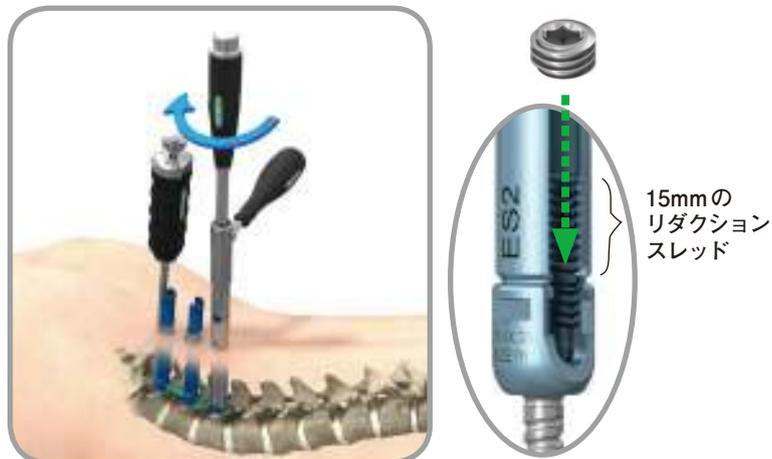


TECHNOLOGY FROM Xia3

- Xia3から継承された「6ポイントスター」デザインにより、スクリウドライバーとの接合部での「ぶれ」や「がたつき」を防止

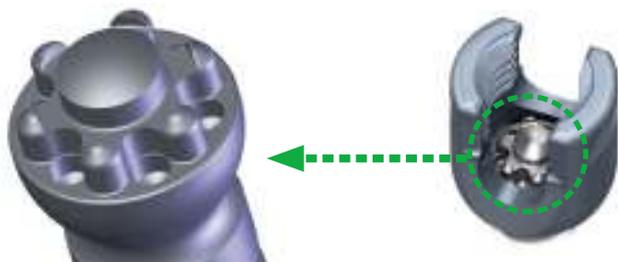


- Xia3から継承された「ボックススレッド」デザインにより、スクリューの効き、および引き抜き強度が向上

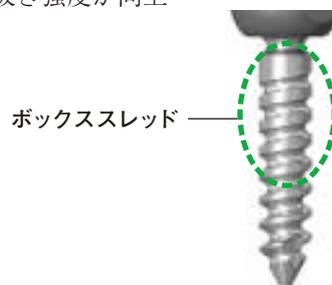

C-RING

- ブレード上のホールとCリングのクリップ機構により、任意の高さに設置可能
- Cリング上のノッチにより、ロッド長・ロッドベンディングの計測が可能
- ブレードを把持し、ロッド挿入時の視認性を確保

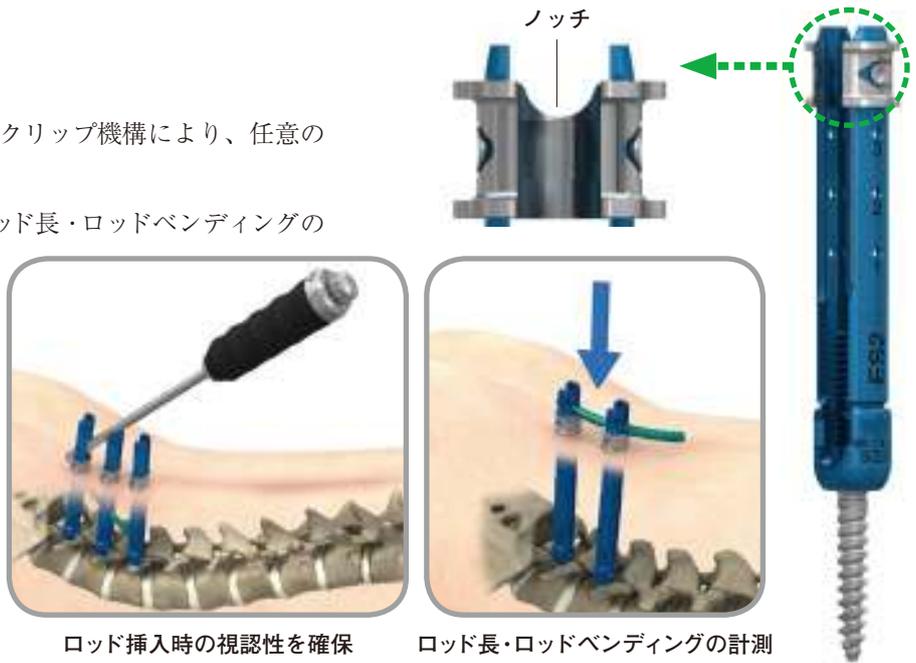


ロッド挿入時の視認性を確保

ロッド長・ロッドベンディングの計測

φ 5.5mm/φ 6.0mm* ROD ACCEPTANCE

- 操作性の高い 5.5mm 径ロッド
⇒変性疾患等の short fusion

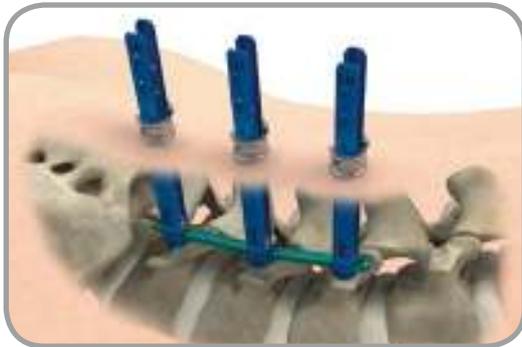

- 強度の高い 6.0mm 径ロッド
⇒外傷・感染・腫瘍等の long fusion



* 6.0mm径のロッドについては、「マンティススパインシステム」の手術手技書、またはパンフレットをご参照ください。

POWERED SCREW INSERTION

- ストライカー製パワーユニットによるスクリュー挿入が可能
- 手術時間を短縮し、徒手のスクリュー挿入に伴うストレスや煩雑さを軽減

It's time to
POWER
your procedures
with
stryker



詳細はパンフレット「Powered Screw Insertion」をご参照ください。

ES2 Spinal System

■インプラント一覧

医療機器承認番号 販売名

22100BZX00264000 MANTISスパインシステム
* 22100BZX00886000 エクシア バイタリウム ロッド

ショートブレードスクリュー		
カタログ番号	径	長さ
482802425	4.5mm	25mm
482802430		30mm
482802435		35mm
482802440		40mm
482802445		45mm
482802530	5.5mm	30mm
482802535		35mm
482802540		40mm
482802545		45mm
482802550		50mm
482802555	55mm	
482802630	6.5mm	30mm
482802635		35mm
482802640		40mm
482802645		45mm
482802650		50mm
482802655	55mm	
482802660	60mm	
482802730	7.5mm	30mm
482802735		35mm
482802740		40mm
482802745		45mm
482802750		50mm
482802755	55mm	
482802760	60mm	
482802770	70mm	
482802780	80mm	
482802790	90mm	
482802830	8.5mm	30mm
482802835		35mm
482802840		40mm
482802845		45mm
482802850		50mm
482802855	55mm	
482802860	60mm	
482802870	70mm	
482802880	80mm	
482802890	90mm	

ロングブレードスクリュー		
カタログ番号	径	長さ
482804425	4.5mm	25mm
482804430		30mm
482804435		35mm
482804440		40mm
482804445		45mm
482804530	5.5mm	30mm
482804535		35mm
482804540		40mm
482804545		45mm
482804550		50mm
482804555	55mm	
482804630	6.5mm	30mm
482804635		35mm
482804640		40mm
482804645		45mm
482804650		50mm
482804655	55mm	
482804660	60mm	
482804730	7.5mm	30mm
482804735		35mm
482804740		40mm
482804745		45mm
482804750		50mm
482804755	55mm	
482804760	60mm	
482804770	70mm	
482804780	80mm	
482804790	90mm	
482804830	8.5mm	30mm
482804835		35mm
482804840		40mm
482804845		45mm
482804850		50mm
482804855	55mm	
482804860	60mm	
482804870	70mm	
482804880	80mm	
482804890	90mm	

LITE ブロッカー	
カタログ番号	
48289999	



ヘックスストレートロッドチタン		
カタログ番号	径	長さ
482807040	5.5mm	40mm
482807045		45mm
482807050		50mm
482807055		55mm
482807060		60mm
482807065		65mm
482807070		70mm
482807080		80mm
482807090		90mm
482807100		100mm
482807110		110mm
482807120		120mm
482807180		180mm
482807480		480mm

ヘックスストレートロッドバイタリウム*		
カタログ番号	径	長さ
482805480	6.0mm	480mm
482808480	5.5mm	480mm

ヘックスプリベントロッドチタン		
カタログ番号	径	長さ
482806040	5.5mm	40mm
482806045		45mm
482806050		50mm
482806055		55mm
482806060		60mm
482806065		65mm
482806070		70mm
482806080		80mm
482806090		90mm
482806100		100mm
482806110		110mm
482806120		120mm
482806130		130mm

Japan

この印刷物はストラライカー社の製品を掲載しています。全てのストラライカー社製品は、ご使用前にその添付文書・製品ラベル・取扱説明書をご参照ください。この印刷物に掲載されております仕様・形状は改良等の理由により、予告なしに変更されることがあります。ストラライカー社製品についてご不明な点がございましたら、弊社までお問合せください。

®マークの付いた製品名は、ストラライカーグループの登録商標です。

Literature Number:SP1-83
YN/MI 1.2m 05/18

Copyright © 2018 Stryker
Printed in Japan

製造販売業者

日本ストラライカー株式会社

112-0004 東京都文京区後楽2-6-1 飯田橋ファーストタワー
P 03 6894 0000

www.stryker.co.jp

医療従事者向けサイト: Stryker medical professional site
www.stryker.co.jp/mp2/