

stryker



Consola CORE 2

Personalice
sus instrumentos

Consola CORE 2

Impulsando los beneficios

La CORE 2 Console proporciona un cómodo centro de control único para diversos dispositivos. A continuación, encontrará una descripción de las numerosas funciones y ventajas que le va a aportar en cada procedimiento.



Versatilidad

- Aplicaciones o procedimientos quirúrgicos, ortopédicos, dentales, ORL, neurológicos, medulares, endoscópicos o de otro tipo.
- Suministra energía para corte y fresado a motores, micromotores de neurocirugía y ORL, y garantiza su utilización con pedales y mandos manuales como con irrigación, molinos óseos.
- Ayuda a colocar o cortar tornillos, metal, alambres, pines y otros dispositivos de fijación.

Personalización exclusiva

- Se pueden almacenar y transferir 100 configuraciones predeterminadas de usuario.
- A Software I.D. Touch que permite ajustar el par, la sensación táctil y el rendimiento del motor.**
- B Aceleración y frenado ajustables.**
- Tasa del flujo de irrigación ajustable.
- Tres opciones de pedal, cada una con entre dos y cuatro botones para establecer las funciones deseadas.
- Amplia gama de dispositivos compatibles.



Eficacia en costes y en el flujo de trabajo

- Una sola consola para uso en múltiples especialidades; así se garantiza el retorno de la inversión.
- Suministra energía a toda una gama de dispositivos, reduciendo la necesidad de contar con varias fuentes de alimentación.

C Tres puertos para piezas de mano; dos funcionan simultáneamente.

D Los discos de iluminación (5) muestran la correspondencia de motores y pedales por color para una interrupción mínima del flujo de trabajo.

E Dos puertos para los pedales; posibilidad de asignar dos pedales a una sola pieza de mano.

F Irrigación integrada; inserción y extracción en un paso.

- Compatibilidad con la futura Smart Equipment Management (SEM).

Sencillez

- La programación inteligente activa pantallas, opciones e información de manera automática en función de los dispositivos conectados.
- Iconos grandes y una pantalla táctil en color de 7" con un ángulo de visión de 170°.

G Los distintos tonos sonoros indican diferentes acciones/alertas.

- Errores en formato numérico y descriptivo con sugerencias para la resolución de problemas.
- Navegación directa e intuitiva con atajos para una mayor rapidez.
- Actualizaciones rápidas por USB in situ y soporte técnico local.
- La información de contacto del representante de ventas de Stryker puede almacenarse internamente.

Tecnología mejorada

- El nuevo diseño amplía las funciones de la consola CORE original de Stryker para optimizar aún más la consola CORE 2.

- 13 años de rendimiento demostrado
- Más de 30.000 unidades vendidas en todo el mundo

D Visibilidad por colores de la correspondencia de piezas de mano y pedales.

Personalización exclusiva

Diversas funciones permiten introducir preferencias personales, lo que le ofrece la oportunidad de diseñar un sistema a medida para mejorar habilidades y satisfacción.

Software I.D. Touch: sensación táctil personalizada




Software I.D. Touch: sensación táctil a su gusto

¿Qué es el software I.D. Touch? Se trata de un software exclusivo que le permite personalizar los motores eléctricos de Stryker, como el π Drive y el π Drive+, y optimizar su rendimiento. Le ofrece la oportunidad de regular la respuesta del motor y el rendimiento para conseguir la sensación táctil que desea. El software I.D. Touch guardará sus preferencias y la consola CORE 2 estará lista para usarse cuando usted lo esté.

Es una personalización total; no solo de velocidad o RPM

- Configuración del torque τ preferido del 0 al 100 %.
- Respuesta del motor: de baja a alta sensibilidad cuando se aplica presión.
- Sensación táctil y rendimiento de la pieza de mano.
- Una de las muchas configuraciones de la opción Motor.
- Almacenada en la preselección de usuario, se recupera tocando dos veces.

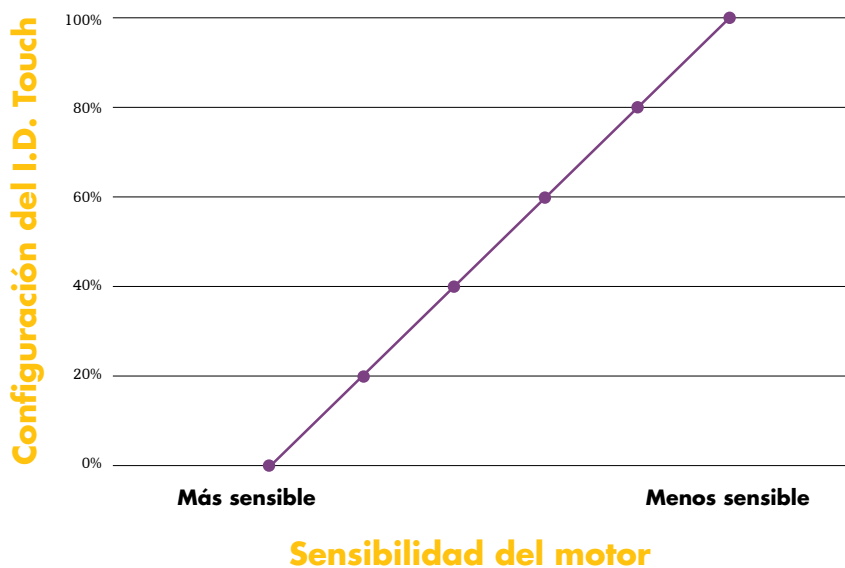


Perfiles de usuario: listo para cuando usted lo está



En el quirófano, usted y su equipo afrontan responsabilidades críticas.

Tener que parar para ajustar las preferencias de los instrumentos puede resultar inoportuno o incluso hacerle perder la concentración. Nuestros perfiles de usuario personalizados evitan esta interrupción permitiéndole recuperar todas sus preferencias cuidadosamente programadas con tan solo dos toques.

- Basta configurar una vez para guardarlas (almacena 100).
- Copiar/editar permite la creación de múltiples perfiles sin tener que empezar desde cero.
- Las funciones personalizables se muestran inmediatamente dependiendo del dispositivo conectado e incluyen las RPM, la tasa de oscilación, la dirección, el modo fijo/variable y mucho más.
- Transferibles a otras consolas CORE 2 a través de USB.

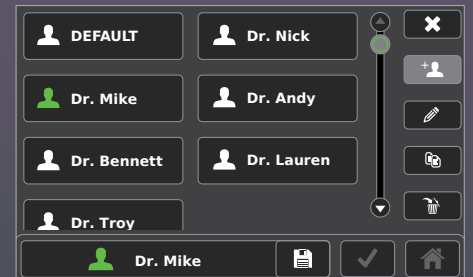

Mejore sus instrumentos

Las gamas de motores e instrumentos son tan buenas como las personas que las manejan. Equipadas con todos los extras y opciones, le aportan a usted y a sus instrumentos toda una serie de capacidades y beneficios añadidos. Estas valiosas funciones y su potencia son el motivo por el que se usan 30.000 unidades de la consola CORE en todo el mundo.

	Consola CORE 2
Consola universal que se puede utilizar en múltiples especialidades (retorno de la inversión).	•
Amplia gama de dispositivos compatibles.	•
Los discos de colores iluminados indican correspondencias entre piezas manuales/pedales.	•
Opera dos piezas de mano al mismo tiempo.	•
Compatibilidad con Smart Equipment Management (SEM).	•
Personalización	
Capacidad para crear y almacenar los perfiles de usuario.	•
Software I.D. Touch para personalizar la sensación táctil y la respuesta del micromotor.	•
Flujo de irrigación ajustable.	•
Configuración de los frenos ajustable.	•
Configuración de la aceleración ajustable.	•
Opciones de pieza de mano eléctrica extraíbles.	•
Dos opciones de pedales eléctricos.	•
Botones del pedal personalizables.	•

Solución

Core

CORE son las siglas de Consolidated Operating Room Equipment (Equipo para quirófano consolidado), pero también significa «núcleo» en inglés. Y realmente nuestra consola está en el núcleo de su trabajo. Puede emplearse en numerosas especialidades gracias a nuestra amplia gama de motores e instrumentos. He aquí una breve síntesis de cómo la consola CORE 2 juega un papel primordial en la mejora de la inversión y la eficacia del quirófano.

Múltiples motores, una sola consola

Nuestra consola se ha diseñado con unas funciones y un software que le ayudarán a sacar el mayor partido de los motores e instrumentos motorizados de Stryker, incluidos los que se citan aquí. Asimismo, su compatibilidad universal optimiza la inversión de capital, el lugar de trabajo y la formación sobre equipos.

Micromotores de alta velocidad π drive y π drive+



Micromotor Sumex



Micromotor S2



Adaptador universal CORE



Micromotor Saber



Molino óseo



Su sistema. A su manera.

Con pedales, cassettes de irrigación, un carro móvil y muchos otros accesorios, puede crear el sistema que desea y facilitar la gestión.

Una gama de pedales

Dispone de dos pedales, cada uno de ellos con entre dos y cuatro botones, para configurar las funciones deseadas, como activación/desactivación de la irrigación, dirección hacia delante/hacia detrás, asignación de cambio del puerto del motor, cambio de RPM y mucho más.



Pedal NSE con cuatro botones personalizables (dos izquierda, dos derecha)



Pedal bidireccional
Pedal bidireccional y dual, con tres botones personalizables



Irrigación fluida

La irrigación integrada en la parte frontal, con inserción y extracción en un solo paso, facilita la instalación y no requiere acoplar ningún componente de hardware adicional ni enroscar ningún tubo. La consola CORE 2 incluye un portasueros integrado y fácil de usar, carga automática y una tasa de flujo ajustable.

Cómodo carro

Con ocho cajones, dos cestas y una superficie superior, el carro incluye la consola CORE 2, pedales y un inventario completo de accesorios de corte. Organícelo según sus deseos y etiquete los cajones de manera personalizada para facilitar la gestión.



Cómo le podemos ayudar

Su representante de ventas de NSE estará encantado de ayudarle a obtener los máximos beneficios de la consola CORE 2, configurándola para adaptarla a sus necesidades y preferencias específicas. Asimismo, puede asistirle en la implantación y en la formación. Los recursos adicionales incluyen:

Formación: Stryker organiza una variedad de eventos de formación médica y cursos con proveedores externos.

Servicios ProCare: complemente su sistema con una variedad de planes de servicio exclusivos ProCare, ofrecidos por técnicos locales.

Flex Financial: le ofrece varias opciones de pago para ayudarle a financiar una nueva compra. La disponibilidad del programa variará dependiendo del país y de la cartera del producto. Consulte a su representante de ventas local para obtener más detalles y datos sobre la disponibilidad.

Realice un pedido o solicite más información

Estos son tan solo algunos de los componentes de la consola CORE 2 disponibles. Para consultar una lista completa u obtener más información acerca de la consola CORE 2 o Stryker NSE, llame a su representante de ventas de NSE.

N.º de referencia	Descripción del producto
5400-052-000	Consola CORE 2
5400-410-000	Carro accesorio CORE
5400-007-000	Pedal NSE
5100-008-000	Pedal bidireccional
5400-050-001	Cassette de irrigación desechable
5400-050-002	Cassette de irrigación doble desechable

* Los nombres y las preferencias de los cirujanos tienen únicamente fines ilustrativos para mostrar ejemplos de personalización de la consola.

Neuro Spine ENT

Este documento es solo para uso de profesionales sanitarios.

Un profesional sanitario debe siempre basarse en su propia opinión clínica y profesional a la hora de decidir si utilizar un producto determinado para tratar a un paciente. Stryker no ofrece asesoramiento médico y recomienda a los profesionales sanitarios que se formen en el uso de cualquier producto antes de utilizarlo en cirugía. La información presentada es para demostrar la amplitud de la gama de productos Stryker. Un profesional sanitario debe siempre consultar las instrucciones que acompañan al paquete, la etiqueta del producto y/o las instrucciones de uso antes de utilizar cualquier producto Stryker.

Es posible que no todos los productos Stryker estén disponibles en todos los mercados debido a que dicha disponibilidad se basa en las prácticas médicas y/o regulatorias de cada mercado. Póngase en contacto con su representante de Stryker si tiene preguntas sobre la disponibilidad de los productos Stryker en su zona.

Stryker Corporation o sus divisiones u otras entidades corporativas afiliadas poseen, utilizan o aplican las siguientes marcas comerciales o marcas de servicio: consola CORE 2, π drive, π drive+, RemB, S2, Saber, Sumex y Stryker. Todas las demás marcas comerciales son marcas de sus dueños o titulares respectivos. Los productos representados llevan el marcado CE de acuerdo con las normativas y las directivas aplicables en la UE. Este material no está concebido para su distribución fuera de la UE y la AELC.



Stryker
4100 East Milham Avenue
Kalamazoo, MI 49001 EE. UU.
Tel.: (+1) 269 323 7700
Fax: (+1) 800 999 3811



9 100 - 003 - 853 EN

9100-003-853ES Rev. Ninguna
DLS 09/2017
2017-15358