


Sage

PrimoFit+™

System zur externen Harnableitung für die männliche Anatomie

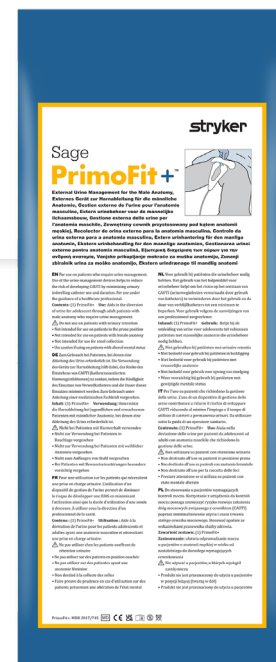

Vorbereitung

- Reinigen, trocknen und bereiten Sie die Haut gemäß den Krankenhausvorschriften vor.
- Wenn Sie vor dem Anbringen der Klebepads eine Vorbehandlung anwenden, stellen Sie sicher, dass die Haut trocken ist, bevor Sie PrimoFit anlegen.
- Trimmen oder schneiden Sie bei Bedarf Haarwuchs gemäß den Krankenhausvorschriften.

Anwendung



- Kontrollieren Sie die Position des Patienten. Beim Anbringen des Produkts sollte sich der Patient in (flacher) Rückenlage befinden. Nachdem das Produkt angebracht wurde, kann das Kopfende des Bettes erhöht werden.
- Drücken Sie das Unterteil mit Klebefläche fest, damit es auf der Haut haftet.
- Ziehen Sie das Bauchklebepad straff über den Schambereich des Patienten.

Pflege


- Achten Sie darauf, dass das Produkt sicher am Saugschlauch befestigt ist und die Absaugung ordnungsgemäß funktioniert.
 - Verwenden Sie eine kontinuierliche Absaugung und keine mit Unterbrechungen.
 - Kontrollieren Sie den Saugschlauch, um Knicke zu vermeiden.
 - Befestigen Sie den Schlauch bei Bedarf gemäß den Krankenhausvorschriften am Bein des Patienten.
- Stellen Sie den Unterdruck auf ein niedriges, kontinuierliches Absaugen bei **mindestens 8 kPa, 80 mbar oder 60 mmHg** ein. Verwenden Sie stets den für das Absaugen erforderlichen Mindestwert.
- Kontrollieren Sie das Produkt nach einem Positionswechsel des Patienten und justieren Sie es bei Bedarf neu.
- Entfernen Sie das Produkt vor der Mobilisation des Patienten.

Anwendung an verschiedenen Körperformen

Verstellbare Sicherungsglaschen sorgen für eine individuelle Passform

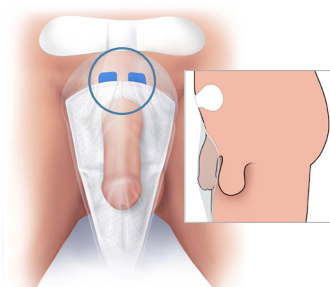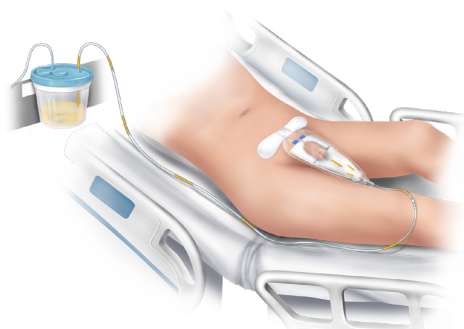

Sicherungsglaschen
nebeneinander

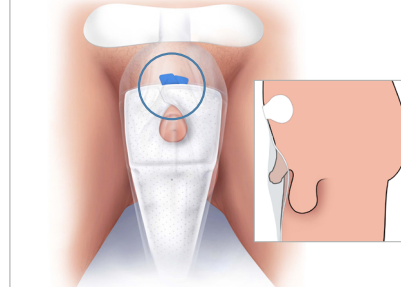

Sicherungsglaschen
übereinander

Dieses Dokument ist ausschließlich für die Verwendung durch medizinische Fachkräfte vorgesehen.

Eine medizinische Fachkraft muss sich bei der Entscheidung für die Verwendung eines bestimmten Produkts zur Behandlung eines bestimmten Patienten stets auf ihr professionelles klinisches Urteilsvermögen verlassen. Stryker erteilt keine medizinischen Ratschläge und empfiehlt, medizinische Fachkräfte vor der erstmaligen Verwendung eines bestimmten Produkts im Umgang damit zu schulen.

Die dargestellten Informationen sollen die Breite des Produktangebots von Stryker veranschaulichen. Vor der Verwendung der Produkte von Stryker müssen medizinische Fachkräfte stets den Beipackzettel, das Produktetikett und/oder die Gebrauchsanleitung beachten.

Unter Umständen sind Produkte nicht in allen Märkten verfügbar, da die Produktverfügbarkeit von der regulatorischen und/oder medizinischen Praxis in den einzelnen Märkten abhängt. Bitte wenden Sie sich bei Fragen zur Verfügbarkeit von Stryker-Produkten in Ihrer Region an Ihren Stryker-Vertreter.

Die Stryker Corporation, ihre Tochterunternehmen oder sonstigen verbundenen Unternehmen besitzen und verwenden die folgenden Warenzeichen oder Dienstleistungsmarken oder haben diese beantragt: PrimoFit+, Sage und Stryker. Alle anderen Warenzeichen sind Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer oder Inhaber.

Die dargestellten Produkte besitzen eine CE-Kennzeichnung gemäß geltenden EU-Verordnungen und -Richtlinien.

PrimoFit+ ist ein Medizinprodukt der Klasse I (CE).

Dieses Dokument ist nicht für den Vertrieb außerhalb der EU, des Vereinigten Königreichs und der EFTA bestimmt.

SAGE-UM-PSTR-865200_REV-0_en_us © 2024 Stryker



Sage Products LLC
3909 Three Oaks Road
Cary, IL 60013
800 323 2220

stryker.com