

# Sage PrimoFit+™ System zur externen Harnableitung für die männliche Anatomie

**REF** 5405-X



## Verpackungsangaben

**Inhalt:** (1) PrimoFit+

- Nur für den Einmalgebrauch
- Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt
- Nicht steril

## Gebrauchsanleitung:

Vor der Verwendung des Produkts die Anleitung auf der Verpackung lesen.

## Indikationen:

Zum Gebrauch bei Patienten, bei denen eine Ableitung des Urins erforderlich ist. Die Verwendung des Produkts zur Harnableitung hilft dabei, das Risiko des Entstehens von katheterassoziierten Harnwegsinfektionen zu senken, indem die Häufigkeit des Einsatzes von Verweilkathetern und die Dauer dieses Einsatzes minimiert werden. Zum Gebrauch durch eine medizinische Fachkraft vorgesehen.

## Kontraindikationen:

Nicht bei Patienten mit Harnverhalt verwenden.

## Vorsichtsmaßnahmen:

- Nicht zur Verwendung bei Patienten in Bauchlage vorgesehen
- Nicht zur Verwendung bei Patienten mit weiblicher Anatomie vorgesehen
- Nicht zum Auffangen von Stuhl vorgesehen
- Bei Patienten mit Bewusstseinsstörungen besonders vorsichtig vorgehen

## Gebrauch einstellen:

- Wenn Patienten die Toilette selbstständig oder mit Unterstützung einer Pflegefachkraft aufsuchen können
- Bei der Mobilisation von Patienten

## Produktdaten

Produktname:	Sage PrimoFit+ System zur externen Harnableitung für die männliche Anatomie
Produktcode	5405-X
Beschreibung:	System zur externen Harnableitung für die männliche Anatomie
Herstellerzulassung	ISO 13485:2016
Verfallsdatum:	Keines
Höhe des Produkts:	Produkt: 50.8 cm
Länge des Produkts:	Produkt: 20.3 cm
Menge pro Karton	40

# Sage PrimoFit+ System zur externen Harnableitung für die männliche Anatomie

## Merkmale und Vorteile:

### Sage Primofit+ System zur externen Harnableitung für die männliche Anatomie

Verrutscht nicht:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Klebepad und Unterteil mit Klebefläche fixieren das Produkt und ermöglichen eine einfache Anwendung und Entfernung.</li> </ul>
Individuelle Passform:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dank des Unterteils mit Klebefläche entfällt die Notwendigkeit für die Verwendung von Größentabellen und die Prozesseffizienz wird gesteigert.</li> </ul>
Leicht sichtbar:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Blaue Einlagen sind nach der Entnahme leicht zu erkennen, wodurch das Risiko einer falschen Positionierung verringert wird.</li> </ul>
Trockene Haut:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Besonders weiches Stoffgewebe hält Urin von der Haut fern.</li> </ul>
Weniger Auslaufen:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Halbgeschlossene Oberseite reduziert das Auslaufisiko bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung der Luftzirkulation.</li> </ul>
Kernstruktur:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nimmt Flüssigkeit auf, die in den Auffangbehälter gesaugt wird. Hält Flüssigkeit von der Haut fern, wodurch die mit inkontinenzassoziierten Dermatitis verbundenen Risikofaktoren reduziert werden.</li> </ul>
Tragedauer:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Die Anwendungsdauer beträgt bis zu 24 Stunden.</li> </ul>
Anschluss für eine einfache Verbindung:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dient zur Verbindung des Produkts mit einem Saugschlauch im Krankenhaus. Ermöglicht den einfachen und sicheren Anschluss an einen Saugschlauch im Krankenhaus.</li> </ul>

**Dieses Dokument ist ausschließlich für die Verwendung durch medizinische Fachkräfte vorgesehen.**

Eine medizinische Fachkraft muss sich bei der Entscheidung für die Verwendung eines bestimmten Produkts zur Behandlung eines bestimmten Patienten stets auf ihr professionelles klinisches Urteilsvermögen verlassen. Stryker erteilt keine medizinischen Ratschläge und empfiehlt, medizinische Fachkräfte vor der erstmaligen Verwendung eines bestimmten Produkts im Umgang damit zu schulen.

Die dargestellten Informationen sollen die Breite des Produktangebots von Stryker veranschaulichen. Vor der Verwendung der Produkte von Stryker müssen medizinische Fachkräfte stets den Beipackzettel, das Produktetikett und/oder die Gebrauchsanleitung beachten.

Unter Umständen sind Produkte nicht in allen Märkten verfügbar, da die Produktverfügbarkeit von der regulatorischen und/oder medizinischen Praxis in den einzelnen Märkten abhängt. Bitte wenden Sie sich bei Fragen zur Verfügbarkeit von Stryker-Produkten in Ihrer Region an Ihren Stryker-Vertreter.

Die Stryker Corporation, ihre Tochterunternehmen oder sonstigen verbundenen Unternehmen besitzen und verwenden die folgenden Warenzeichen oder Dienstleistungsmarken oder haben diese beantragt: PrimoFit+, Sage und Stryker. Alle anderen Warenzeichen sind Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer oder Inhaber.

Die dargestellten Produkte besitzen eine CE-Kennzeichnung gemäß geltenden EU-Verordnungen und -Richtlinien.

PrimoFit+ ist ein Medizinprodukt der Klasse I (CE).

Dieses Dokument ist nicht für den Vertrieb außerhalb der EU, des Vereinigten Königreichs und der EFTA bestimmt.



Sage Products LLC  
3909 Three Oaks Road  
Cary, IL 60013 USA  
800 323 2220 ; +1 815 455 4700

**stryker.com**

SAGE-UM-OTHD-894155\_REV-0\_en\_us  
Copyright © 2024 Stryker  
11/2023