

Porquê o nível 4 da AAMI?

Condições de utilização previstas e recomendações para cada nível da AAMI. Retirado do documento da AAMI (Associação para o avanço de instrumentação médica): Selection and Use of Protective Apparel and Surgical Drapes in Health Care Facilities (Seleção e utilização de vestuário de proteção e campos cirúrgicos em instalações de cuidados de saúde) (AAMI TIR11:2005).

Nível da AAMI	Risco de exposição			Exemplos de procedimentos com risco associado
	Quantidade de fluidos	Emissão de salpicos de fluidos	Pressão exercida na bata	
Nível 1	Mínima	Mínima	Mínima	Procedimentos simples de ORL, oftalmologia e biópsia
Nível 2	Baixa	Baixa	Baixa	Procedimentos de cirurgia minimamente invasiva, endoscopia, radiologia ou laboratório de cateterização
Nível 3	Moderada	Moderada	Moderada	Procedimentos de endoscopia urológica, mastectomia e artroscopia ortopédica e procedimentos abertos gastrointestinais e geniturinários
Nível 4	Alta	Alta	Alta	<ul style="list-style-type: none"> Qualquer procedimento em que as mãos/ os braços do cirurgião estejam dentro da cavidade corporal Procedimentos ortopédicos sem garrote Procedimentos abertos cardiovasculares ou torácicos Procedimentos em traumatismos Cesarianas

4

- O teste da AAMI para penetração viral (ASTM 1671) afirma que este teste é necessário para obter o nível de proteção necessário em procedimentos que envolvam um grande volume de sangue, contacto com o doente e com sangue e possível abrasão durante o procedimento que possa enfraquecer o material.
- Os níveis de pressão envolvidos em testes de penetração viral para o nível 4 são mais de duas vezes superiores aos níveis exigidos para pressão hidrostática no nível 3.

Capuzes e capas Flyte	
Capa Flyte, com fecho de correr	
0408-820-000	L (9 por caixa)
0408-830-000	XL (9 por caixa)
0408-840-000	XXL (8 por caixa)
0408-850-000	XXXL (8 por caixa)
Capa Flyte, com fecho de correr, com viseira destacável	
0408-820-100	L (9 por caixa)
0408-830-100	XL (9 por caixa)
0408-840-100	XXL (8 por caixa)
0408-850-100	XXXL (8 por caixa)
Capa Flyte, para vestir pela cabeça	
0408-720-000	L (11 por caixa)
0408-730-000	XL (10 por caixa)
0408-740-000	XXL (9 por caixa)
0408-750-000	XXXL (9 por caixa)
Capuz Flyte	
0408-800-000	Capuz Flyte (32 por caixa)
0408-800-100	Capuz Flyte, com viseira destacável (32 por caixa)
Capacetes cirúrgicos Flyte	
0408-600-000	Capacete Flyte
0408-645-000	Capacete Flyte com luz LED
0408-600-300	Cabo de alimentação Flyte
0408-210-000	Placas almofadadas (8 conjuntos por caixa)
0408-660-000	Bateria
0408-655-001	Carregador, 230 V
0408-655-300	Módulo de carregamento
0408-655-200	Kit de atualização do software do carregador

Para obter mais informações ou efetuar uma encomenda, contacte o seu representante de vendas da Stryker Surgical.

Este documento destina-se exclusivamente a utilização por profissionais de saúde.

Um profissional de saúde tem de recorrer sempre ao seu próprio discernimento clínico profissional ao decidir se deve utilizar um produto específico para tratar um doente específico. A Stryker não fornece aconselhamento médico e recomenda que os profissionais de saúde possuam formação na utilização de qualquer produto específico antes de o utilizarem em cirurgia.

As informações apresentadas destinam-se a demonstrar a abrangência da gama de produtos da Stryker. Um profissional de saúde tem de consultar sempre o folheto informativo, o rótulo e/ou as instruções de utilização do produto antes de utilizar qualquer produto da Stryker. Os produtos podem não estar disponíveis em todos os mercados, porque a disponibilidade dos produtos está sujeita às práticas regulamentares e/ou médicas de cada mercado. Contacte o seu representante da Stryker se tiver dúvidas sobre a disponibilidade dos produtos da Stryker na sua área.

Consulte as instruções de utilização dos produtos Flyte para obter informações detalhadas completas.

A Stryker Corporation, respetivas divisões ou outras entidades empresariais afiliadas possuem, utilizam ou apresentaram pedidos para as seguintes marcas comerciais ou de serviço: Flyte e Stryker. Todas as outras marcas comerciais são marcas comerciais dos respetivos proprietários ou titulares.

Os produtos representados têm marcação CE em conformidade com os regulamentos e as diretivas aplicáveis da UE.



9200000001 PT Rev None 771716 PF 2016/01
20158669
Copyright © 2016 Stryker
www.stryker.com

stryker

Concebido para proteção máxima

Sistema de proteção pessoal Flyte



Responder com confiança a desafios cirúrgicos torna-se mais fácil com os capuzes e as capas de proteção pessoal Flyte da Stryker, as barreiras mais eficazes que fornecemos contra a proliferação de doenças.

4

Proteção líder na sua categoria:

Os capuzes e as capas Flyte fornecem uma defesa ótima contra vírus através da utilização de tecido do grau médico mais elevado, correspondente ao nível 4 da AAMI



Visibilidade desimpedida: Os únicos capuzes e capas para cirurgia disponíveis com uma viseira destacável



Conforto: O tecido leve mantém-no fresco, seco e confortável durante procedimentos longos e complexos

Mantenha-se confiante, sabendo que **está protegido**

Capas Flyte

Nível 4 da AAMI:

4

O nível de proteção da AAMI mais elevado contra contaminação por líquidos e vírus

- Proteção contra exposição a fluidos corporais infecciosos e transferência de microrganismos e partículas
- Fabricado em tecido BVB (breathable viral barrier; barreira respirável contra vírus) trilaminado de grau médico, tratado para oferecer resistência contra vírus de infecção bacteriana

As costuras seladas e o fecho de correr coberto fornecem uma barreira forte e segura contra a contaminação

Uma gama completa de tamanhos para se adaptar corretamente a si, sem excessos de tecido volumosos ou repuxar as costuras



Capuzes Flyte


Fabricados em tecido do grau médico mais elevado, correspondente ao nível 4 da AAMI — o mesmo tecido protetor das capas Flyte

- Ajudam a proteger contra exposição a fluidos corporais infecciosos e transferência de microrganismos e partículas

Leves, para o manter fresco, seco e confortável durante procedimentos longos e complexos

Os únicos capuzes e capas para cirurgia que fornecem uma viseira destacável

- Ajuda-o a manter a visibilidade desimpedida durante a cirurgia
- Elimina a necessidade de esfregar e limpar continuamente durante a cirurgia
- Se ficar obstruída, a viseira superior destaca-se facilmente, revelando uma segunda ou terceira viseira estéril

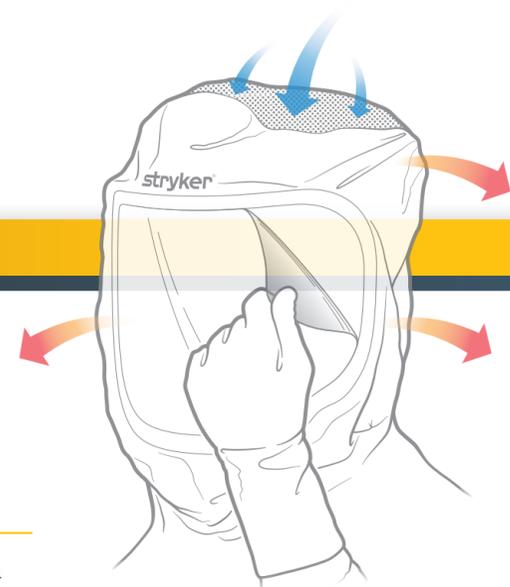

Capacete cirúrgico Flyte



Tecnologia LED de elevada intensidade

- Luz LED com alimentação por bateria: Estão disponíveis modelos de capacete com ou sem luz
- 60 000 lux
- 5575 lm/pés quadrados
- Emite um feixe frio de luz branca pura
- Duração de até 100 000 horas da lâmpada dianteira
- As lâmpadas são resguardadas para evitar encandeamto
- A pega de ajuste da luz direciona o feixe da luz dianteira conforme desejado



Controlo da temperatura

- A ventoinha de seis velocidades faz circular silenciosamente ar frio fresco através do capacete e do fato
- O botão de controlo da ventoinha na barra do queixo altera a velocidade da ventoinha rápida e facilmente
- O bocal de ar traseiro direciona o ar para baixo do pescoço e a parte traseira do fato
- O tubo de ar flexível alonga-se e retrai-se para direcionar o ar para a frente do capacete



Alimentação por bateria de iões de lítio

- O indicador de falta de carga no capacete pisca a vermelho quando restam menos de 15 minutos de carga na bateria



Conforto e utilização fácil

- Ajuste facilmente as partes laterais e a altura do capacete para obter uma adaptação segura e confortável
- Leve: 0,68 kg
- Os capuzes e as capas Flyte mantêm-se na devida posição através do encaixe com ímanes no capacete Flyte